



BOSS

GHẾ MÁT XA

MCB-901-OR-JUPITER/MCB-901-BL-JUPITER

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH



GHI NHỚ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này để biết cách sử dụng chính xác trước khi vận hành. Vui lòng chú ý tới các cảnh báo an toàn quan trọng và lưu giữ sách hướng dẫn này để sử dụng trong tương lai.

Lưu ý: Công ty chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa thiết kế và mô tả của sản phẩm này mà không cần lưu ý thêm. Vui lòng tham khảo màu sắc thực tế của sản phẩm.

NỘI DUNG

An toàn và bảo dưỡng	02-03
Cảnh báo an toàn sử dụng	04-05
Tên, chức năng các bộ phận	06
Chức năng	07-08
Giới thiệu giao diện điều khiển từ xa	09-10
Phương pháp sử dụng	11
1. Bật nguồn	11
2. Vận hành chức năng mát xa điều khiển bằng tay	11-31
3. Tắt nguồn, kết thúc mát xa	31
4. Hệ thống hỗ trợ máy tính bảng Apple và Android, vận hành điều khiển ghế mát xa	32
5. Vận hành máy tính bảng, bật nguồn toàn hệ thống máy.	33
6. Vận hành chức năng điều khiển mát xa bằng máy tính bảng	34-4.4
7. Tắt nguồn, kết thúc mát xa	44
8. Hướng dẫn lắp đặt tay vịn	45-46
9. Hướng dẫn lắp đặt mát xa chân	47-48
10. Hướng dẫn lắp đặt hương liệu	49
11. Hướng dẫn tháo và sử dụng đệm gối đầu và đệm tựa lưng	50
12. Cách bảo vệ sàn	50
13. Cách di chuyển	51
Quy cách sản phẩm	52

1. Cảnh báo an toàn quan trọng

- Không cho trẻ em chạm vào các phần có thể tháo rời của sản phẩm.
- Vui lòng đặt sản phẩm trên mặt phẳng vững chắc, phù hợp với sản phẩm.
- Vui lòng rút phích cắm sau khi sử dụng hoặc trước khi vệ sinh để tránh hư hại, hỏng hóc sản phẩm.
- Vui lòng vận hành sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng này.
- Không sử dụng các phụ kiện không được khuyến nghị.
- Không sử dụng sản phẩm ngoài trời.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng.
- Bất kỳ việc sử dụng nào khác không được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng này đều không được phép.
- Khuyến nghị thời gian sử dụng mỗi lần là 20 phút.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm nếu lớp da bọc bị rách hoặc hư hỏng.
- Vui lòng không sử dụng nếu lớp bọc hoặc lớp da bị hỏng.
- Vui lòng không sử dụng nếu lỗ tản nhiệt bị che hoặc khóa.
- Vui lòng không để bất cứ vật gì lên sản phẩm.
- Vui lòng không ngủ quên khi đang sử dụng sản phẩm.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm khi uống say hoặc không khỏe.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm trong vòng một giờ sau khi ăn.
- Vui lòng không sử dụng các tính năng ở mức độ quá mạnh để tránh chấn thương.

2. Môi trường sử dụng.

- Vui lòng không sử dụng trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao như phòng tắm.
- Vui lòng không sử dụng ngay sau khi nhiệt độ môi trường vừa thay đổi mạnh.
- Vui lòng không sử dụng trong môi trường nhiều bụi hoặc có tính ăn mòn.
- Vui lòng không sử dụng tại nơi không có đủ không gian hoặc điều kiện thông gió tốt.

3. Các đối tượng không thích hợp sử dụng sản phẩm:

- Những người mắc chứng loãng xương.
- Những người mắc bệnh tim hoặc phải mang các thiết bị y tế điện tử như máy trợ tim.
- Những người đang sốt.
- Phụ nữ đang mang thai hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt.
- Những người bị chấn thương hoặc mắc bệnh về da.
- Trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người mắc bệnh thần kinh mà không có người giám sát.
- Những người đã được bác sĩ khuyến cáo nên nghỉ ngơi hoặc cảm thấy không khỏe.
- Không sử dụng máy khi cơ thể đang ướt.
- Thiết bị có thể phát sinh nhiệt, những người mẫn cảm với nhiệt độ cần lưu ý khi sử dụng.

4. Sự an toàn.

- Kiểm tra điện thế, đảm bảo phù hợp với quy cách của sản phẩm.
- Không cắm phích điện khi tay đang ướt.

- Không để nước chảy vào trong sản phẩm để tránh chập điện hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không làm hỏng dây hoặc thay đổi mạch điện của sản phẩm.
- Không dùng vải ướt để làm sạch các bộ phận điện như ổ và phích cắm.
- Tránh xa sản phẩm khi đang mất điện để tránh bị thương khi có điện trở lại đột ngột.
- Ngừng sử dụng khi sản phẩm hoạt động khác thường và báo ngay cho đại lý tư vấn gần nhất.
- Ngừng sử dụng sản phẩm khi thấy không khỏe và nhờ sự tư vấn từ bác sĩ chăm sóc sức khỏe.
- Sản phẩm này không sử dụng cho các đối tượng (bao gồm trẻ em) bị suy giảm khả năng nhận thức, cảm giác, chức năng vận động hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc giới thiệu về các vấn đề có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm bởi người giám hộ (chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ)
- Trẻ em cần được giám sát, đảm bảo không chơi đùa với sản phẩm.
- Nếu dây điện của sản phẩm bị hỏng, sản phẩm sẽ được thay thế bởi Nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc các đơn vị tương tự để tránh nguy hiểm.

5. Bảo dưỡng.

- Sản phẩm này nên được bảo dưỡng bởi đại lý được chỉ định, người dùng không được tự ý tháo rời hoặc tự bảo dưỡng.
- Vui lòng ngắt điện sau khi sử dụng
- Không sử dụng sản phẩm khi ổ cắm bị lỏng.
- Nếu sản phẩm không được sử dụng trong thời gian dài, vui lòng cuộn dây và bảo quản sản phẩm trong môi trường khô ráo, không bụi.
- Không bảo quản sản phẩm trong nhiệt độ cao, gần lửa và tránh ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài.
- Nếu dây điện bị hỏng, cần phải thay thế bởi Nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc các đơn vị tương tự để tránh nguy hiểm
- Vui lòng vệ sinh sản phẩm bằng vải khô, không dùng chất pha loãng, benzene hoặc cồn.
- Các thiết bị kỹ thuật của sản phẩm này được thiết kế đặc biệt, lưu ý không thay đổi nếu không thực sự cần thiết.
- Không dùng vật sắc để mài sản phẩm.
- Không kéo/ đẩy sản phẩm trên bề mặt không bằng phẳng, nên nâng lên trước khi di chuyển.
- Sử dụng ngắt quãng, không để máy chạy liên tục trong thời gian dài.

6. Cách xử lý các vấn đề thường gặp.


- Khi sử dụng, động cơ thường phát ra tiếng.
- Nếu điều khiển không thể hoạt động bình thường, vui lòng kiểm tra ổ cắm, phích cắm có chập không và đảm bảo ổ điện đã bật điện.
- Nếu thời gian hoạt động được ghi nhận quá dài, sản phẩm sẽ tự động kích hoạt nút tắt nguồn. Nếu sản phẩm hoạt động liên tục trong thời gian dài, bộ phận bảo vệ sẽ tự động tắt máy, thiết bị sẽ hoạt động trở lại sau nửa tiếng nghỉ.

An toàn và bảo dưỡng




⚠ Cảnh báo

- Khi nâng chỗ để chân, không nên tác động lực lên chỗ để chân để tránh ghế mát xa bị đổ, gây hỏng hóc sản phẩm hoặc chấn thương cho người dùng.

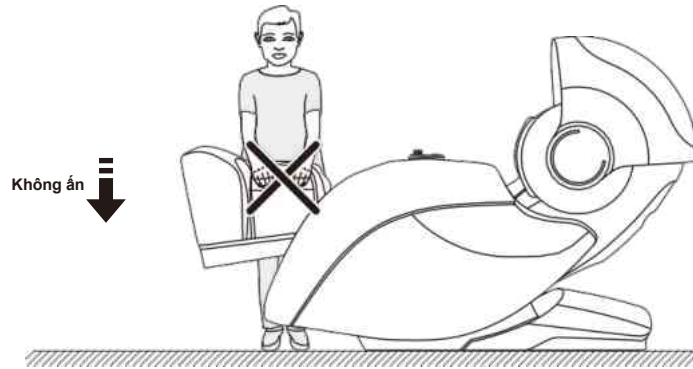

⚠ Cảnh báo

- Trước khi ngồi lên ghế, vui lòng đảm bảo tay mát xa không đặt trên vị trí ngồi để tránh tay mát xa làm hỏng thiết bị hoặc gây chấn thương cho người dùng

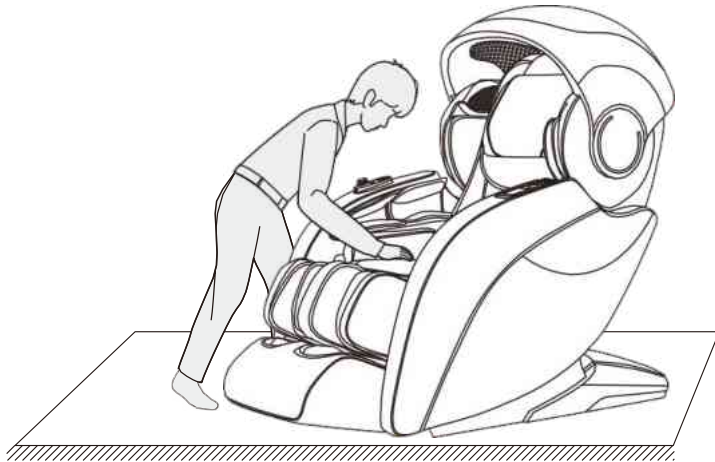


An toàn và bảo dưỡng




⚠ Cảnh báo

- Không cố kéo dây cáp điều khiển hoặc dây điện khi đang tạm ngừng hoặc đang có điện để tránh hư hỏng sản phẩm hoặc điện giật. Khuyến nghị rút dây cáp điều khiển và dây điện sau khi sử dụng ghế.

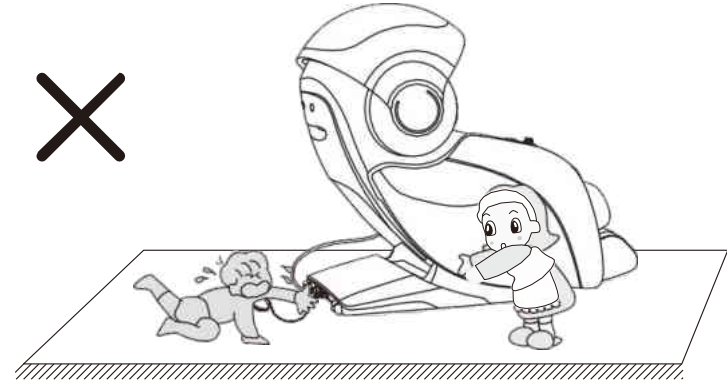


⚠ Cảnh báo

- Khi bật tính năng nằm không trọng lực, vui lòng lưu ý không để trẻ em, vật nuôi dưới chân và lưng ghế để tránh chấn thương và hư hỏng sản phẩm.

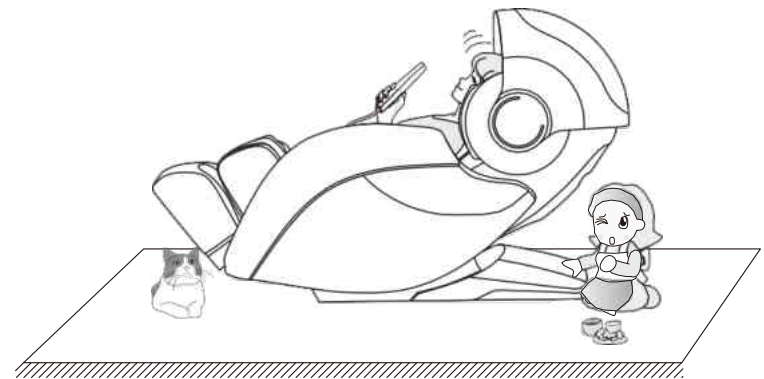

Tên và chức năng các bộ phận

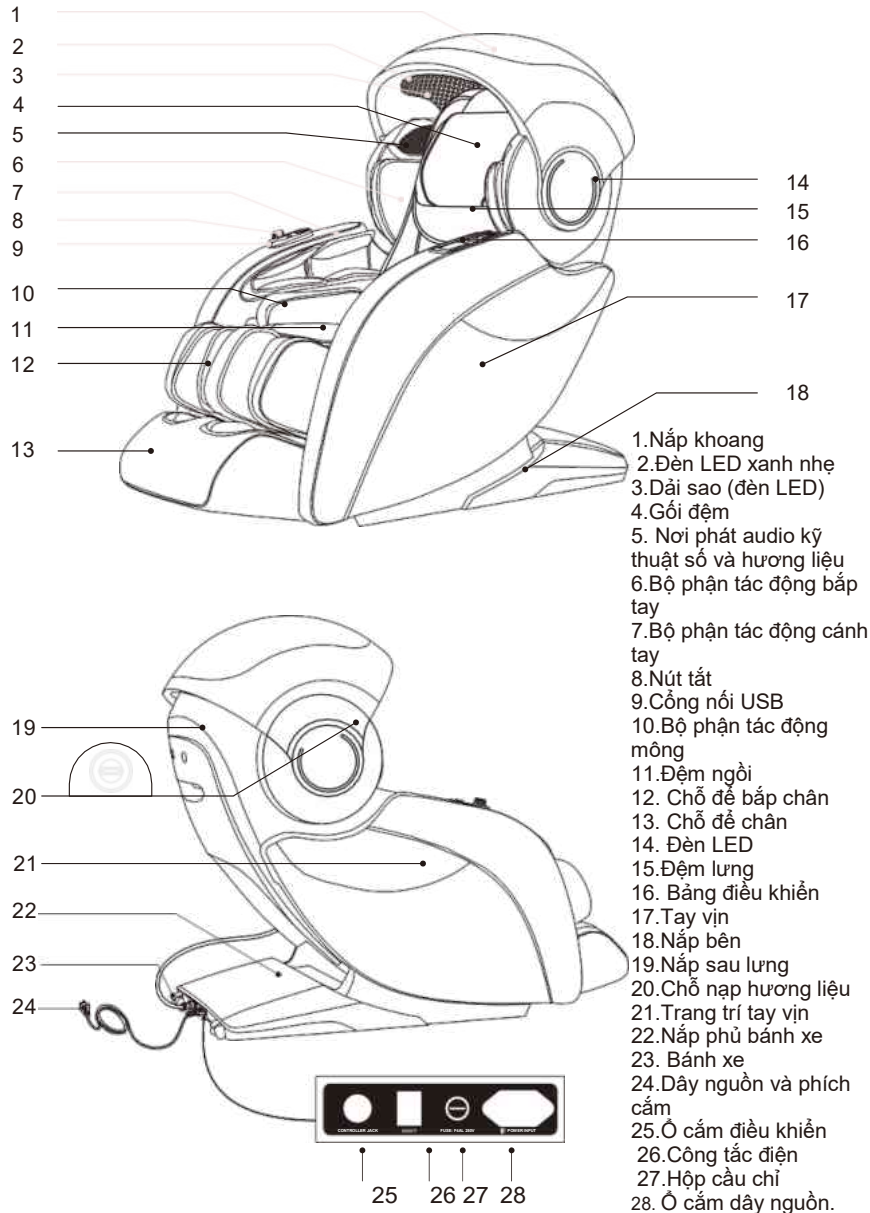

06

Chức năng



- Sản phẩm được thiết kế với tay mát xa thông minh không gây ồn có thể chuyển động lên/xuống đẩy về trước và co về sau
- Thiết kế có chức năng tự động xác định và điều chỉnh vị trí vai, đường cong cơ thể, tự động phát hiện điểm tác động mát xa ngón tay ; tự động điều chỉnh mức độ tác động phía trước và phía sau người thao tác, căn cứ theo đường cong cơ thể và các điểm tác động ngón tay đã phát hiện, để việc mát xa phù hợp hơn với từng đối tượng và đạt hiệu quả cao hơn.
- Tính năng mát xa tự động theo bộ phận cơ thể: sáu hình thức mát xa tự động như: Mát xa kiểu Trung Quốc (Shujing Active), Định hình hông, Mát xa ngủ, Thư giãn cổ và vai, Kéo giãn lưng và Thờ.
- Có 3 chức năng mát xa đặc biệt: tắm trong tia sáng xanh, hương liệu, nhạc SPA.
- Có 3 loại chức năng lưu giữ tùy chỉnh: Lưu giữ tùy chỉnh I, Lưu giữ tùy chỉnh II, Lưu giữ tùy chỉnh III.
- Chọn thủ công tính năng cho phần thân trên: có 5 hình thức lựa chọn vị trí mát xa, như: tác động toàn bộ, một phần, điểm cố định, lưng trên, lưng dưới; nâng vai, đấm bóp, vỗ nhẹ, mát xa kiểu Nhật (shiatsu); kết hợp đấm bóp và vỗ nhẹ và sáu kỹ thuật mát xa bốn chiều ; có năm tốc độ mát xa có thể điều chỉnh, đối với chế độ vỗ nhẹ và mát xa kiểu Nhật, viên bi mát xa có thể tác động theo năm khoảng rộng có thể điều chỉnh.
- Với tính năng massage bằng áp lực không khí: tính năng mát xa cánh tay (tích hợp 8 túi khí), bắp tay (tích hợp 4 túi khí), lưng (tích hợp 4 túi khí), bắp chân (tích hợp 22 túi khí), bàn chân (tích hợp 18 đầu mát xa), tính năng mát xa bằng khí trên cả 2 mặt của đệm ngồi (tích hợp 12 túi khí), tính năng mát xa bằng khí trên đệm ghế (tích hợp 4 túi khí), và điều chỉnh cường độ áp lực theo ba tốc độ.
- Sản phẩm có tính năng trị liệu bằng nhiệt đối với lưng và bắp chân: sợi carbon được sử dụng như là nguồn nhiệt hồng ngoại.
- Khung tựa lưng được thiết kế với công nghệ đường ray trượt giữ cho lưng ghế luôn cách xa tường, giúp tiết kiệm không gian.
- Sản phẩm có chức năng mát xa xoay hông: áp lực được tác động và xoay xung quanh hông nhằm giảm tình trạng căng cơ thắt lưng do ngồi nhiều.
- Nút tắt ở tay vịn bên trái: nút mở, nút điều chỉnh vị trí lưng tựa và bắp chân, nút sưởi ấm, nút tạo sao, nút điều chỉnh hương liệu, nút không trọng lượng, nút kéo giãn và co giãn bắp chân, nút điều chỉnh áp lực. nút điều chỉnh tự động,...
- Có hai chức năng điều chỉnh: điều chỉnh hạ chân, điều chỉnh nâng liên kết, không trọng lực I hoặc không trọng lực II.

07

Tính năng




- Chân ghế được trang bị tính năng cuộn mát xa chân. Hai bộ con lăn sẽ lăn và cạo vào bàn chân, gót chân để mát xa, xoa bóp bàn chân và gót chân.
- Phần đỡ bắp chân được trang bị tính năng tự động phát hiện chiều dài bàn chân. Khi phần đỡ bắp chân được nâng lên hoặc hạ xuống một góc thích hợp, phần đỡ bắp sẽ tự động phát hiện chiều dài bàn chân và đưa ra chu trình mát xa thoải mái nhất.
- Phần đỡ lưng được áp dụng công nghệ đường ray cong, hoàn toàn phù hợp với độ cong của lưng người, giúp người dùng tận hưởng mát xa từ đầu tới đuôi.
- Có 8 nam châm trong túi khí quấn quanh chân:
- Đèn LED bên trái và phải bấm tay
- Cổng sạc USB bên tay phải
- Có nắp khoang xoay lên/xuống.
- Tính năng xử lý hiển thị bầu trời đầy sao.
- Tính năng phát mùi hương.
- Cấu hình điều khiển màn hình màu bằng tay TFT.

Các thiết bị đầu cuối thông minh (như điện thoại hoặc máy tính bảng) có thể sử dụng phần mềm, ứng dụng để điều khiển ghế mát xa qua Bluetooth.

- Tích hợp phát nhạc kỹ thuật số ở phần bấm tay, với tính năng phát nhạc qua Bluetooth, bạn có thể kết nối các bài hát yêu thích thông qua Bluetooth (tên Bluetooth: IMCM-XXXX) với các thiết bị thông minh (như điện thoại hoặc máy tính bảng)

- Gối tựa đầu có hai lớp, số lớp có thể thay đổi theo nhu cầu theo lựa chọn của từng người để mát xa cổ và vai.


Giới thiệu giao diện điều khiển từ xa

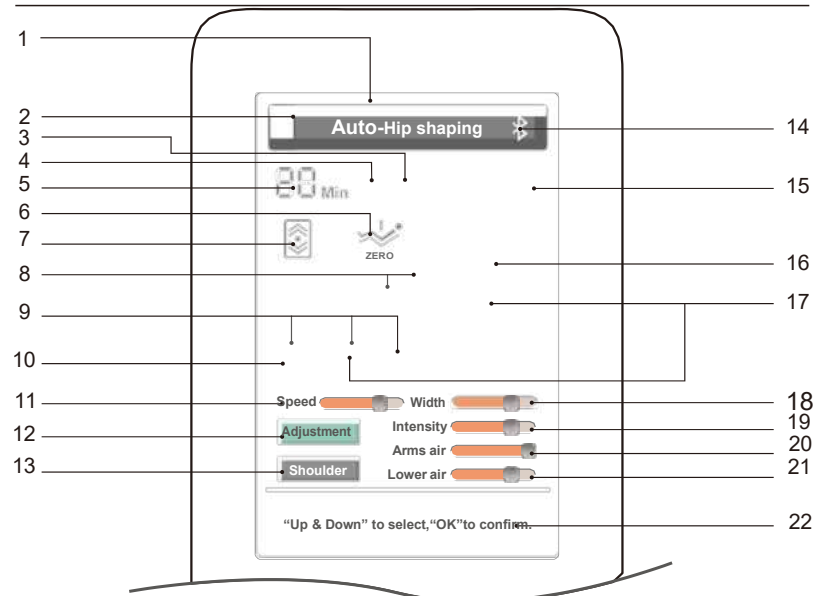

Lưu ý: màn hình hiển thị màu sắc, tính năng và thứ tự sắp xếp các biểu tượng mát xa, vui lòng tham khảo màn hình trên đây!

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Màn hình TFT LCD | 12. Điều chỉnh |
| 2. Thanh trạng thái tính năng massage | 13. Điều chỉnh vị trí vai |
| 3. Hiển thị sao trên nóc khoang | 14. Hiển thị Bluetooth. |
| 4. Hiển thị hương liệu | 15. Hiển thị phương thức |
| 5. Hiển thị thời gian | 16. Hiển thị vị trí massage |
| 6. Hiển thị không trọng lượng | 17. Hiển thị nhiệt độ |
| 7. Hiển thị kéo giãn lưng | 18. Điều chỉnh khoảng rộng |
| 8. Hiển thị áp lực tay | 19. Điều chỉnh cường độ massage |
| 9. Hiển thị áp lực bắp chân và bàn chân | 20. Điều chỉnh áp lực cánh tay |
| 10. Hiển thị lăn chân | 21. Điều chỉnh áp lực lên cơ thể |
| 11. Điều chỉnh tốc độ | 22. Thanh thông tin |

Nút điều khiển

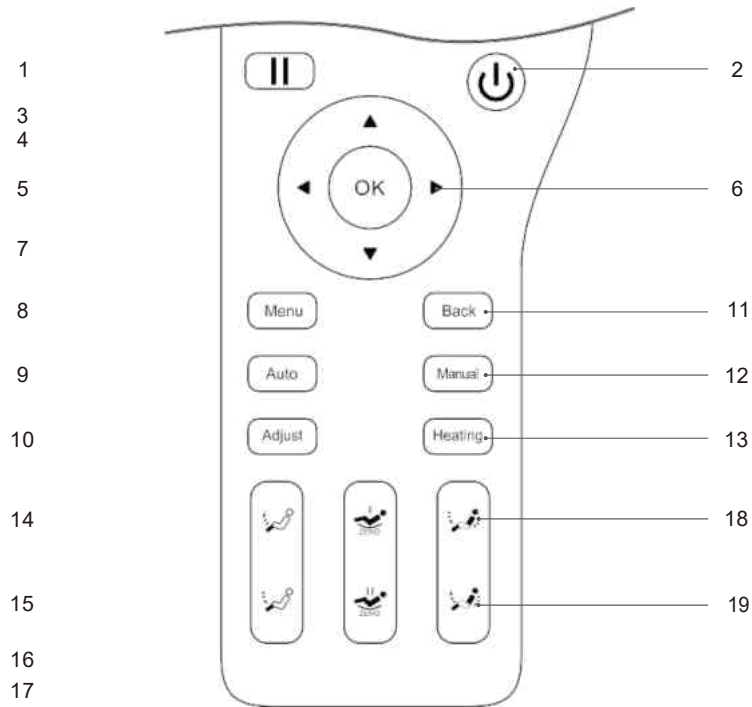

- | | |
|--|---|
| <p>1. Nút dừng: Tạm dừng tính năng đang chạy</p> <p>2. Nút nguồn: mở và tắt ghế mát xa.</p> <p>3. Nút lên: nút mũi tên chỉ lên</p> <p>4. Nút xác nhận</p> <p>5. Nút trái: Mũi tên chỉ sang trái.</p> <p>6. Nút phải: Mũi tên chỉ sang phải.</p> <p>7. Nút xuống: Mũi tên chỉ xuống dưới.</p> <p>8. Mũi menu: Ấn để hiển thị giao diện menu chính</p> <p>9. Nút tự động: Ấn để kích hoạt chế độ tự động.</p> <p>10. Nút điều chỉnh: Ấn để lựa chọn tính năng để điều chỉnh.</p> | <p>11. Nút quay lại: quay lại giao diện các tính năng trước đó</p> <p>12. Nút thủ công: Ấn để hiển thị giao diện lựa chọn thủ công.</p> <p>13. Nút sưởi ấm: Tắt/ bật tính năng sưởi ấm.</p> <p>14. Nút nâng bắp chân: nâng bộ phận đỡ bắp chân.</p> <p>15. Nút hạ bắp chân: hạ bộ phận đỡ bắp chân</p> <p>16. Nút không trọng lực I: góc của ghế mát xa được điều chỉnh theo chế độ không trọng lực I.</p> <p>17. Nút không trọng lực II: góc của ghế mát xa được điều chỉnh theo chế độ không trọng lực II</p> <p>18. Nút đứng dậy: phần lưng đỡ của ghế được dựng lên</p> <p>19. Nút nằm xuống: phần lưng đỡ của ghế được hạ nằm xuống.</p> |
|--|---|

1. Cắm dây nguồn



2. Vận hành chức năng điều khiển mát xa thủ công


1). Tạm nghỉ

-Sau khi ghế mát xa được bật/ tắt, không được cài đặt chế độ tạm nghỉ, trừ khi để cài đặt.



2). Bắt đầu mát xa (nút nguồn)


-Ấn nút nguồn để bắt đầu mát xa, giữ lưng tựa ở vị trí mặc định, phần đỡ bắp chân hơi nâng cao, chờ chế độ tự động để bắt đầu mát xa, nếu chế độ tự động không được chọn trong vòng 5 phút, ghế mát xa sẽ tự động tắt.

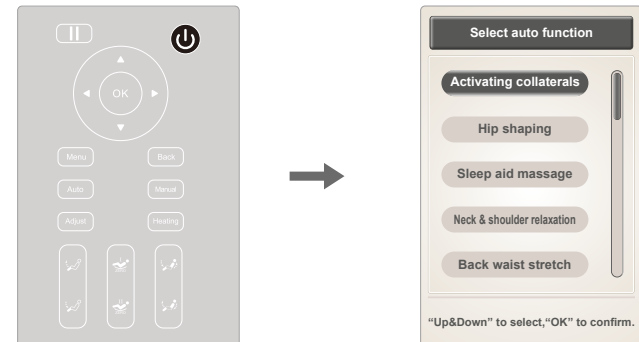


Phương pháp sử dụng



- Khi lựa chọn bất kỳ chế độ tự động nào, phần lưng tựa và vị trí bắp chân sẽ được điều chỉnh để tạo góc.
- Sau khi điều chỉnh góc, ghế mát xa sẽ tự động tiến hành xác định vị trí vai và định hình cơ thể (lưu ý: Shujing Active chỉ xác định vị trí vai, các chế độ khác có thể xác định vị trí vai và toàn cơ thể), chờ tới khi việc kiểm tra hoàn tất. Nếu bạn ấn nút “enter”, máy sẽ bỏ qua bước xác định vị trí vai và cơ thể, và trực tiếp bắt chế độ mặc định để bắt đầu mát xa.

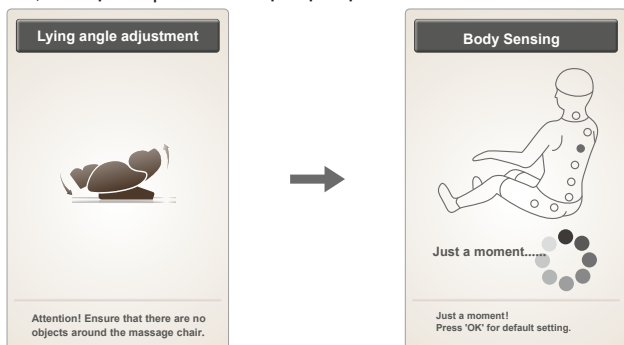


- Sau khi phát hiện vị trí vai, chương sẽ báo “drip”. Nếu có sự sai khác với vị trí vai thực tế, bạn có thể điều chỉnh tới vị trí thích hợp bằng cách ấn nút “lên” hoặc “xuống”. Vị trí vai được điều chỉnh trong 11 bước. Nếu vị trí vai không được điều chỉnh trong vòng 10 giây, tính năng mát xa sẽ tự động bắt đầu. Hoặc ấn nút “enter” để bắt đầu mát xa ngay. Hoặc nếu vị trí vai không được xác định, vị trí vai mặc định sẽ được mát xa.

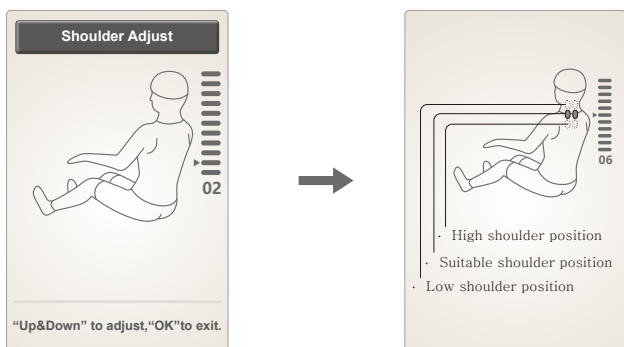

Nút	Mô tả
	Di chuyển bi mát xa lên trên tới vị trí thích hợp
	Di chuyển bi mát xa xuống dưới tới vị trí thích hợp




- Dưới giao diện hiện tại, bạn có thể sử dụng nút mũi tên để chọn “Điều chỉnh” hoặc “Vị trí vai”. Sau khi lựa chọn tính năng, ấn nút “enter” để tiến hành.

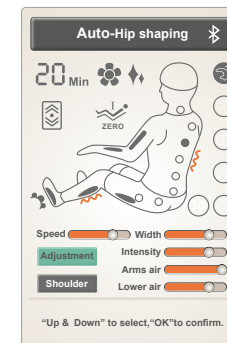

3). Nút tạm ngừng:


- Trong khi tính năng mát xa đang tiến hành, ấn nút “tạm dừng” để tạm dừng các tính năng mát xa, ấn nút “tạm dừng” một lần nữa để tiếp tục mát xa. Nếu thời gian tạm dừng quá 20 phút, tất cả tính năng mát xa sẽ tự động tắt.

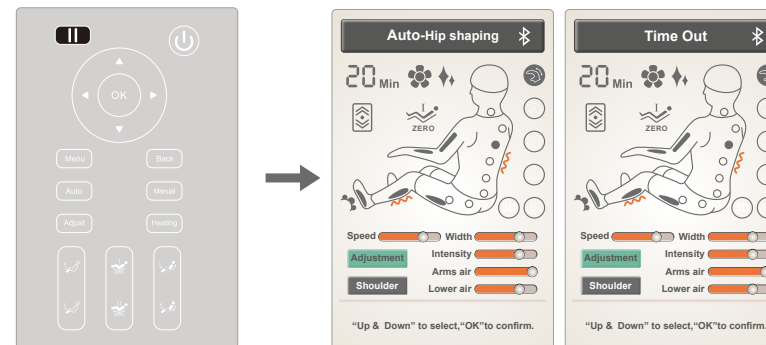

4). Nút danh mục

- Ấn nút “Danh mục” để hiển thị giao diện danh mục chính, bao gồm chương trình tự động, mát xa đặc biệt, chế độ thủ công, điều chỉnh, tùy chỉnh, cài đặt, thông tin thiết bị và các giao diện tính năng khác.
- Ấn “lên” hoặc “xuống” để lựa chọn tính năng mát xa. Ấn “Quay lại” để quay lại giao diện tình trạng các tính năng đang chạy.


Phương pháp sử dụng

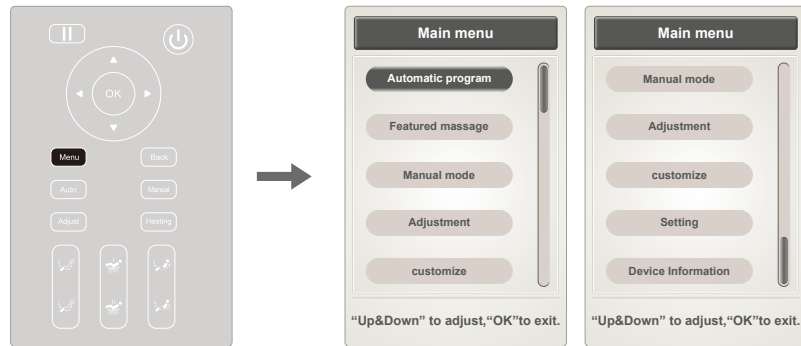

5). Tính năng tự động (nút tự động – có thể ấn trực tiếp nút “Tự động” để hiển thị giao diện tính năng tự động)

-Ấn nút “Danh mục” để hiển thị giao diện danh mục chính và lựa chọn biểu tượng tính năng tự động: trong chế độ tự động, có sáu chế độ mát xa tự động, bao gồm: Mát xa kiểu Trung Quốc (Shujing Active), Định hình mông, Mát xa Ngủ, Thư giãn Cổ và Vai, Kéo giãn lưng eo và Ngủ.

-Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn tính năng mát xa, ấn “Enter” để xác nhận tính năng đã lựa chọn. Ấn “Quay lại” để quay lại giao diện tình trạng các tính năng đang lựa chọn.

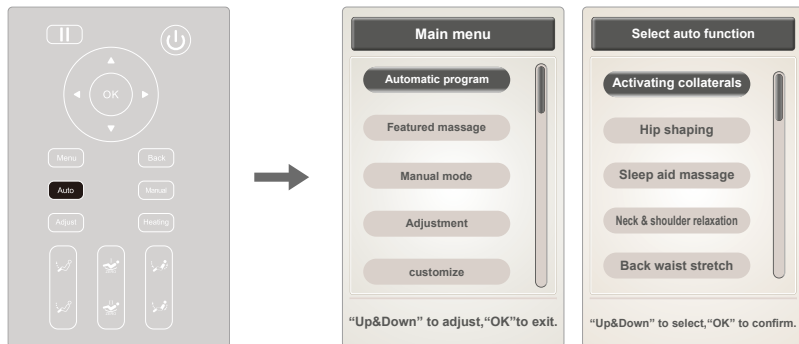

Lưu ý: tính năng tự động được chọn và hiển thị trên thanh trạng thái. Bạn có thể ấn nút “Quay lại” để xem các trạng thái đang hoạt động.


Phương pháp sử dụng



Chức năng	Mô tả
Tăng cường sự tuần hoàn	Chức năng tăng cường tuần hoàn chủ yếu được dùng để mát xa cổ, vai, lưng, hông,... bằng cách xoa bóp, ấn, ngồi và gõ nhẹ; kết hợp với hình thức lăn chân và dùng túi khí ép bắp chân, Cơ thể được mát xa hoàn toàn, đã thông kinh mạch toàn cơ thể, giảm căng thẳng, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao sức đề kháng, giảm mỏi và đau nhức cơ; giải tỏa căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Đồng thời, tích hợp âm thanh để nâng cao hiệu quả mát xa theo phương pháp mát xa kiểu Trung Quốc (Shujing Active)
Định hình hông	Tập trung mát xa mông, phần hông được lắc liên tục, các túi khí siết chặt với nhau. Hông được lắc lư và siết chặt để làm giãn cơ mông một cách hiệu quả, giảm tình trạng căng cơ, tăng cường lưu thông máu, làm săn chắc cơ. Dây dao động giúp tiêu thụ mỡ thừa, làm săn chắc cơ mông, định hình cơ thể với vẻ đẹp từ những đường cong hoàn hảo.
Liệu pháp massage ngủ	Với ánh sáng nhẹ và phương pháp nhẹ nhàng, mát xa sâu trên cơ thể có thể cải thiện hiệu quả chất lượng giấc ngủ, giúp cân bằng cơ thể, thả lỏng cơ thể và tâm trí, mang lại giấc ngủ âm ái.
Thư giãn cổ và vai	Tập trung vào cổ và vai, nâng cổ, xoa bóp, đấm vai và các phương pháp khác giúp mở rộng và thu hẹp cổ và vai, tăng cường lưu thông máu, giảm đau vai cổ.
Kéo giãn lưng eo	Tập trung mát xa phần lưng với phương pháp mát xa kiểu Nhật (shiatsu) giúp xoa bóp và kéo giãn cơ lưng, thúc đẩy lưu thông máu, giảm sự mệt mỏi và đau nhức của cơ thắt lưng.
Điều hòa hơi thở	Tính năng mát xa điều hòa hơi thở là sự kết hợp chính của xoa bóp, mát xa, nâng và ép bóng eo, mát xa phần cổ, vai, lưng và eo trên cơ thể, trong đó cổ và vai được xoa bóp, nâng, kéo giãn và các kỹ thuật mát xa khác, làm giảm triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc làm việc quá sức dẫn tới căng cơ, đau nhức, giảm chức năng vai cổ. Phần lưng eo chủ yếu được tác động điểm, miết và xoa bóp, giúp đã thông kinh mạch, lưu thông máu huyết và cải thiện chứng đau lưng, đồng thời làm giảm sự lo lắng, điều hòa tâm trạng, điều hòa hơi thở giúp ngủ nhanh, ngủ sâu giấc.

01). Chức năng tự động (chức năng mát xa)



- Ấn “Danh mục” để hiển thị giao diện danh mục chính, chọn biểu tượng chức năng mát xa đặc biệt: bao gồm liệu pháp tắm ánh sáng xanh, hương liệu, nghe nhạc SPA và 3 chế độ mát xa đặc biệt.
- Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn chức năng mát xa, ấn “Enter” để xác nhận chức năng mát xa đã lựa chọn. Ấn “Quay lại” để quay lại giao diện tình trạng các chức năng đang chạy.

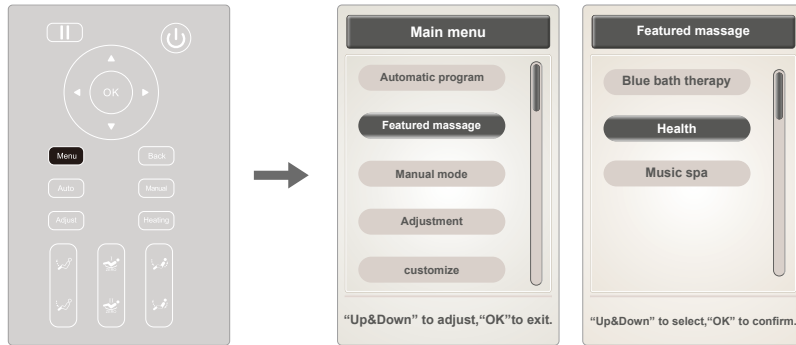

Chức năng	Mô tả
Liệu pháp tắm ánh sáng xanh	Sau khi tính năng “tắm ánh sáng xanh” được bật, ghế mát xa tự động ngả ra, cơ thể duy trì trạng thái không trọng lực, kết hợp với tính năng phát ánh sáng xanh từ trên nóc khoang với hiển thị bầu trời sao. Ánh sáng xanh có tác dụng làm chậm nhịp tim, điều chỉnh cân bằng, làm giảm căng thẳng. Sự điều chỉnh sáng tối thông qua các đèn LED hình sao giúp người dùng điều chỉnh hơi thở kết hợp với kỹ thuật xoa bóp mát xa nhẹ nhàng giúp thả lỏng cơ thể và tâm trí, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.
Hơi thở	Sau khi tính năng mát xa với hương liệu được bật, ghế mát xa tự động ngả ra, cơ thể trong tình trạng cân bằng và thư giãn, mát xa kết hợp với tác động bằng khí giúp mát xa cơ thể từ mọi hướng. Cùng với liệu pháp hương liệu độc đáo, hương thơm có thể khiến người dùng cân bằng cảm xúc, thư giãn, cải thiện giấc ngủ, thả lỏng cơ bắp, cân bằng cơ thể và tâm trạng.
Nghe nhạc SPA	Sau khi tính năng mát xa với hương liệu được bật, ghế mát xa tự động ngả ra, cơ thể trong tình trạng cân bằng và thư giãn, mát xa kết hợp với tác động bằng khí giúp mát xa cơ thể từ mọi hướng. Cùng với liệu pháp hương liệu độc đáo, hương thơm có thể khiến người dùng cân bằng cảm xúc, thư giãn, cải thiện giấc ngủ, thả lỏng cơ bắp, cân bằng cơ thể và tâm trạng.

6) Điều chỉnh thủ công (Nút “Điều chỉnh thủ công” - có thể ấn nút “Điều chỉnh thủ công” để hiển thị trực tiếp giao diện chế độ thủ công)

- Ấn “Danh mục” để hiển thị giao diện danh mục chính và lựa chọn biểu tượng chế độ thủ công: bao gồm kỹ thuật mát xa, phần mát xa, áp lực khí và các tính năng mát xa khác.
- Ấn nút “Trái” hoặc “Phải” để hiển thị danh mục phụ, sau đó ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn tính năng mát xa, ấn “Quay lại” để quay lại giao diện các tính năng đang chạy.

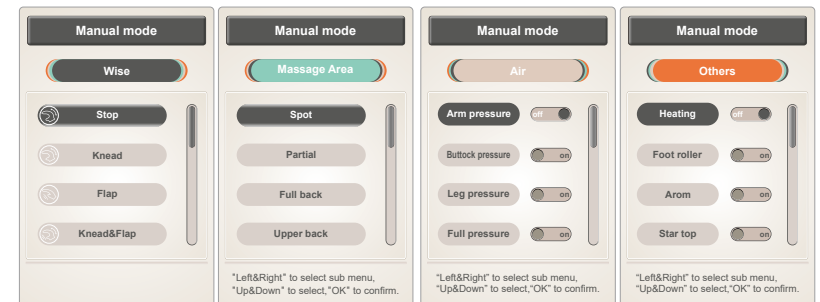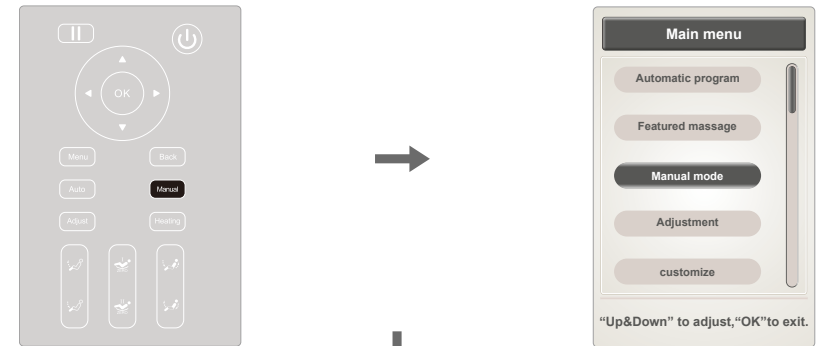


Phương pháp sử dụng

01) Chế độ thủ công (Nút Chế độ thủ công)

-Chế độ thủ công (các thao tác): bao gồm sáu kỹ thuật mát xa khác nhau như dừng, xoa bóp, gõ, xoa bóp, tác động điểm, 4D và nâng vai. Trong trạng thái gõ và áp lực điểm, khoảng rộng của bi mát xa có thể điều chỉnh được.

-Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn biểu tượng tính năng, ấn “Enter” để xác nhận phương pháp mát xa đã lựa chọn.

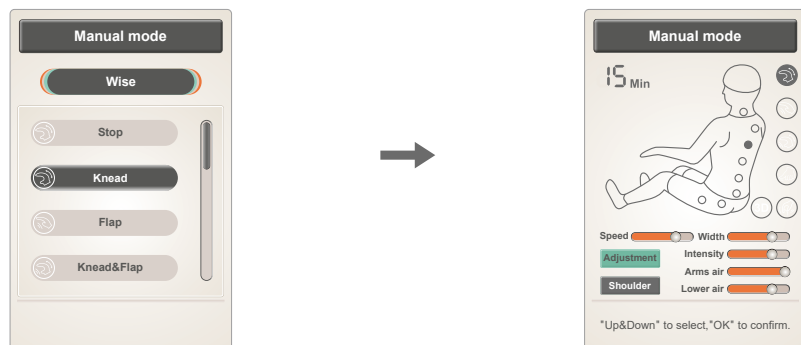

Lưu ý: Cường độ mát xa: mát xa 4D là hình thức robot sẽ hoàn toàn kéo về phía trước hoặc rút về phía sau. Cường độ mát xa được điều chỉnh tại từng điểm cụ thể, không phải cường độ tác động lên cả lưng. Với loại tự động điều chỉnh toàn cơ thể, khi cường độ mát xa tại từng điểm đc thử nghiệm, nếu bạn muốn điều chỉnh cường độ tại bất kỳ điểm nào, có thể ấn nút này. Cường độ mát xa có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào bằng cách tự động hoặc thủ công.

Tính năng	Mô tả	Hiện thị
4D mát xa	Chia thành 4 chế độ mát xa 4D với tốc độ và cường độ được điều chỉnh	
Xoa bóp	Tốc độ và cường độ được điều chỉnh	
Xoa bóp và vỗ	Tốc độ và cường độ được điều chỉnh	
Nâng vai	Tốc độ và cường độ được điều chỉnh	
Vỗ	Chia thành 2 chế độ vỗ, tốc độ và cường độ được điều chỉnh	
Mát xa kiểu Nhật	Chia thành 2 chế độ bấm huyệt, với tốc độ, khoảng rộng và cường độ được điều chỉnh	


Lưu ý: lựa chọn biểu tượng “Dừng” để dừng tất cả chức năng, lựa chọn biểu tượng các tính năng riêng rẽ để bật riêng từng kỹ thuật mát xa.

Phương pháp sử dụng

02) Chế độ thủ công (Nút Chế độ thủ công – mát xa từng vùng)

-Chế độ thủ công (mát xa vùng): mát xa vùng cụ thể hoặc toàn bộ lưng, lưng trên, lưng dưới và các chức năng mát xa khác .

-Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn biểu tượng vùng cần mát xa và ấn “enter” để xác nhận.

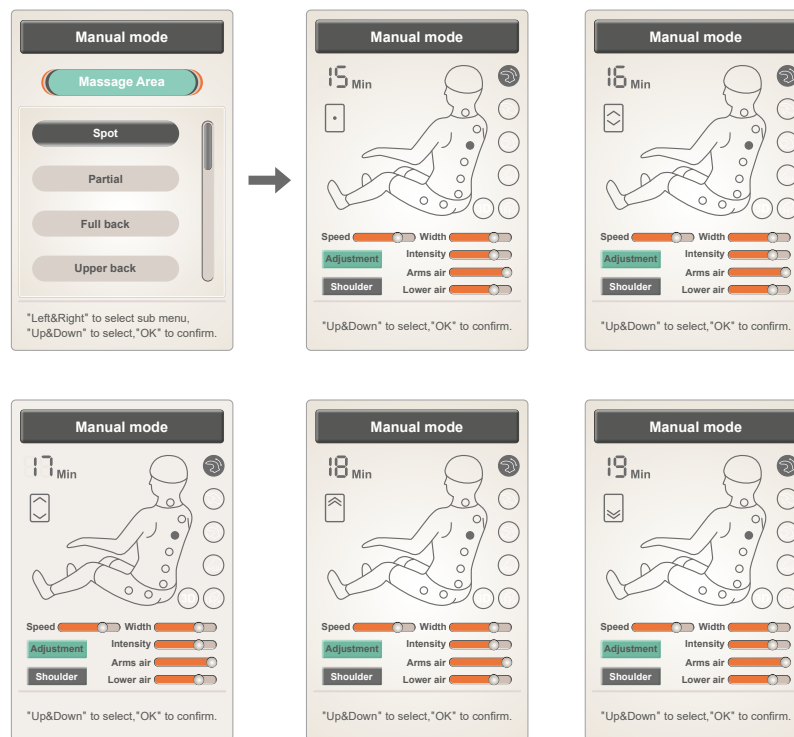

Chức năng	Mô tả	
Điểm	Mát xa tại điểm cụ thể	Khi lựa chọn chế độ mát xa tại một điểm hoặc từng vùng, vùng mát xa có thể điều chỉnh bằng nút “Lên” hoặc “Xuống”
Từng phần	Mát xa theo vòng tròn tại một vùng nhỏ	
Toàn bộ lưng	Mát xa lưng và phần trên lưng trên	
Lưng trên	Mát xa lưng và phần trên lưng dưới	
Lưng dưới	Mát xa lưng và phần trên	


Phương pháp sử dụng



03) Chế độ thủ công (Nút Chế độ thủ công – áp lực khí)

-Chế độ thủ công (áp lực khí): bao gồm mát xa bằng áp lực lên cánh tay, hông, cẳng chân và mát xa bằng áp lực toàn cơ thể.

Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn tính năng mát xa bằng áp lực, ấn “enter” để xác nhận.

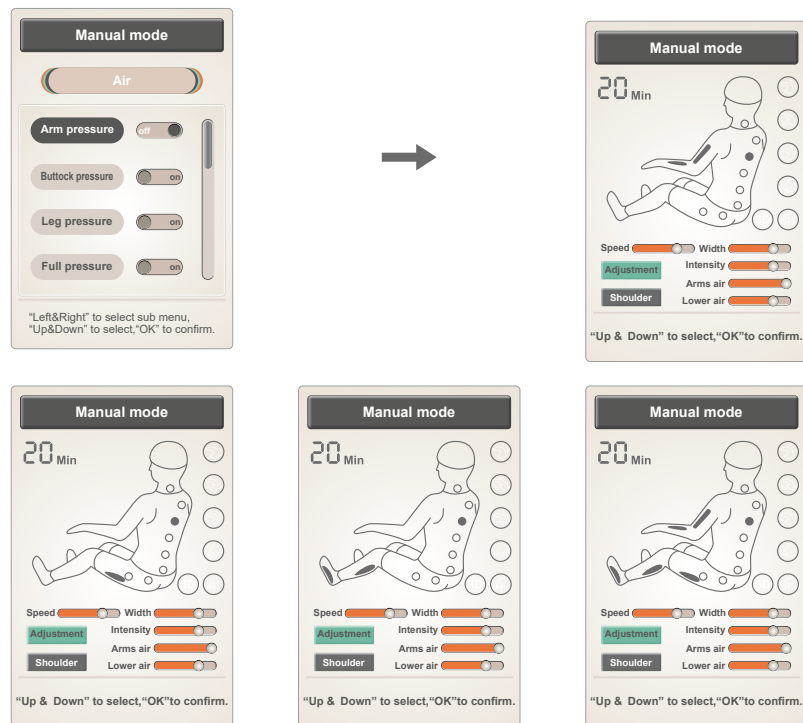

Tính năng	Mô tả
Mát xa cánh tay bằng áp lực	Bật / tắt tính năng mát xa cánh tay bằng áp lực
Mát xa hông bằng áp lực	Bật/ tắt tính năng mát xa hông bằng áp lực
Mát xa cẳng chân bằng áp lực	Bật/ tắt tính năng mát xa cẳng chân bằng áp lực
Mát xa toàn thân bằng áp lực	Bật/ tắt tính năng mát xa toàn thân bằng áp lực


Phương pháp sử dụng



04) Chế độ thủ công (Nút thủ công – khác)


-Chế độ thủ công (khác): bao gồm mát xa, lăn chân, trị liệu bằng tinh dầu, hiển thị nắp khoang thành trời sao và các tính năng khác.

Ấn nút “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn tính năng mát xa, ấn “enter” để bật/ tắt tính năng.

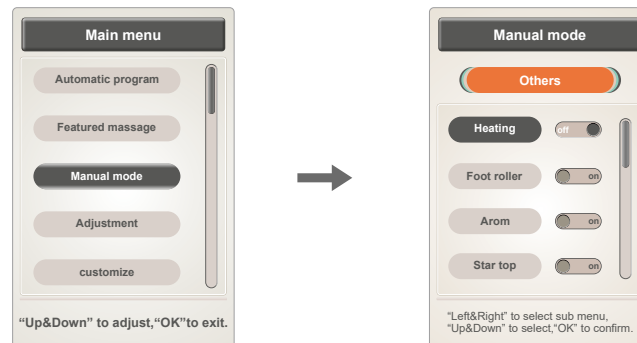


- Chế độ thủ công (khác – Làm nóng)

- Ấn nút “Xác nhận” để bật/ tắt chế độ tăng thân nhiệt ở lưng và chân cùng lúc, làm nóng bằng chức năng tia hồng ngoại từ xa sau 3 phút.

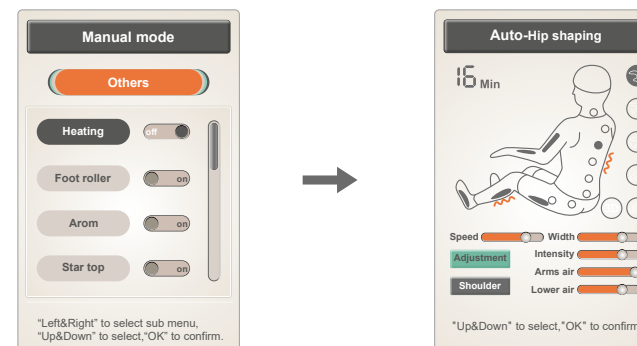


Lưu ý: Chức năng làm nóng có thể bật/ tắt trực tiếp bằng cách ấn nút “Heat button”


- **Chế độ thủ công (khác – lăn chân)**
- Ấn “enter” để bật/ tắt chế độ mát xa chân bằng con lăn.
- Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn tính năng mát xa khác, ấn “Quay lại” để quay lại giao diện các tính năng đang chạy.

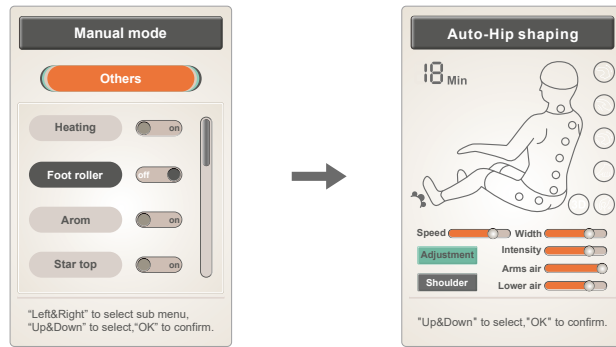

- **Chế độ thủ công (khác - mùi hương)**
- Ấn “Enter” để bật/ tắt tính năng mùi hương. Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn tính năng khác, ấn “Quay lại” để quay lại giao diện các tính năng đang chạy.

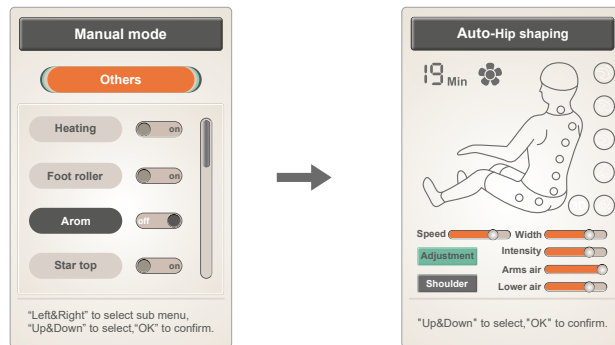



- **Chế độ thủ công (khác – hiển thị sao trên nắp khoang)**
- Ấn “xác nhận” để bật/ tắt chế độ hiển thị sao trên nắp khoang.
- Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn tính năng mát xa khác, ấn “Quay lại” để quay lại giao diện các tính năng đang chạy

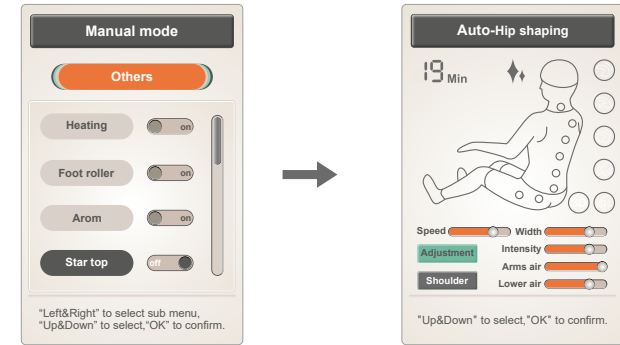

7) Tính năng điều chỉnh (nút Điều chỉnh – bạn có thể ấn trực tiếp vào nút “Điều chỉnh” để hiển thị giao diện điều chỉnh)


- Ấn “Danh mục” để hiển thị danh mục chính, lựa chọn biểu tượng tính năng điều chỉnh: bao gồm kỹ thuật mát xa, vùng mát xa, cường độ, khác (hiện tại có chế độ đặt giờ) và các tính năng điều chỉnh khác.
- Ấn nút “Trái” hoặc “Phải” để hiển thị danh mục phụ, lựa chọn tính năng mát xa trong danh mục, ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn, ấn “Enter” để xác nhận, ấn “Quay lại” để quay lại giao diện các tính năng đang chạy.

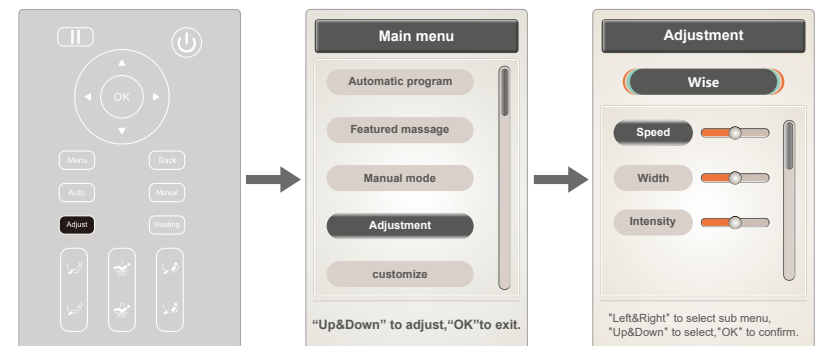

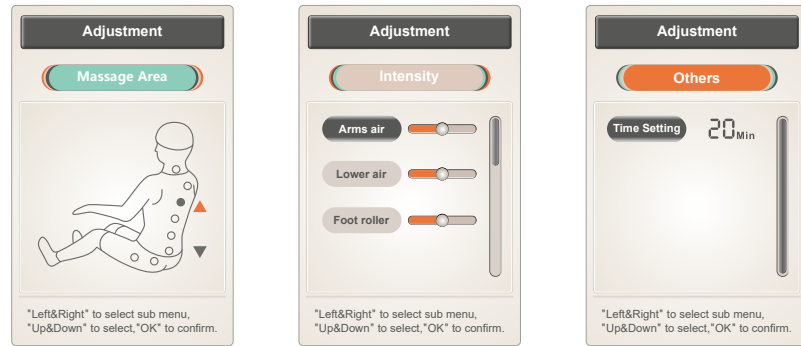

01) Chức năng điều chỉnh (nút Điều chỉnh – kỹ thuật)

- Tính năng điều chỉnh (phương pháp): Tính năng điều chỉnh kỹ thuật mát xa bao gồm: tốc độ, khoảng rộng, cường độ mát xa và các điều chỉnh mát xa khác
- Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn tốc độ, khoảng rộng và ấn “Enter” để điều chỉnh tốc độ, khoảng rộng và cường độ.

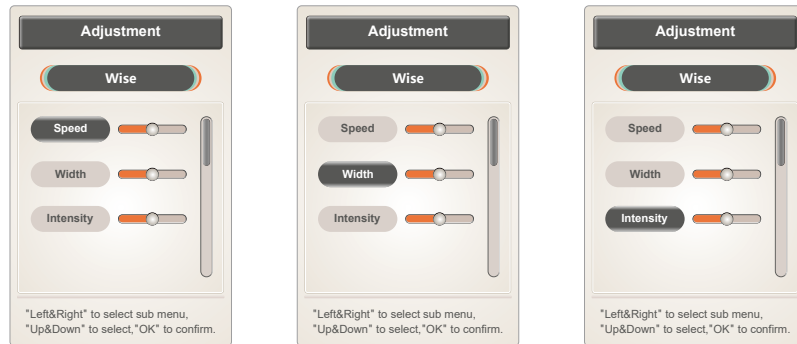


Lưu ý:

- Tốc độ có thể được điều chỉnh 5 mức độ.
- Khoảng rộng: có thể điều chỉnh ở 5 mức độ.

02) Chức năng điều chỉnh (nút Điều chỉnh – vùng mát xa)


- Điều chỉnh vùng mát xa: trong chế độ mát xa từng phần hoặc điểm cố định, ấn và giữ nút “Lên” để kéo robot mát xa tới điểm cần mát xa và dừng lại, ấn và giữ nút “Xuống” để kéo robot mát xa tới điểm cần mát xa và dừng lại.

Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để điều chỉnh vùng mát xa.

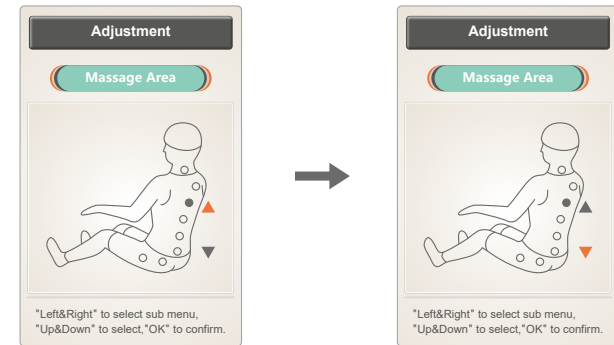


03).Chức năng điều chỉnh (nút Điều chỉnh – Cường độ)

- Điều chỉnh cường độ: bao gồm lực tác động lên cánh tay, thân dưới, lăn bàn chân với 3 tốc độ có thể điều chỉnh.
- Ấn “Lên” hoặc “Xuống” để lựa chọn cường độ và ấn “Enter” để điều chỉnh.

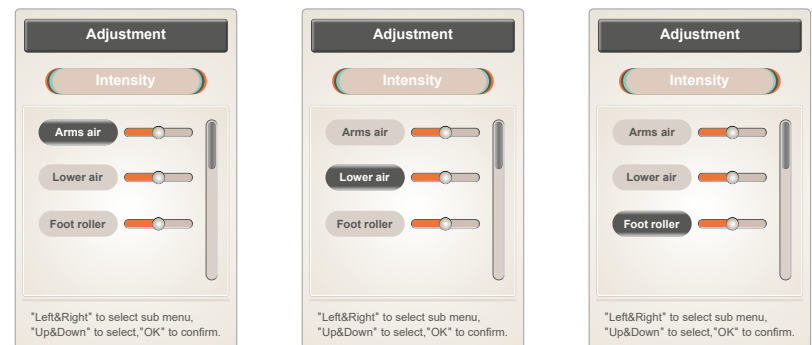

04). Chức năng điều chỉnh – điều chỉnh khác

- Các điều chỉnh khác: hiện có chế độ hẹn giờ. Mỗi lần ấn nút “Xác nhận”, thời gian hẹn giờ sẽ cộng thêm 5 phút. Thời gian hẹn giờ tối đa là 40 phút, nếu vượt quá sẽ bị giảm thành 40 phút.

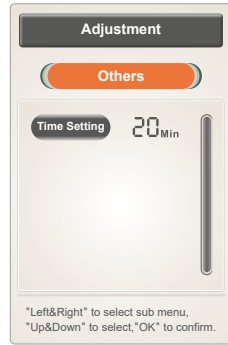

8) Tùy chỉnh

- Ấn “Danh mục” lựa chọn chức năng “Tùy chỉnh” ở dưới danh mục chính để hiển thị giao diện tùy chỉnh và lựa chọn Bộ nhớ tùy chỉnh I, II, III hoặc chức năng nhắc lại.





Chọn kho lưu trữ hoặc ứng dụng thông qua nút “Trái” hoặc “Phải” và ấn “confirm” để xác nhận.

- Lựa chọn Bộ nhớ tùy chỉnh I, II, III thông qua nút “Lên” hoặc “Xuống”.

- Bộ nhớ: lưu giữ tất cả tính năng hiện tại, áp lực, góc và các tính năng mát xa khác.

- Nhắc lại: nhắc lại các kỹ thuật, áp lực, góc và các tính năng mát xa khác đã được lưu trữ.


- Ấn “Quay lại” để quay lại giao diện các tính năng đang chạy.

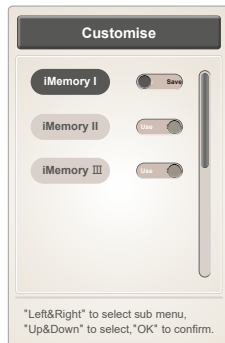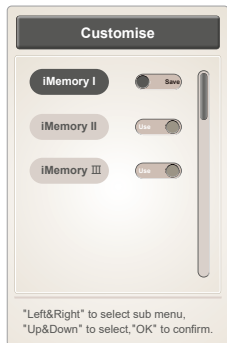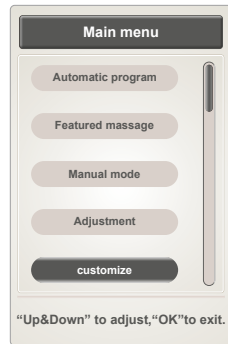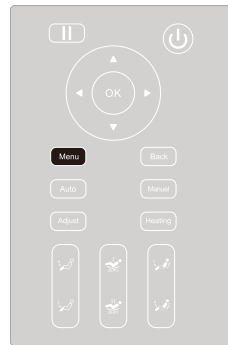

9) Cài đặt

- Ấn “Danh mục” để hiển thị giao diện danh mục chính, chọn biểu tượng “Cài đặt” để hiển thị giao diện cài đặt, bao gồm: ngôn ngữ, ánh sáng nền, khóa màn hình và các cài đặt giao diện khác.

- Ấn “trái” hoặc “phải” để hiển thị danh mục phụ. Ấn “lên” hoặc “xuống” để lựa chọn tính năng, ấn “Quay lại” để quay lại các tính năng đang chạy.

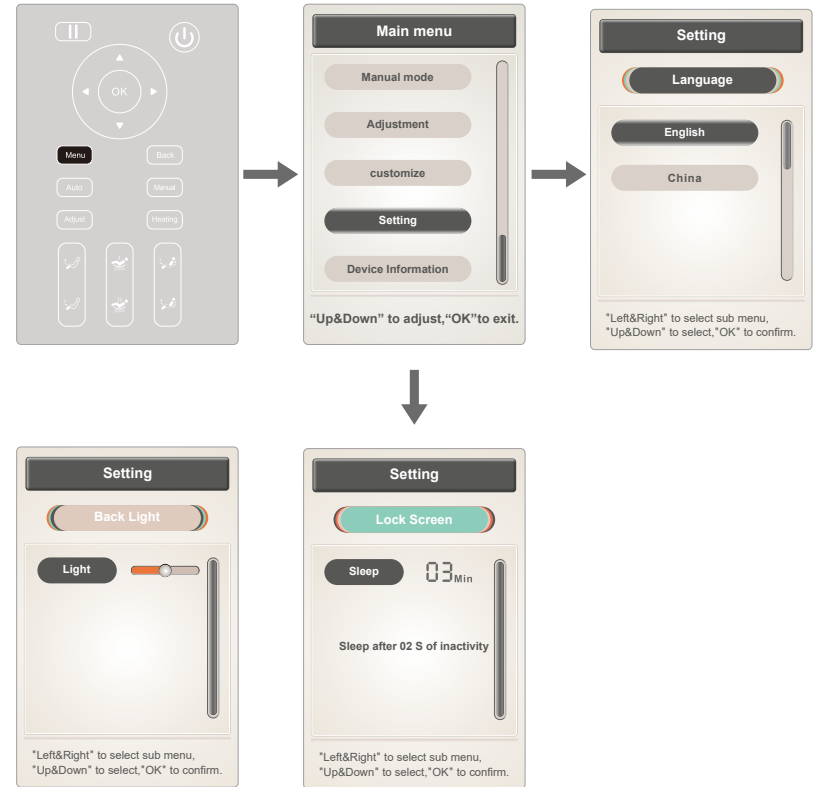


Phương pháp sử dụng

01). Cài đặt (ngôn ngữ)

- Cài đặt ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.

- Ấn “lên” hoặc “xuống” để lựa chọn ngôn ngữ và ấn “enter” để xác nhận.

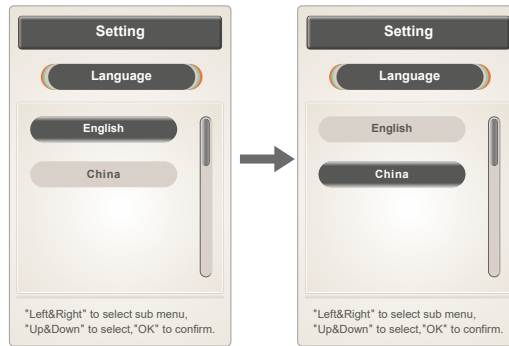


02) Cài đặt (khóa màn hình)

- Cài đặt khóa màn hình: thời gian khóa màn hình hoặc không khóa màn hình.


Ấn “xác nhận” để xác nhận thời gian khóa màn hình. Mỗi lần ấn “xác nhận”, thời gian khóa màn hình tăng lên thành 15 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút hoặc không khóa màn hình.

Ấn “xác nhận” để quay lại.

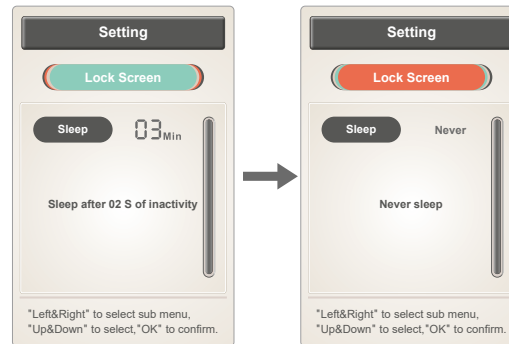

03) Cài đặt ánh sáng nền

- Cài đặt ánh sáng nền, độ sáng, ấn “enter” để điều chỉnh, có 5 mức độ sáng có thể điều chỉnh, ấn “quay lại” để quay lại màn hình các cài đặt đang chạy.

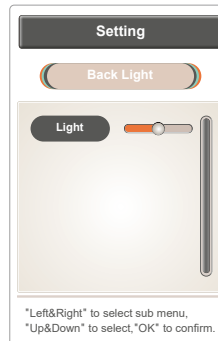


Phương pháp sử dụng

10). Thông tin thiết bị


- Ấn “Danh mục” để hiển thị giao diện danh mục chính và lựa chọn “Thông tin thiết bị” để hiển thị các thông tin hiện tại của thiết bị.

- Ấn “lên” hoặc “xuống” để lựa chọn và ấn “enter” để xác nhận, hoặc ấn “quay lại” để quay lại giao diện các tính năng đang chạy.

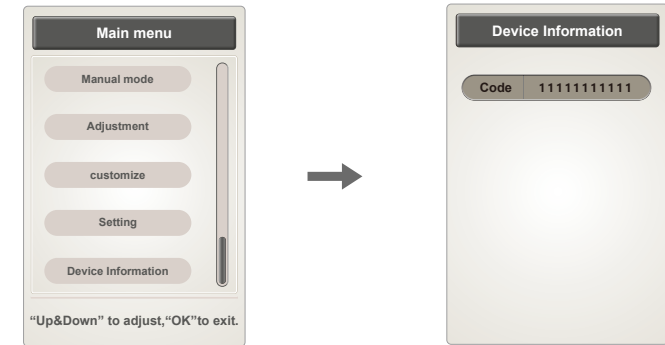

11). Nút không trọng lực


- Ấn nút “Không trọng lực I” hoặc “Không trọng lực II” để tự động điều chỉnh vị trí tám đỡ lưng và bắp chân. Có hai chế độ ngả không trọng lực khác nhau để tùy ý lựa chọn.

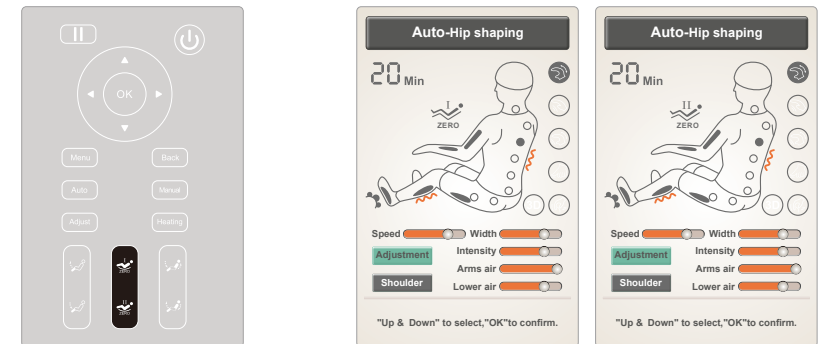

Nút	Mô tả
	Không trọng lực I: tự động điều chỉnh vị trí tám đỡ lưng và bắp chân vào vị trí không trọng lực I.
	Không trọng lực II: tự động điều chỉnh vị trí tám đỡ lưng và bắp chân vào vị trí không trọng lực II.


12). Nút sưởi ấm

-Ấn nút “Sưởi ấm” để bật/ tắt chức năng tăng thân nhiệt ở lưng và bắp chân cùng lúc. Sau khi bật chức năng “sưởi ấm”, giao diện sẽ hiển thị biểu tượng sưởi ấm, nhiệt được hình thành là nhiệt hồng ngoại xa, làm ấm cơ thể sau 3 phút.

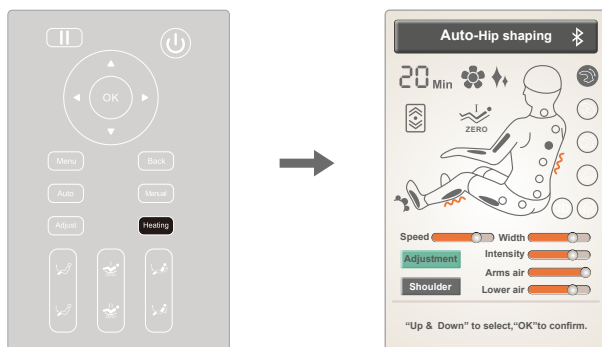

13). Nút “Quay lại”

-Khi điều chỉnh tính năng mát xa, nếu muốn quay lại giao diện chính, ấn nút “Quay lại” để quay lại giao diện thông tin đang chạy.

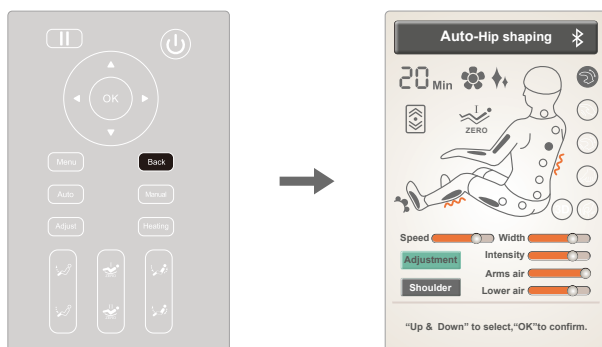

14). Nút điều chỉnh góc ngả của ghế

Nút	Mô tả
	Nút nâng bắp chân: ấn và giữ nút này để nâng từ từ bắp, thả ra để dừng lại, sau đó, thiết bị sẽ tự động tính toán chiều dài của bàn chân.
	Nút hạ bắp chân: ấn và giữ nút này để hạ từ từ bắp chân, thả ra để dừng lại, sau đó, thiết bị sẽ tự động tính toán chiều dài bàn chân.
	Nút nâng kết hợp: ấn và giữ nút này, lưng nâng lên từ từ trong khi bắp chân từ từ hạ xuống, thả ra để dừng lại, sau khi 2 hoạt động đồng thời trên dừng lại thiết bị sẽ tự động tính toán chiều dài bàn chân.
	Nút hạ kết hợp: ấn và giữ nút này để hạ lưng từ từ và nâng từ từ bắp chân, thả ra để dừng lại, sau khi 2 hoạt động đồng thời trên dừng lại, thiết bị sẽ tính toán chiều dài bàn chân.


15) Nút tắt trên tay vịn

Nút	Mô tả
	Nút nguồn: ấn nút này để bật/ tắt.
	Nút nâng kết hợp: xoay nút ngược chiều kim đồng hồ để nâng từ từ khung đỡ lưng và hạ từ từ khung đỡ bắp. Ngừng xoay khi đạt tư thế ưng ý, sau đó, thiết bị sẽ tự động tính toán chiều dài bàn chân.
	Nút hạ kết hợp: xoay nút này theo chiều kim đồng hồ để hạ từ từ khung đỡ lưng và nâng từ từ khung đỡ bắp. Ngừng xoay khi đạt tư thế ưng ý, sau đó, thiết bị sẽ tự động tính toán chiều dài bàn chân.
	Nút sưởi ấm: bật/ tắt chế độ sưởi ấm, chức năng sưởi ấm bằng tia hồng ngoại, làm ấm sau 3 phút.
	Nút hương liệu: bật/ tắt chức năng hương liệu.

	Nút hiện sao trên nắp khoang: bật/ tắt chế độ hiển thị sao trên nắp khoang.
	Nút không trọng lực: ấn để tự động điều chỉnh vị trí khung đỡ lưng và khung đỡ bắp để đạt vị trí không trọng lực, có hai chế độ nằm không trọng lực có thể hoán đổi cho nhau.
	Nút kéo dẫn bắp chân: ấn và giữ nút này để điều chỉnh thủ công tấm đỡ bàn chân từ từ kéo dẫn, thả ra để dừng lại.
	Nút ép bắp chân: ấn và giữ nút này để điều chỉnh thủ công tấm đỡ bàn chân từ từ ép lại, thả ra để dừng lại.
AUTO	Nút chế độ tự động: chuyển sang chức năng mát xa tự động.
	Nút áp lực khí: lựa chọn chế độ áp lực khí.
	Cổng USB: kết nối với thiết bị thông minh (như điện thoại thông minh).

3. Tắt nguồn, ngừng mát xa

- Trong quá trình mát xa, ấn vào nút nguồn để tắt ngay lập tức các chức năng mát xa, lưng ghế và tấm đỡ bàn chân được trả về vị trí cũ. Nếu mát xa đến hết thời gian, tất cả các tính năng mát xa được tắt ngay lập tức, lưng ghế và tấm đỡ bàn chân không trở về vị trí cũ.
- Cắt nguồn điện của cả máy (xem các bước tắt nguồn điện của máy như hình)

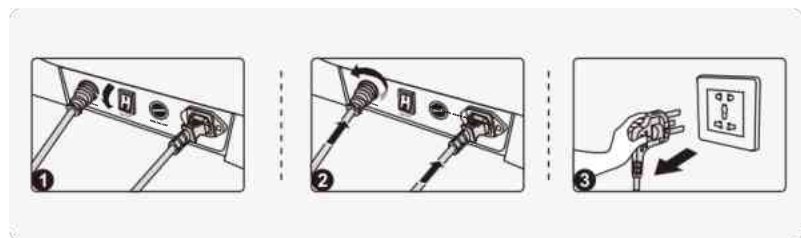

Nguyên lý tắt toàn bộ máy.
Rút tất cả dây điện của máy.
Rút dây nguồn.

4. Hỗ trợ vận hành ghế mát xa thông qua máy tính bảng, điện thoại Apple và Android

Giao diện ứng dụng



1. Vùng hiển thị thông tin tình trạng mát xa
2. Nút chức năng
3. Nút nguồn
4. Điều chỉnh kết hợp
5. Điều chỉnh khung đỡ bắp
6. Không trọng lực
7. Điều chỉnh cường độ
8. Nút bắt đầu/ Tạm dừng

1). Chuẩn bị trước khi sử dụng

01) Tải phần cài và tiến hành cài đặt

- Tải phần cài được cung cấp bởi đại lý cung cấp.
- Kết nối máy tính bảng đến máy tính bằng dây cáp, cài đặt phần cài trong máy tính bảng thông qua phần mềm (như iTunes với Apple, các phần mềm tương tự với Android). Sau khi cài đặt thành công, ứng dụng sẽ được hiển thị trên danh sách ứng dụng của máy.



2). Kết nối Bluetooth

- Bật nút nguồn trên ghế mát xa, tính năng Bluetooth tự động bật.
 Từ trang chủ trên máy tính bảng, mở danh sách ứng dụng và chọn “cài đặt” để mở màn hình cài đặt.
- Bật tính năng Bluetooth → lựa chọn “Cài đặt Bluetooth” → click để tìm thiết bị có biểu tượng “Bluetooth tên: IMCM-XXXX”, click vào để ghép đôi (mật khẩu ghép đôi là “0000”), sau khi ghép đôi thành công, click vào biểu tượng “IMCM-XXXX” để kết nối. Sau khi kết nối thành công, có thể dùng ứng dụng để điều khiển ghế mát xa.

3) Bluetooth module – các vấn đề bất thường và giải pháp:

- Sau khi ghép đôi thành công, nếu bạn không thể kết nối tới module Bluetooth của ghế mát xa, vui lòng thử hủy kết đôi → tắt nguồn ghế mát xa → bật nguồn lại → lặp lại việc kết nối Bluetooth theo phương pháp trên.
- Nếu Bluetooth hiển thị đã kết nối thành công nhưng không thể điều khiển ghế mát xa thông qua ứng dụng hoặc thanh tin nhắn hiển thị “Bluetooth không được kết nối”, bạn cần thoát khỏi ứng dụng hoặc tắt ghế mát xa. Sau khi ghế mát xa được khởi động lại, thiết lập lại việc ghép đôi và kết nối Bluetooth theo phương pháp trên.

4. Vận hành hệ thống máy tính bảng, bật nguồn toàn bộ máy:

- Sau khi xác nhận ghế mát xa đã tắt nguồn, cắm một đầu dây điện vào ghế mát xa, đặt ổ điện trên mặt phẳng chắc chắn. Sau đó bật công tắc nguồn của ghế mát xa.



6. Điều khiển các tính năng mát xa qua máy tính, máy tính bảng

1). Bắt đầu mát xa

- Từ trang chủ trên máy tính bảng, mở danh mục ứng dụng và click biểu tượng ứng dụng “” để hiển thị ứng dụng điều khiển ghế mát xa.
- Sau khi hiển thị ứng dụng, chọn giao diện bắt đầu, click “” để khởi động mát xa trong khi khung đỡ lưng giữ ở vị trí mặc định và khung đỡ bắp nâng nhẹ. Lựa chọn chế độ tự động, nếu chế độ tự động không được chọn trong vòng 5 phút, ghế mát xa sẽ tự động tắt máy.
 Lưu ý: Shujing Active chỉ xác định chiều cao vị trí vai, các chế độ tự động khác tự động xác định chiều cao vai và định hình toàn cơ thể.



Giao diện ban đầu



Vui lòng lựa chọn chế độ tự động

- Khi bạn lựa chọn bất kỳ chế độ tự động nào, khung đỡ lưng và khung đỡ bắp sẽ tự động điều chỉnh vị trí để điều chỉnh góc đã cài đặt.
- Sau khi điều chỉnh góc, ghế mát xa sẽ tự động tiến hành xác định chiều cao vai và hình dáng cơ thể (Lưu ý: Shujing Active chỉ xác định chiều cao vai, các chế độ khác xác định chiều cao vai và toàn bộ cơ thể). Nếu bạn ấn nút “”, bỏ qua bước xác định chiều cao vai và cơ thể, trực tiếp bật thông số mặc định để bắt đầu mát xa.



Giao diện hiển thị điều chỉnh góc ngã



Giao diện xác định vị trí vai và áp lực điểm

Phương pháp sử dụng

01). Điều chỉnh vị trí vai

- Tự động tiến hành việc xác định vị trí vai và điểm tác động lực mát xa, chờ cho tới khi việc xác định hoàn thành.
- Sau khi việc xác định hoàn thành, hiển thị giao diện điều chỉnh vị trí vai và chuông báo "DiDi". Nếu khác với vị trí vai thực tế, bạn có thể điều chỉnh vị trí thích hợp bằng cách ấn "lên" hoặc "xuống". Vị trí vai có thể điều chỉnh trong 11 bước. Nếu không điều chỉnh vị trí trong vòng 10 giây, tính năng mát xa sẽ tự động bắt đầu. Nếu vị trí vai không được xác định, vị trí vai mặc định sẽ được tiến hành mát xa.



Nút điều chỉnh vị trí vai	Mô tả tính năng
	Điều chỉnh vị trí lên trên
	Điều chỉnh vị trí xuống dưới

02). Chạy và tạm dừng tính năng mát xa

- Dưới giao diện hiển thị thông tin mát xa, khi chức năng mát xa đang chạy, ấn nút "Chạy/ Tạm dừng" để tạm dừng tất cả các chức năng mát xa, khi máy đang tạm dừng, ấn nút "Chạy/ Tạm dừng" để tiếp tục chạy. Nếu thời gian tạm dừng vượt quá 20 phút, tất cả tính năng mát xa sẽ tự động tắt.




Phương pháp sử dụng

Nút	Mô tả tính năng
	Trong trạng thái hoạt động, ấn nút này để tạm dừng tất cả tính năng.
	Trong trạng thái tạm dừng, ấn nút này để tiếp tục các tính năng đang chạy trước khi tạm dừng.

03). Cường độ mát xa phần thân trên

- Trong giao diện mát xa đang chạy, nhấn vào biểu tượng điều chỉnh cường độ. Cường độ mát xa của robot được chia thành 5 mức độ.

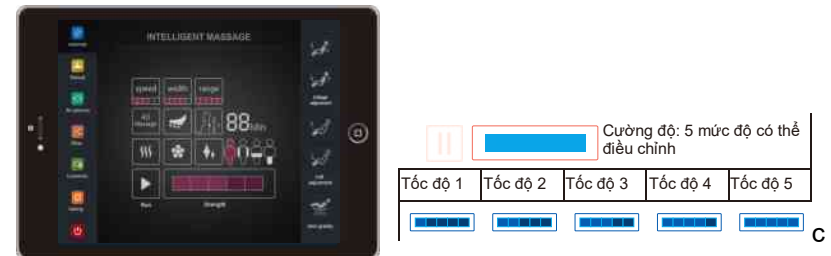

04). Mát xa tự động

- Ấn nút " " để hiển thị giao diện tính năng mát xa tự động, và nhấn vào biểu tượng tính năng tự động để lựa chọn chế độ mát xa tự động. tốc độ và khoảng rộng mát xa không được điều chỉnh khi lựa chọn chế độ tự động.



Chức năng	Mô tả
Tăng cường sự tuần hoàn	Chức năng tăng cường tuần hoàn chủ yếu được dùng để mát xa cổ, vai, lưng, hông,... bằng cách xoa bóp, ấn, ngồi và gõ nhẹ; kết hợp với hình thức lăn chân và dùng túi khí ép bắp chân, Cơ thể được mát xa hoàn toàn, đã thông kinh mạch toàn cơ thể, giảm căng thẳng, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao sức đề kháng, giảm mỏi và đau nhức cơ; giải tỏa căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Đồng thời, tích hợp âm thanh để nâng cao hiệu quả mát xa theo phương pháp mát xa kiểu Trung Quốc (Shujing Active)
Định hình hông	Tập trung mát xa mông, phần hông được lắc liên tục, các túi khí siết chặt với nhau. Hông được lắc lư và siết chặt để làm giãn cơ mông một cách hiệu quả, giảm tình trạng căng cơ, tăng cường lưu thông máu, làm săn chắc cơ. Dây dao động giúp tiêu thụ mỡ thừa, làm săn chắc cơ mông, định hình cơ thể với vẻ đẹp từ những đường cong hoàn hảo.
Liệu pháp massage ngủ	Với ánh sáng nhẹ và phương pháp nhẹ nhàng, mát xa sâu trên cơ thể có thể cải thiện hiệu quả chất lượng giấc ngủ, giúp cân bằng cơ thể, thả lỏng cơ thể và tâm trí, mang lại giấc ngủ êm ái.
Thư giãn cổ và vai	Tập trung vào cổ và vai, nâng cổ, xoa bóp, đấm vai và các phương pháp khác giúp mở rộng và thu hẹp cổ và vai, tăng cường lưu thông máu, giảm đau vai cổ.
Kéo dẫn lưng eo	Tập trung mát xa phần lưng với phương pháp mát xa kiểu Nhật giúp xoa bóp và kéo dẫn cơ lưng, thúc đẩy lưu thông máu, giảm sự mệt mỏi và đau nhức của cơ thắt lưng.
Điều hòa hơi thở	Tính năng mát xa điều hòa hơi thở là sự kết hợp chính của xoa bóp, mát xa, nâng và ép bóng eo, mát xa phần cổ, vai, lưng và eo trên cơ thể, trong đó cổ và vai được xoa bóp, nâng, kéo dẫn và các kỹ thuật mát xa khác, làm giảm triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc làm việc quá sức dẫn tới căng cơ, đau nhức, giảm chức năng vai cổ. Phần lưng eo chủ yếu được tác động điểm, miết và xoa bóp, giúp đã thông kinh mạch, lưu thông máu huyết và cải thiện chứng đau lưng, đồng thời làm giảm sự lo lắng, điều hòa tâm trạng, điều hòa hơi thở giúp ngủ nhanh, ngủ sâu giấc.

Liệu pháp tắm ánh sáng xanh	Sau khi tính năng “tắm ánh sáng xanh” được bật, ghế mát xa tự động ngả ra, cơ thể duy trì trạng thái không trọng lực, kết hợp với tính năng phát ánh sáng xanh từ trên nóc khoang với hiển thị bầu trời sao. Ánh sáng xanh có tác dụng làm chậm nhịp tim, điều chỉnh cân bằng, làm giảm căng thẳng. Sự điều chỉnh sáng tối thông qua các đèn LED hình sao giúp người dùng điều chỉnh hơi thở, thả lỏng cơ thể.
Hơi thở	Sau khi tính năng mát xa với hương liệu được bật, ghế mát xa tự động ngả ra, cơ thể trong trạng thái cân bằng và thư giãn, mát xa kết hợp với tác động bằng khí giúp mát xa cơ thể từ mọi hướng. Cùng với liệu pháp hương liệu độc đáo, hương thơm có thể khiến người dùng cân bằng cảm xúc, thư giãn, cải thiện giấc ngủ, thả lỏng cơ bắp, cân bằng cơ thể và tâm trạng
Nghe nhạc SPA	Sau khi chức năng mát xa âm nhạc SPA được bật, người dùng có thể kết nối âm nhạc qua Bluetooth, kết hợp các kỹ thuật massage và chức năng bóp túi khí với âm nhạc để tận hưởng sự thư giãn tốt nhất.

2).Điều chỉnh mát xa thủ công

- Ấn nút “” để hiển thị giao diện điều chỉnh mát xa thủ công, lựa chọn kỹ thuật mát xa, mát xa lưng, tốc độ và khoảng rộng mát xa.

01) .Điều chỉnh mát xa thủ công – kỹ thuật, tốc độ, khoảng rộng

- Trong giao diện lựa chọn mát xa thủ công, ấn “” để hiển thị giao diện lựa chọn thủ công, bao gồm sáu kỹ thuật mát xa khác nhau như: xoa bóp, gõ, xoa bóp, tác động điểm, 4D, nâng vai. Trong trạng thái gõ và tác động điểm, khoảng rộng của bi mát xa có thể điều chỉnh.



Tốc độ Tốc độ: : 5 tốc độ có thể điều chỉnh

Tốc độ 1	Tốc độ 2	Tốc độ 3	Tốc độ 4	Tốc độ 5

Khoảng rộng 5 khoảng rộng có thể điều chỉnh

Tốc độ 1	Tốc độ 2	Tốc độ 3	Tốc độ 4	Tốc độ 5

Lưu ý: Cường độ mát xa: mát xa 4D là hình thức robot sẽ hoàn toàn kéo về phía trước hoặc rút về phía sau. Cường độ massage được điều chỉnh tại từng điểm cụ thể, không phải cường độ tác động lên cả lưng. Với loại tự động điều chỉnh toàn cơ thể, khi cường độ massage tại từng điểm đc thử nghiệm, nếu bạn muốn điều chỉnh cường độ tại bất kỳ điểm nào, có thể ấn nút này. Cường độ massage có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào bằng cách tự động hoặc thủ công.

Tính năng	Mô tả
4D mát xa	Chia thành 4 chế độ mát xa 4D với tốc độ và cường độ được điều chỉnh
Xoa bóp	Tốc độ và cường độ được điều chỉnh
Xoa bóp và gõ	Tốc độ và cường độ được điều chỉnh
Nâng vai	Tốc độ và cường độ được điều chỉnh
Gõ	Chia thành 2 chế độ gõ, tốc độ và cường độ được điều chỉnh
Mát xa kiểu Nhật	Chia thành 2 chế độ bấm huyệt, với tốc độ, khoảng rộng và cường độ được điều chỉnh

02).Điều chỉnh thủ công – kéo dẫn lưng

-Trong giao diện lựa chọn tính năng thủ công, ấn vào “” để hiển thị giao diện lựa chọn chế độ kéo dẫn lưng, và nhấn vào biểu tượng chế độ kéo dẫn để lựa chọn tính năng mát xa tùy chỉnh.



Lưu ý:
Trong trạng thái nâng vai, không lựa chọn được chế độ kéo dẫn lưng.

Chức năng	Mô tả
Toàn bộ lưng	Mát xa lên/xuống toàn bộ lưng
Lưng trên	Mát xa lên/xuống phần lưng trên
Lưng dưới	Mát xa lên/xuống phần lưng dưới
Từng vùng	Mát xa từ trước ra sau từng vùng lưng
Điểm cố định	Mát xa điểm cố định trên lưng

3). Mát xa bằng áp lực khí

-Ấn vào “” để hiển thị giao diện lựa chọn tính năng mát xa bằng áp lực khí và ấn vào biểu tượng tính năng massage bằng áp lực khí để lựa chọn tính năng này. Các tính năng mát xa bằng khí nên bao gồm: mát xa bàn chân, cánh tay, toàn bộ hông và chân

01). Mát xa cánh tay bằng áp lực khí



Cường độ Cường độ: 3 cấp độ có thể điều chỉnh

Tốc độ 1	Tốc độ 2	Tốc độ 3

Điều chỉnh cường độ với 3 mức khi bật tính năng mát xa cánh tay bằng áp lực khí.

Tính năng	Mô tả
	Ấn nút này để bật/ tắt tính năng mát xa cánh tay bằng áp lực khí

02). Mát xa bằng áp lực khí - mát xa toàn bộ, hông, chân



Cường độ Cường độ: có 3 mức có thể điều chỉnh

Tốc độ 1	Tốc độ 2	Tốc độ 3

Điều chỉnh cường độ với 3 mức khi bật tính năng mát xa toàn bộ, hông và chân bằng áp lực khí.

Tính năng	Mô tả
Toàn bộ	Ấn nút này để bật/ tắt tính năng mát xa toàn thân
Hông	Ấn nút này để bật/ tắt tính năng mát xa hông
Chân	Ấn nút này để bật/ tắt tính năng mát xa chân

4). Chức năng mát xa khác

01).Chức năng mát xa khác – Chức năng sưởi ấm

- Ấn nút “” để hiển thị giao diện lựa chọn chức năng mát xa khác .
- Ấn “” để bật/ tắt chức năng sưởi ấm chân và lưng cùng lúc. Nhiệt được tạo ra là nhiệt hồng ngoại



Nút	Mô tả
	Nhấn nút này để bật/ tắt tính năng sưởi ấm lưng và chân, nhiệt tạo ra là nhiệt hồng ngoại, làm ấm sau 3 phút.

02).Chức năng mát xa khác – chức năng tạo hương

- Ấn nút “” để hiển thị giao diện lựa chọn chức năng mát xa khác.
- Ấn “” để bật/ tắt chức năng tạo hương



Nút	Mô tả
	Ấn nút này để bật/ tắt tính năng tạo hương

03).Tính năng mát xa khác – Hiển thị sao

- Ấn vào “” để hiển thị giao diện lựa chọn chức năng mát xa khác.
- Ấn vào “” để bật/ tắt chế độ hiển thị sao.



Nút	Mô tả
	Ấn nút này để bật/ tắt chế độ hiển thị sao

04).Chức năng mát xa khác – lăn chân

- Ấn vào “” để hiển thị giao diện lựa chọn tính năng khác
- Ấn “” để bật/ tắt tính năng mát xa lăn chân. Khi tính năng lăn chân được bật, ấn vào “Tốc độ lăn chân” để điều chỉnh với 3 mức khác nhau.



Tốc độ Có 3 mức tốc độ để điều chỉnh

Tốc độ 1	Tốc độ 2	Tốc độ 3

Nút	Chức năng
	Ấn nút này để bật/ tắt chế độ lăn chân

Phương pháp sử dụng

05). Chức năng mát xa khác – tính năng lưu trữ thông minh

- Ấn vào “” để hiển thị giao diện lựa chọn tính năng khác và vào giao diện tùy chọn, bao gồm: ứng dụng lưu trữ tùy chỉnh I, II, III và tính năng lưu trữ.
- Lưu trữ: lưu trữ tất cả các bài tập, áp lực khí, góc và các tính năng
- mát xa khác.
- Nhắc lại: nhắc lại các kỹ thuật đã lưu trữ, áp lực khí, góc và các tính năng mát xa khác trong lần sử dụng trước.



6). Cài đặt – Cài đặt ngôn ngữ:

- Ấn nút “” để vào giao diện cài đặt, ấn vào “” để hiển thị danh sách ngôn ngữ và lựa chọn ngôn ngữ. Hệ thống hiện gồm 2 ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Trung giản thể.



7). Điều chỉnh vị trí lưng và chân

Nút	Mô tả
	Nút nâng chân: Ấn và giữ nút này để nâng chân từ từ, thả ra để dừng lại, sau đó, máy sẽ tự động xác định chiều dài bàn chân.
	Nút hạ chân: Ấn và giữ nút này để hạ chân từ từ, thả ra để dừng lại, sau đó, máy sẽ tự động xác định chiều dài bàn chân.

Phương pháp sử dụng


	Nút nâng kết hợp: Ấn và giữ nút này, lưng nâng lên từ từ trong khi bắp chân từ từ hạ xuống, thả ra để dừng lại, sau khi 2 hoạt động đồng thời trên dừng lại thiết bị sẽ tự động tính toán chiều dài bàn chân.
	Nút hạ kết hợp: Ấn và giữ nút này để hạ lưng từ từ và nâng từ từ bắp chân, thả ra để dừng lại, sau khi 2 hoạt động đồng thời trên dừng lại, thiết bị sẽ tính toán chiều dài bàn chân.
	Nút không trọng lực: Ấn nút này để tự động điều chỉnh vị trí lưng và chân về tư thế không trọng lực. Hai chế độ không trọng lực hoán đổi nhau.

8). Nghe nhạc không dây

- Với các thiết bị nguồn có kết nối Bluetooth (như điện thoại, máy tính bảng,...) có thể kết nối Bluetooth tới module của ghế massage, các đoạn nhạc được chạy trên thiết bị nguồn có thể chuyển không dây tới hệ thống âm thanh của ghế massage.

7. Tắt nguồn, kết thúc mát xa

- Khi tính năng mát xa đang bật, ấn vào nút mát xa trên giao diện hiển thị thông tin mát xa để tắt tất cả các tính năng mát xa ngay lập tức
- Cắt nguồn điện của cả máy theo hướng dẫn sau.

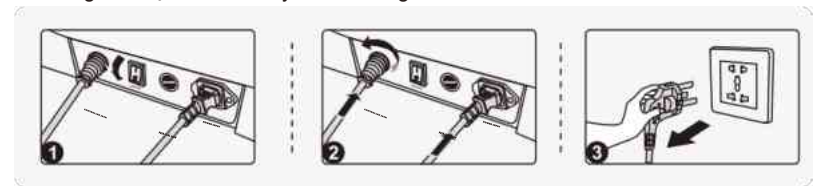

Tắt công tắc của cả máy.

Rút dây cắm

Rút dây nguồn.




Lưu ý


Tắt công tắc của ghế massage, sau đó rút dây điện khỏi ổ điện.

8. Hướng dẫn lắp đặt tay vịn

- Tìm phích cắm kết nối với tay vịn ở dưới khung và luồn qua khung thép tay vịn (hình 1).
- Sau khi cắm các phích cắm luồn qua giữa khung thép tương ứng với từng cặp dây cắm (hình 2).

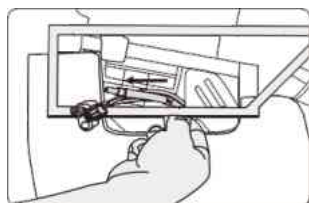


Hình 1

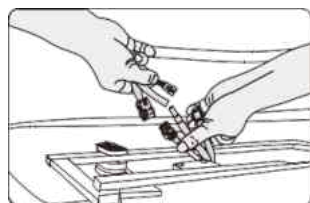


Hình 2

- Giắc nối được luồn qua đáy khung được nối chắc chắn tới giắc ở tay vịn và ống khí nối cũng cần được đặt vào đúng vị trí (hình 3).
- Sau khi các đầu giắc đã được nối, đẩy nhẹ phần trên khung vào dưới cùng khung thép tay vịn, cẩn thận để tránh vỡ ống (hình 4).

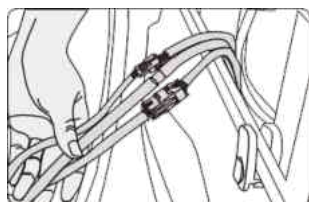


Hình 3

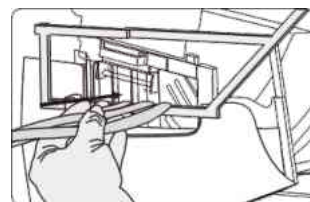


Hình 4

- Như hình vẽ thể hiện, có 3 móc ở tay vịn được móc vào ống thép của khung thép (hình 5).
- Giữ phần trước và sau tay vịn bằng cả hai tay. Móc mặt trước của tay vịn vào mặt trước của khung thép (kiểm tra xem dây cáp nối đã được đặt vào phần dưới của khung tay vịn để tránh bị kẹt), sau đó, móc mặt sau của tay vịn vào khung thép (hình 6).

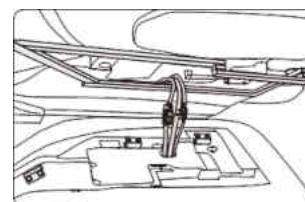

Hình 5

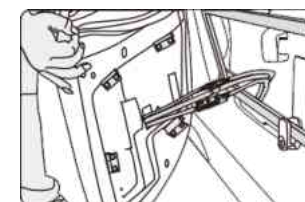

Hình 6


- Sau khi tay vịn được cố định vào khung thép, đồng thời ấn mặt sau và mặt trước của tay vịn để 3 móc của tay vịn cố định vào khung thép và lắc nhẹ để kiểm tra các móc đã cố định chưa. (hình 7).
- Xác định vị trí các lỗ ở mặt trước của khung thép như trong hình. Vặn ốc vít lục giác vào lỗ (hình 8).
- Xác định vị trí lỗ mặt sau của khung thép như trong hình. Vặn ốc vít lục giác vào cánh tay trong của cờ lê lục giác và giữ cố định. Các bước lắp đặt tiếp theo tương tự như trên (hình 9)



Hình 7




Hình 8

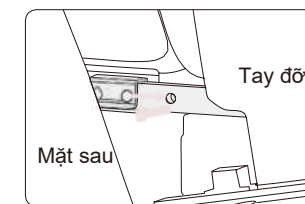


Hình 9

9. Hướng dẫn lắp đặt phần đỡ bắp chân


1. Cắt dây nối và buộc ống khí cố định ở mặt niêm phong trước.
2. Nối dây, ống khí và khớp chân trong lỗ ở mặt trước, kiểm tra xem có cắm đúng vị trí không. Sau đó đặt dây cáp và ống khí vào lỗ niêm phong ở mặt trước, chèn xuống dưới khung, chú ý tránh tắc ống khí.

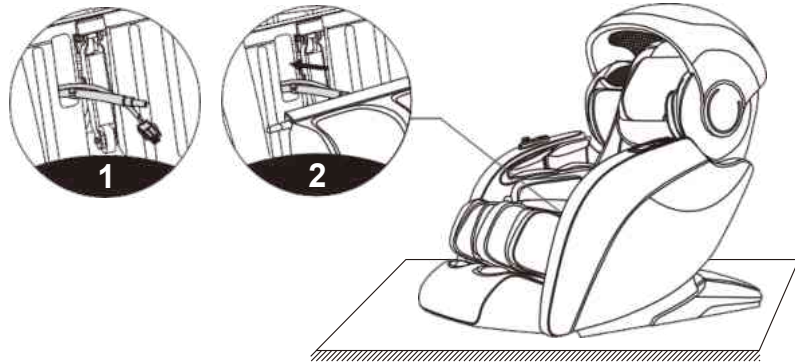


3. Lắp trục quay trong và trục quay ngoài vào bên trái và bên phải phần đỡ bắp chân (lưu ý: đầu rộng hơn hướng vào trong).
4. Mở nắp bản lề hỗ trợ ở bên phải và bên trái ghế massage.

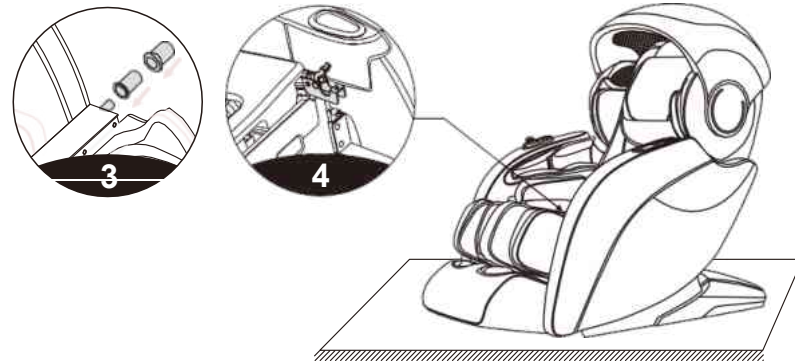

5. Sau đó, treo phần đỡ bắp chân (trục trái và phải) vào khung bản lề đỡ (hình 5)
6. Đẩy nắp trục xoay, ấn phần đỡ bắp chân để xoay trục ngoài, sau đó sử dụng cờ lê lục giác số 4 để vặn chặt 2 ốc vít lục giác mạ kẽm đen bảo vệ môi trường M5x14-12.9 và 1 tấm phẳng mạ kẽm đen bảo vệ môi trường kích thước 6x12x1.5 để khóa nắp xoay, hoàn thành việc lắp đặt phần đỡ bắp chân (hình 6).

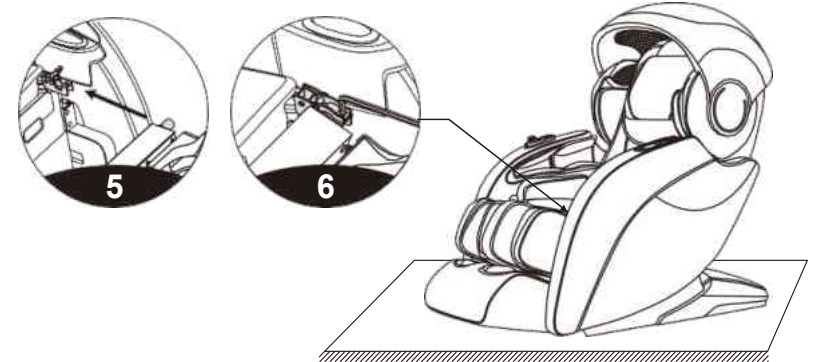


7. Sau khi lắp chặt ốc vít, gắn khe phía sau của tấm đỡ bắp chân vào trục xoay, ấn phần đầu trước của phần đỡ bắp chân xuống, đồng thời ấn trục xoay xuống song song. Sau đó, dùng vít M4 để khóa trục xoay tấm đỡ bắp chân và hoàn thành việc lắp đặt.

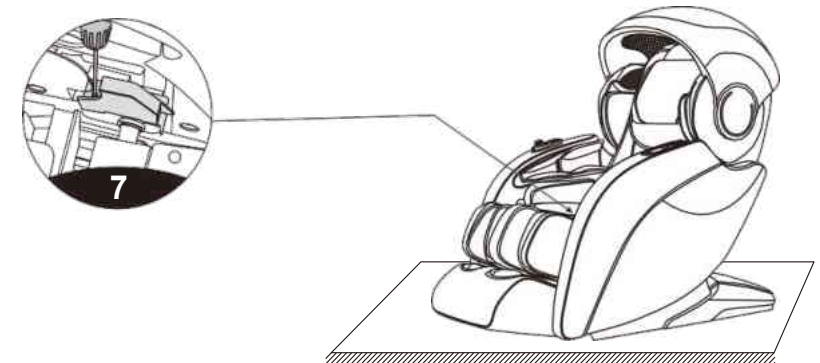

10. Hướng dẫn cài đặt chế độ mùi hương


- Quay nắp khoang trên đầu về phía sau lưng ghế massage. Bạn có thể thấy thiết bị tỏa hương ở bên phải ghế massage (hình 1).

- Quay núm khay chứa hương liệu đến vị trí “mở khóa” và lấy thanh hương liệu rộng ra (hình 2).

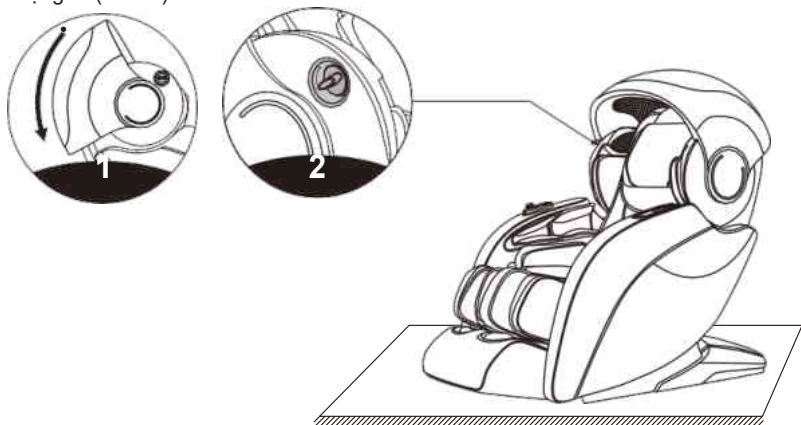


- Sau khi loại bỏ thanh hương liệu rỗng, cho thanh hương liệu mới vào trong khay chứa (hình 3).

- Quay khay chứa hương liệu tới vị trí khóa để khóa lại, hoàn thành việc lắp thanh hương liệu (hình 4)

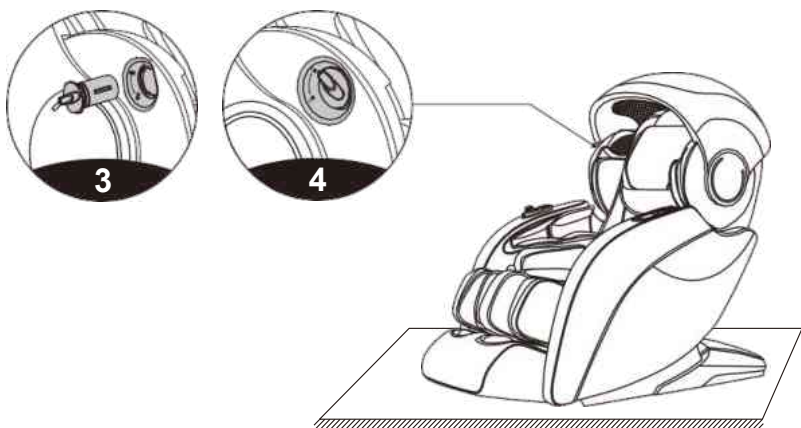


11. Tháo lắp gối đầu và gối tựa lưng

Sử dụng gối đầu có thể giảm cường độ xoa bóp cổ và vai, tùy thuộc vào nhu cầu để quyết định có lắp gối đầu hay không (khuyến nghị sử dụng gối đầu). Gối tựa lưng và lưng ghế được nối bởi khóa kéo (1), gối đầu và gối tựa lưng được nối bởi băng dán (2).

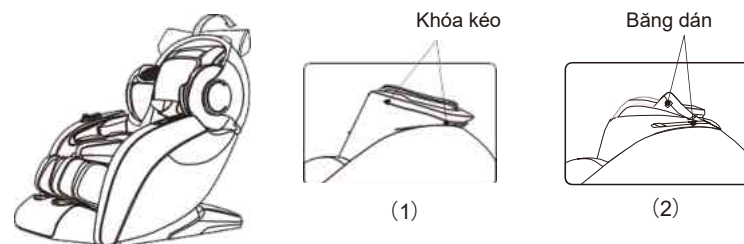

12. Bảo vệ sàn

Đặt máy trên sàn gỗ có thể gây ra hư hỏng sàn, vui lòng đặt máy trên thảm hoặc các vật liệu khác để tránh hư hỏng.

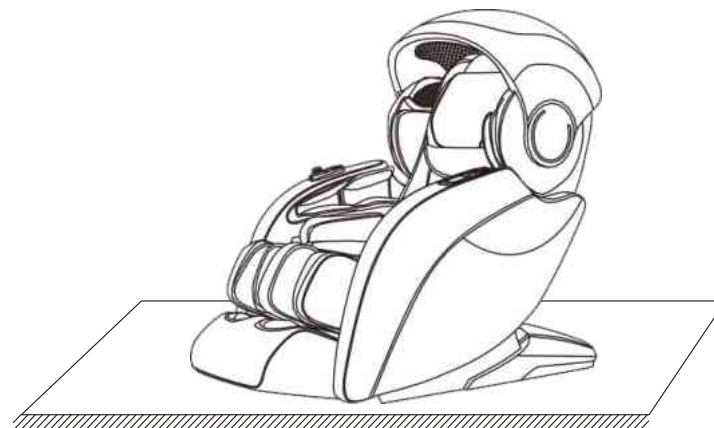


Cảnh báo: Không di chuyển ghế bằng bánh xe trên sàn gỗ, mặt gỗ ghế hoặc trong không gian hẹp. Cần hai người để nâng ghế. Trong quá trình nâng ghế, lấy rãnh ở chỗ đế chân, tấm đỡ lưng làm điểm chịu lực (không bám trực tiếp vào tay vịn)

Phương pháp sử dụng

13. Cách vận chuyển

-Trước khi vận chuyển, đảm bảo rút tất cả dây nối khỏi ghế. Ở hai bên trái, phải của ghế, giữ cạnh dưới của tay vịn bằng cả hai tay, sau đó dùng lực nâng ghế lên. Di chuyển ghế tới vị trí thích hợp rồi nhẹ nhàng đặt ghế xuống. Chú ý vị trí của chân ghế khi đặt ghế xuống, tránh để làm gãy chân ghế.

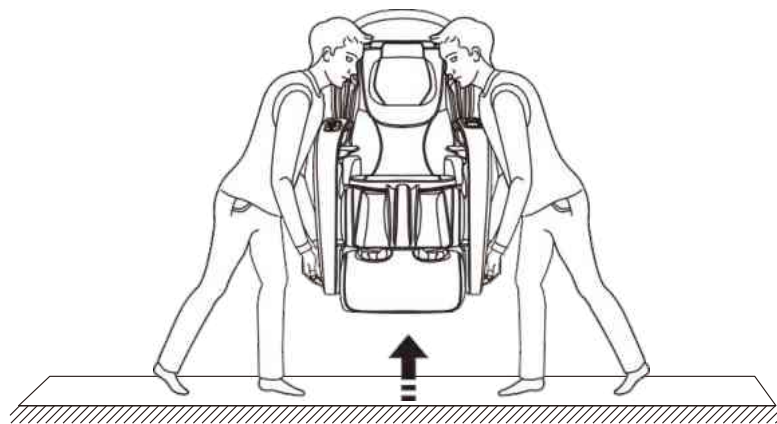

Lưu ý: Đảm bảo tắt công tắc và rút dây điện và dây điều khiển khi di chuyển.

Quy cách sản phẩm

Mẫu: MCB- 901-OR-JUPITER/MCB- 901-BL-JUPITER

Tên: Ghế massage

Điện thế 220-240V~ 50Hz/60Hz

Nguồn điện: 260W

Thời gian: 20 phút

Mức độ an toàn: Cấp I

Nguyên liệu: PVC, PA, các bộ phận bằng thép và bộ phận điện

Nguyên liệu	Microfiber	Da	Vải	Gỗ