



MCB-909 MASSAGE CHAIR

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

XIN VUI LÒNG GIỮ LẠI HƯỚNG DẪN NÀY
ĐỂ SỬ DỤNG SAU NÀY

さい
こう
を
き
わ
め
る



——— Operation Instructions ———



Best of the best

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết cách vận hành đúng sản phẩm. Hãy chú ý đến những cảnh báo an toàn quan trọng và lưu giữ tài liệu này để tham khảo sau. Lưu ý: Công ty chúng tôi có quyền thay đổi và giải thích thiết kế sản phẩm Nếu có sự khác biệt giữa chức năng sản phẩm thực tế và mô tả trong hướng dẫn, đây là sự cập nhật bình thường của sản phẩm, và chúng tôi sẽ không thông báo riêng. Màu sắc và chức năng cụ thể sẽ dựa trên sản phẩm thực tế.

Mục lục

Trước khi sử dụng

Cảnh báo an toàn	02-05
Lắp đặt các bộ phận	06-07
Vị trí đặt ghế massage	08-09
Hướng dẫn sử dụng	10-11
Product structure	12-19

Phương pháp sử dụng

Hướng dẫn vận hành	20-110
Kết thúc massage	110

Bảo trì



Vệ sinh và bảo dưỡng	111
----------------------------	-----

Quan trọng


Xử lý sự cố	112
Thông số kỹ thuật sản phẩm	113

Biện pháp phòng ngừa an toàn (Phải tuân thủ)


- Vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn liên quan trước khi sử dụng.
- Các ghi chú được đánh dấu sẽ giúp bạn sử dụng sản phẩm một cách an toàn và đúng cách.
- Để làm rõ mức độ nguy hiểm và thiệt hại có thể xảy ra do sử dụng sai cách, các cảnh báo được chia thành "**Cảnh báo**" và "**Chú ý**". Cả hai đều quan trọng đối với an toàn và phải được tuân theo.

 Cảnh báo	Chỉ ra rằng có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu sử dụng sai cách..
 Chú ý	Chỉ ra rằng việc sử dụng sai có thể gây thương tích nhẹ hoặc thiệt hại tài sản.

- Xin hãy chú ý đến biểu tượng trước mỗi mục an toàn.


 Cấm	Nghiêm cấm tuyệt đối
--	----------------------

Những đối tượng sau không nên sử dụng sản phẩm này


 Cấm sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> ■ Thiết bị không dành cho người (bao gồm cả trẻ em) bị khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và nhận thức thông thường, trừ khi có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được giám sát để không sử dụng thiết bị như đồ chơi. ■ Giám sát trẻ em để tránh trẻ em chơi đùa với thiết bị này. ■ Bệnh nhân bị loãng xương ■ Bệnh nhân có bệnh tim nghiêm trọng và đang sử dụng thiết bị y tế cấy ghép như máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim – những thiết bị dễ bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ ■ Người bị sốt (trên 38 độ C). ■ Phụ nữ mang thai, sau sinh hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt. ■ Người được bác sĩ khuyên không nên massage do mắc các bệnh như huyết khối, phình động mạch, giãn tĩnh mạch nghiêm trọng hoặc các bệnh về tuần hoàn khác. Trong vòng hai tuần sau khi xuất hiện cục máu đông, tuyệt đối không được massage bất kỳ bộ phận nào có máu đông. ■ Bệnh nhân bị chấn thương hoặc mắc bệnh ngoài da. ■ Trẻ em dưới 14 tuổi và người bất tỉnh không được phép sử dụng sản phẩm nếu không có người giám sát. ■ Người đang nghỉ ngơi hoặc cảm thấy không khỏe theo chỉ định của bác sĩ. ■ Người có vấn đề về cột sống hoặc bị vẹo cột sống không được sử dụng sản phẩm này theo chỉ định y tế. ■ Người đang bị ướt không được sử dụng sản phẩm. ■ Sản phẩm có bề mặt nóng. Người không nhạy cảm với nhiệt cần đặc biệt chú ý khi sử dụng sản phẩm.
---	---


Biện pháp phòng ngừa an toàn (Phải tuân thủ)

Cảnh báo an toàn quan trọng


 Cảnh báo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tránh xa trẻ em khỏi các bộ phận chuyển động của sản phẩm. ■ Sử dụng nguồn điện phù hợp, có nối đất tốt cho sản phẩm này. ■ Rút phích cắm sau khi sử dụng hoặc trước khi vệ sinh để tránh gây thương tích hoặc hư hại sản phẩm ■ Vận hành sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng. ■ Không sử dụng phụ kiện hoặc bộ phận không được khuyến nghị. Không sử dụng sản phẩm ngoài trời. ■ Không sử dụng gần lửa trần như bếp, và không hút thuốc khi đang sử dụng . ■ Không sử dụng thiết bị tạo nhiệt như chăn điện trên sản phẩm này ■ Không ngồi lên lưng ghế, bộ phận massage chân, vai, tay vịn, hoặc đứng lên ghế. ■ Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng ■ Không được sử dụng sản phẩm này cho bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích đã được liệt kê trong hướng dẫn. ■ Khuyến nghị sử dụng tối đa 20 phút mỗi lần. ■ Không sử dụng nếu vỏ bọc hoặc da ghế bị rách hoặc hỏng. ■ Không để vật gì rơi vào trong sản phẩm. ■ Không được ngủ trong khi sử dụng sản phẩm ■ Không sử dụng nếu bạn đang say rượu hoặc cảm thấy không khỏe ■ Không sử dụng trong vòng một giờ sau khi ăn ■ Không sử dụng sản phẩm với lực quá mạnh để tránh bị thương ■ Không sử dụng sản phẩm cho mục đích khác ngoài massage. ■ Thận trọng: Để xa tầm tay trẻ em. Không bảo quản gần nhiệt độ cao hoặc ngọn lửa. ■ Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, cần được thay thế bởi kỹ thuật viên từ nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc bộ phận tương đương ■ Cắm chặt phích cắm điện vào ổ cắm và đảm bảo tiếp xúc an toàn trong quá trình sử dụng. ■ Khi sử dụng dây nối dài, chỉ sử dụng các sản phẩm được chứng nhận quốc gia. ■ Ngắt nguồn điện khi rời đi. ■ Ngừng sử dụng ngay lập tức và cắt nguồn điện nếu xảy ra tiếng ồn bất thường, mùi hôi, quá nhiệt hoặc trục trặc. ■ Không cấp nguồn cho thiết bị từ ổ cắm đèn. ■ Tổng dòng điện tiêu thụ của các thiết bị được kết nối không được vượt quá dòng điện định mức của ổ cắm/mạch chính. ■ Không bao giờ sử dụng gần vật liệu dễ cháy/nổ. ■ Người dùng không được tháo rời sản phẩm hoặc sửa đổi hệ thống dây điện / linh kiện / thiết bị an toàn bên trong. ■ Khi rút phích cắm, không kéo dây nguồn. ■ Chỉ sử dụng cầu chì có định mức quy định - không bao giờ thay thế bằng vật liệu dẫn điện hoặc định mức không chính xác. ■ Không thay đổi cài đặt ngắt mạch của cầu dao hoặc thiết bị dòng điện dư.
--	---


Biện pháp phòng ngừa an toàn (Phải tuân thủ)


Biện pháp an toàn	
 Chú ý	<ul style="list-style-type: none">■ Kiểm tra xem điện áp có phù hợp với thông số kỹ thuật của sản phẩm không.■ Không bao giờ cắm hoặc rút phích cắm bằng tay ướt.■ Không để nước chảy vào trong sản phẩm để tránh bị điện giật hoặc gây hư hỏng.■ Không kéo dây nguồn khi cắm hoặc rút phích cắm. Không được xử lý thô bạo.■ Không làm hỏng dây hoặc sửa đổi mạch điện của sản phẩm này.■ Không lau chùi các bộ phận mang điện của sản phẩm này bằng khăn ướt, chẳng hạn như công tắc nguồn và phích cắm.■ Tránh xa sản phẩm này trong trường hợp mất điện để tránh bị thương nếu có điện trở lại đột ngột.■ Ngừng sử dụng sản phẩm này ngay lập tức khi sản phẩm hoạt động bất thường và tham khảo ý kiến nhà cung cấp tại địa phương.■ Ngừng sử dụng sản phẩm này nếu bạn cảm thấy không khỏe và tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Bảo dưỡng và dịch vụ sản phẩm	
 Chú ý	<ul style="list-style-type: none">■ Sản phẩm này chỉ được bảo trì bởi trung tâm bảo hành được chỉ định bởi nhà sản xuất. Người dùng không được tự ý tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm..■ Đừng quên tắt công tắc nguồn chính sau khi sử dụng.■ Không sử dụng sản phẩm nếu ổ cắm điện bị lỏng■ Nếu sản phẩm không sử dụng trong thời gian dài, cần cuộn gọn dây nguồn và bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, sạch bụi■ Không bảo quản sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao hoặc gần nguồn lửa. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài.■ Vui lòng lau sản phẩm bằng khăn khô. Không sử dụng dung môi như xăng thơm, benzen hoặc cồn.■ Các linh kiện cơ khí của sản phẩm được thiết kế và sản xuất đặc biệt nên không cần bảo trì đặc biệt.■ Không dùng vật nhọn chọc vào sản phẩm.■ Không kéo hoặc đẩy sản phẩm trên mặt đất gồ ghề. Thay vào đó, hãy nhấc lên khi di chuyển.■ Vui lòng sử dụng sản phẩm một cách gián đoạn. Không để sản phẩm hoạt động liên tục trong thời gian dài.■ Cho phép hoạt động không liên tục - cấm sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Biện pháp phòng ngừa an toàn (Phải tuân thủ)

Điều kiện bảo quản	
 Chú ý	<ul style="list-style-type: none">■ Nhiệt độ phòng bảo quản: 5 °C đến 40 °C.■ Độ ẩm tương đối (RH) từ 20% đến 80%; tránh khí ăn mòn, và đặt trong phòng thông thoáng




Môi trường vận hành	
 Chú ý	<ul style="list-style-type: none">■ Không sử dụng sản phẩm trong môi trường quá ẩm ướt như phòng tắm.■ Ngừng sử dụng ngay nếu nhiệt độ môi trường thay đổi đột.■ Không sử dụng sản phẩm trong môi trường nhiều bụi hoặc có chất ăn mòn.■ Không sử dụng trong không gian nhỏ hoặc nơi không được thông gió tốt..

Giai pháp cho sự cố thông thường	
 Caution	<ul style="list-style-type: none">■ Nếu có tiếng động cơ khi sản phẩm đang vận hành, đó là âm thanh hoạt động bình thường.■ Nếu bộ điều khiển không hoạt động bình thường, hãy kiểm tra xem phích cắm và ổ điện đã được kết nối chắc chắn chưa, và công tắc nguồn đã được bật chưa.■ Nếu đã hết thời gian làm việc theo quy định, sản phẩm sẽ tự động kích hoạt chế độ tắt nguồn. Nếu sản phẩm tiếp tục hoạt động trong thời gian dài, bộ bảo vệ nhiệt độ sẽ tự động ngắt sản phẩm. Sản phẩm có thể sử dụng lại sau 30 phút■ Giới hạn trọng lượng: 120kg. Người dùng nặng cân hơn nên mua mẫu được gia cố của chúng tôi.

Các bộ phận lắp đặt



Hướng dẫn lắp đặt bộ cơ bắp chân

1. Lắp cáp và ống dẫn khí của cơ cấu bắp chân vào các ổ cắm ở phía trước cụm khung thép (Hình 1).
2. Sau khi hoàn tất việc kết nối, hãy mở nắp cố định cơ cấu bắp chân ở cả hai bên của cụm khung thép (Hình 2).
3. Nâng cơ cấu bắp chân lên và đặt vào khe, đẩy nắp cố định và cuối cùng cố định tại chỗ bằng 2 vít M4 (Hình 3).

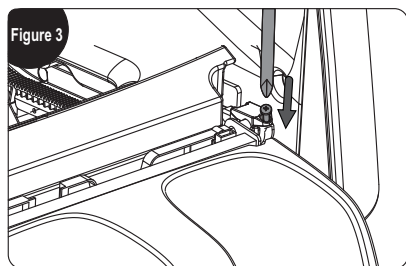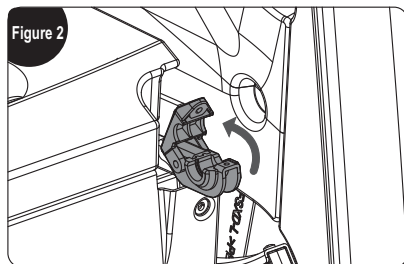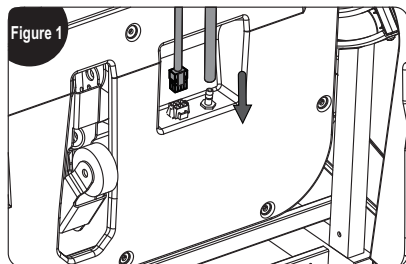

Hướng dẫn lắp đặt giá đỡ bộ điều khiển thủ công



1. Trước tiên, căn chỉnh giá đỡ của bộ điều khiển cầm tay với đế gắn, sau đó lắp giá đỡ xuống dưới. Sau khi đặt giá đỡ vào đúng vị trí, hãy khóa giá đỡ bằng vít M6. (Hình 1)
2. Sau khi khóa giá đỡ, căn chỉnh phần trang trí giá đỡ với ổ cắm lắp đặt và kẹp chặt (Hình 2)

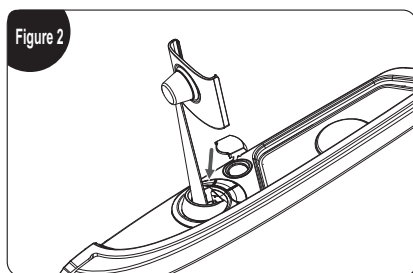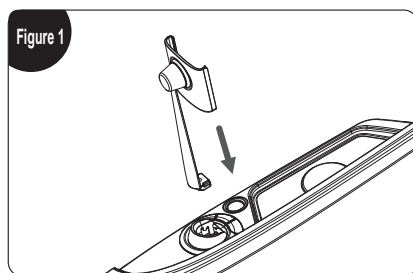

Các bộ phận lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt phích cắm hàng không của bộ điều khiển thủ công

1. Phương pháp lắp đặt phích cắm hàng không không cố định: Căn chỉnh các dấu mũi tên trên của phích cắm hàng không (Hình 1) và phích cắm hàng không (Hình 2), sau đó siết chặt chúng và khóa đai ốc theo chiều kim đồng hồ.

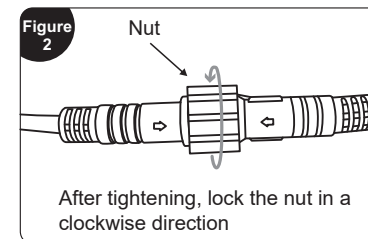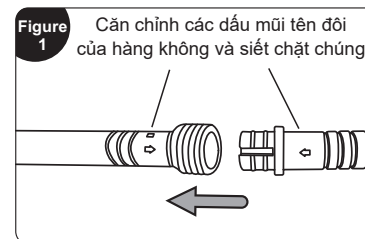


Đặt ghế massage

Vị trí lắp đặt

Đảm bảo có đủ không gian để ghế massage có thể nghiêng ít nhất 17 cm.


Tránh ánh nắng trực tiếp hoặc môi trường có nhiệt độ cao. Đặt trên thảm mềm để tránh lấm sàn

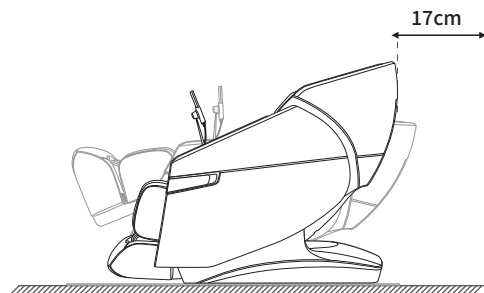

Hướng dẫn nâng sản phẩm

Cần có hai người nâng vì trọng lượng sản phẩm

1. Khi di chuyển trên sàn dễ vỡ, hãy nâng toàn bộ thiết bị lên - không sử dụng bánh xe.
2. Cần thận khi nâng và hạ để tránh chấn thương tay/chân/lưng

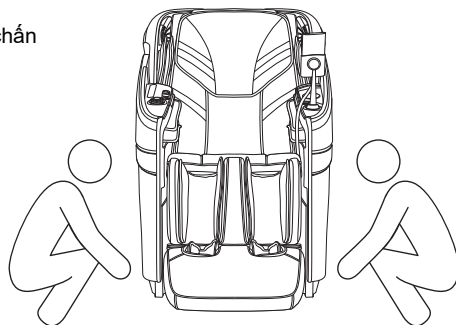


Đặt ghế massage

Phương pháp di chuyển



Sử dụng bánh xe phía sau để di chuyển ghế massage. Di chuyển ghế bằng cách nghiêng ghế xuống và lùi về phía sau khoảng 45° như minh họa trong sơ đồ. **LƯU Ý:** Dùng lực quá mạnh để nghiêng ghế có thể khiến ghế bị lật hoàn toàn và làm hỏng sản phẩm.

1. Trước khi di chuyển, vui lòng tắt máy đúng cách để thiết lập lại toàn bộ máy, sau đó ngắt nguồn điện.
2. Vui lòng giữ ghế trống khi di chuyển. (Người, vật nuôi hoặc đồ đạc sẽ không thể ở trên ghế.)
3. Khi di chuyển, không được vượt qua rào chắn rơi cao hơn 2mm hoặc khoảng cách lớn hơn 5mm.
4. Khi sử dụng bánh xe để di chuyển sản phẩm này, chuyển động liên tục đơn lẻ không được hỗ trợ; nếu khoảng cách vượt quá 50 mét, vui lòng di chuyển sản phẩm này slowly and evenly.

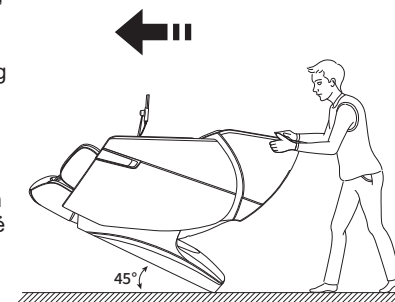

Cách tháo rời và sử dụng đệm tựa đầu và đệm tựa lưng

Sử dụng đệm tựa đầu có thể giảm cường độ massage xoa bóp vùng cổ và vai, và bạn có thể quyết định sử dụng đệm tựa đầu hay không tùy theo nhu cầu của mình (khuyến nghị sử dụng đệm tựa đầu). Đệm tựa lưng và tựa lưng được kết nối bằng khóa kéo (1), đệm tựa đầu và đệm tựa lưng được kết nối bằng khóa kéo (2).

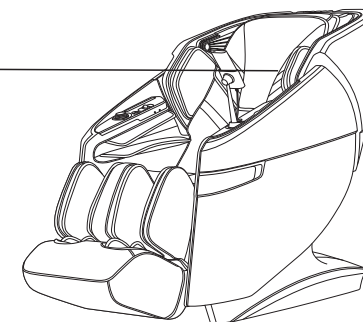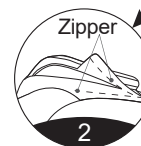


Trước khi sử dụng

Kiểm tra xung quanh

Đảm bảo không có người, vật nuôi và các vật thể khác xung quanh thiết bị.



Chú ý

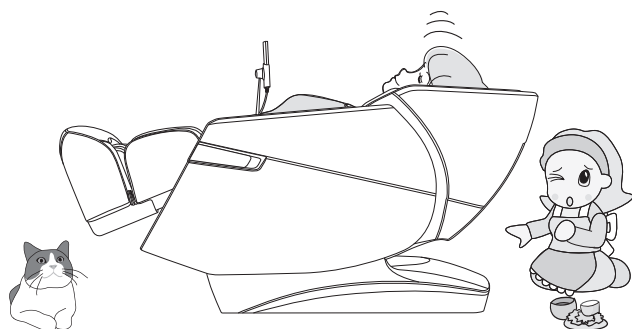

Đảm bảo không có vật lạ nào trong các khe hở của máy


Trước khi massage, hãy đảm bảo không có vật lạ nào kẹt ở chân, bàn chân, v.v.

Trong mọi trường hợp, không được để tay, chân và đầu chạm vào vùng giữa cơ cấu căng chân và thân máy, hoặc vùng giữa tay vịn và khoang chứa.

Trong mọi trường hợp, không được để tay, chân hoặc đầu chìm xuống dưới lớp vải hoặc da bọc vùng massage.



Chú ý

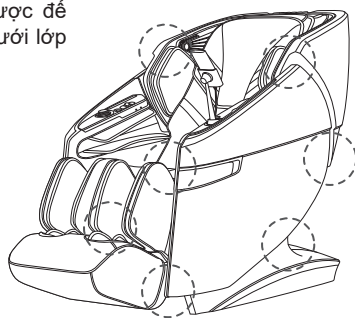


Trước khi sử dụng


Bật nguồn




Chú ý

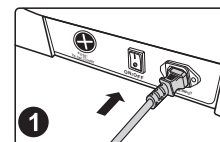

1 Cắm dây nguồn

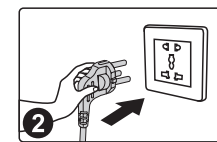

2 Sơ đồ bật nguồn

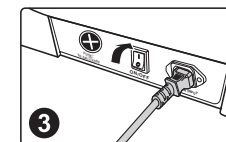

3 TBật công tắc vị trí ("I" position)




Cảnh báo

- Vui lòng kiểm tra dây nguồn và phích cắm xem có bị hỏng hóc không trước khi sử dụng.
- Vui lòng cấp nguồn cho sản phẩm này theo yêu cầu công suất hoạt động của hiệu chuẩn sản phẩm.
- Nghiêm cấm sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện định mức của sản phẩm này..
- Nghiêm cấm kết nối các thiết bị chuyển đổi nguồn khác nhau mà không được phép để cấp nguồn cho sản phẩm này.

Cấu trúc sản phẩm


Mô tả các thành phần

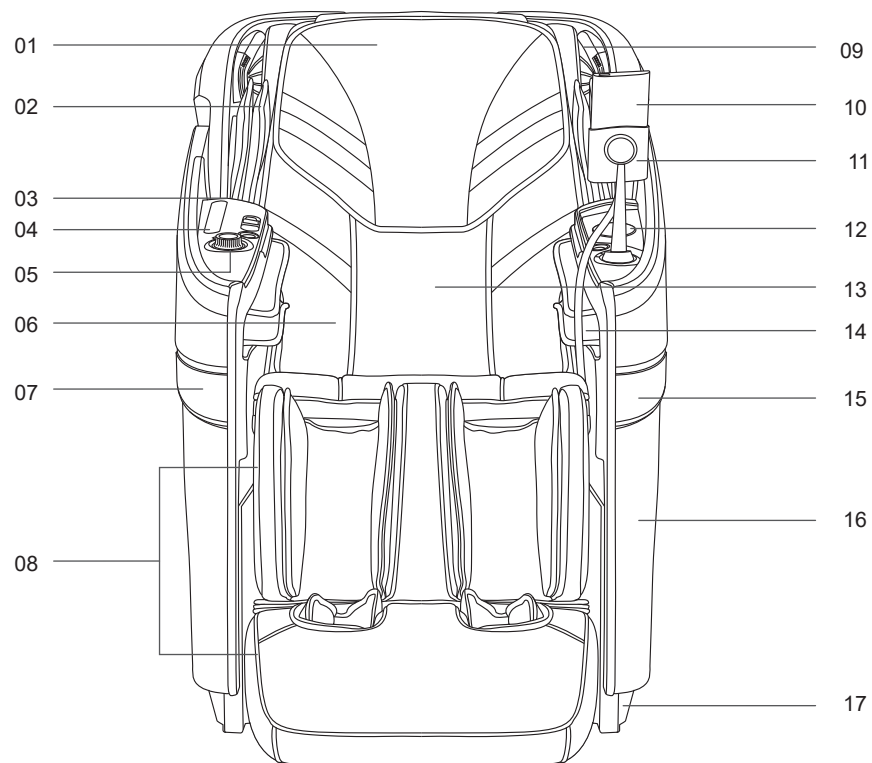

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 01. Đệm đầu | 09. Bộ lắp ráp vỏ loa |
| 02. Vai | 10. Bộ điều khiển cầm tay |
| • Bộ phận khí nén | 11. Giá đỡ điều khiển cầm tay |
| 03. Cổng sạc USB | 12. Sạc không dây |
| 04. Khay đặt điện thoại di động | 13. Đệm lưng |
| 05. Phím tắt tay vịn | 14. Bộ điều áp khí tay vịn |
| 06. Bộ phận khăn choàng | 15. Đèn viền tay vịn |
| 07. Tay vịn | 16. Vỏ tay vịn |
| 08. Chân | 17. Vỏ bên |
| • Cụm massage | |

Cấu trúc sản phẩm


Sơ đồ phân phối chức năng

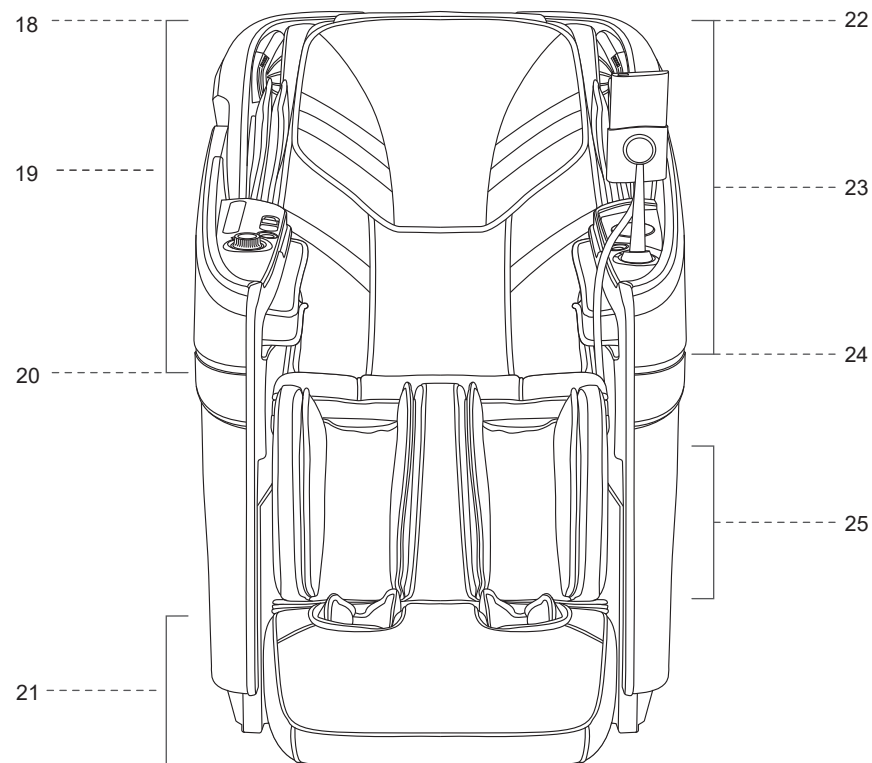

- | | |
|---|--|
| 18. Hai bên vai | • Tự động phát hiện chiều dài bắp chân |
| • Massage túi khí | 22. Hai bên đầu |
| 19. Từ đầu đến cổ | • Hệ thống âm thanh kỹ thuật số 3D |
| • Massage hai động cơ | • Phát nhạc |
| 20. Tay phải | 23. Vai & Lưng |
| • Túi khí massage | • Massage eo và bụng |
| • Phím tắt tay vịn | • Chức năng làm nóng khăn choàng |
| • Điều khiển giọng nói | 24. Tay trái |
| • Micro tích hợp để điều khiển bằng giọng nói | • Đai massage điểm huyết |
| • Đai massage điểm huyết & trị liệu bằng từ tính | & trị liệu bằng từ tính |
| • Sạc USB | • Túi khí massage |
| 21. Chân | • Sạc ko dây |
| • Túi khí massage | 25. Chân |
| • Con lăn massage | • Túi khí massage |
| • Sưởi ấm đầu ngón chân | • Nhào bóp bắp chân |
| • Chống kẹp bắp chân (3 điểm ở mặt trên của bàn chân) | |
| • Điều chỉnh điện tử độ mở rộng và thu gọn của chân | |

Cấu trúc sản phẩm

Hướng dẫn nút tắt loa phải

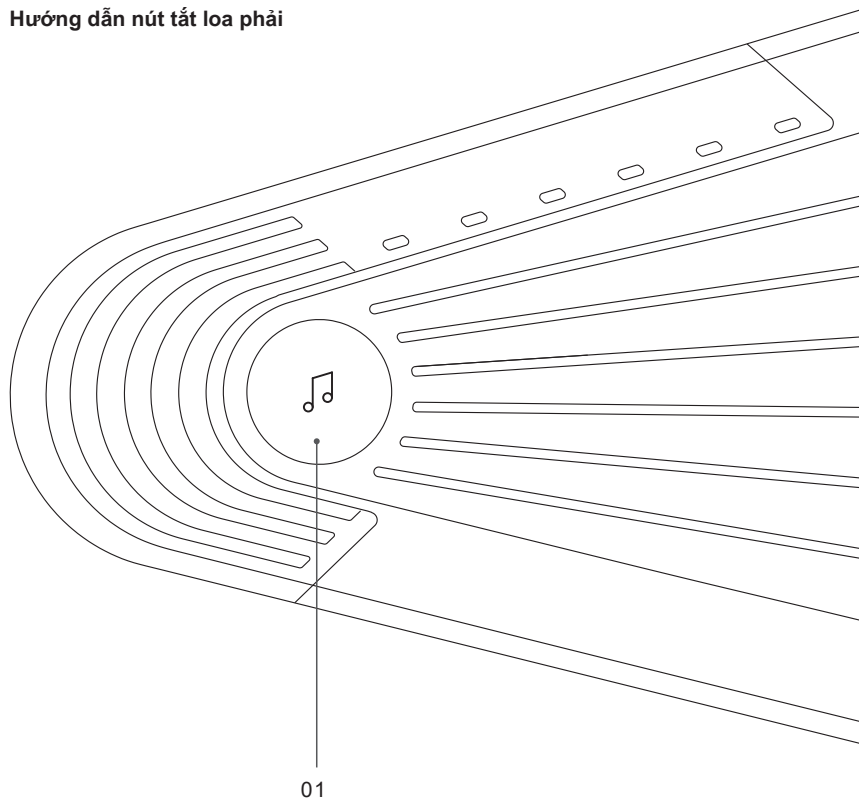


01. Nút nhạc nền:

- Nhấn nhanh để bật hoặc tắt nhạc nền
- Ở trạng thái bật, biểu tượng vẫn sáng. Ở trạng thái đóng, biểu tượng tắt.

Cấu trúc sản phẩm

Hướng dẫn nút tắt loa trái



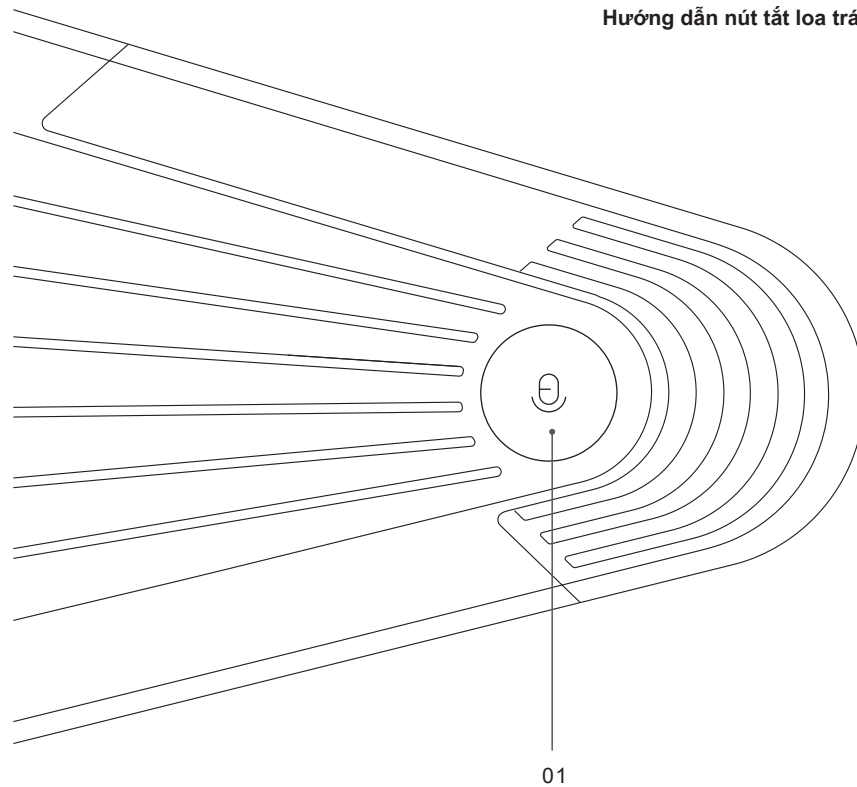


01. Nút điều khiển bằng giọng nói:

- Nhấn nhanh để đánh thức trợ lý giọng nói, nhấn lâu để bật hoặc tắt chức năng điều khiển bằng giọng nói..
- Trạng thái đánh thức, biểu tượng nhấp nháy. Ở trạng thái bật, biểu tượng vẫn sáng. Trạng thái đóng, biểu tượng tắt.

Cấu trúc sản phẩm


Mô tả phím tắt tay vịn bên phải

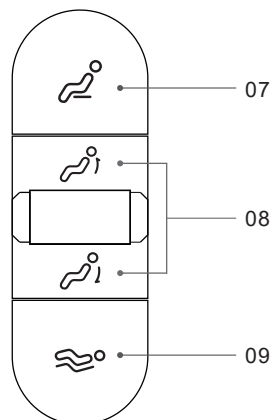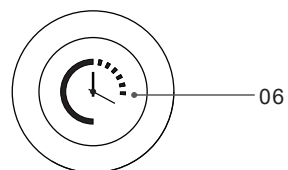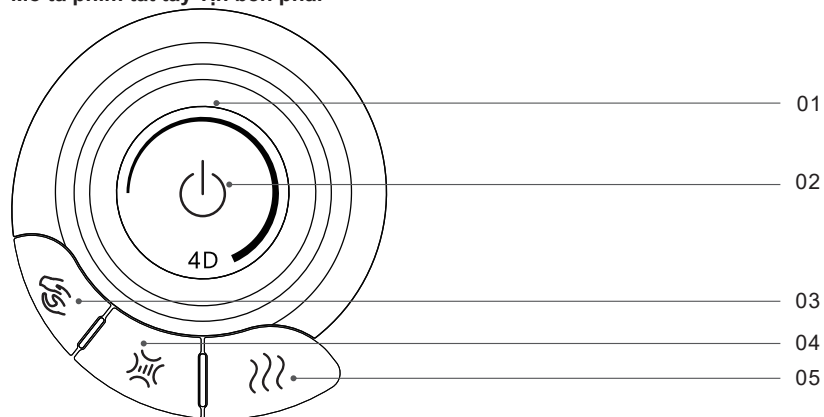

01. Phím 4D+/-: Xoay phím này theo chiều kim đồng hồ để tăng cường độ 4D, lên đến mức 5. Xoay phím này ngược chiều kim đồng hồ để giảm cường độ 4D, xuống mức 1.
02. Phím Bật/Tắt: Nhấn phím này trong 3 giây để bật hoặc tắt ghế massage. Sau khi bật chế độ massage, nhấn nhanh để tạm dừng/chạy
03. Phím kỹ thuật: Nhấn phím này để chuyển đổi kỹ thuật massage.
04. Phím điều chỉnh cường độ áp suất khí: Nhấn phím này để điều chỉnh cường độ áp suất khí. Mỗi lần nhấn sẽ tăng cường độ lên một mức và cường độ sẽ chuyển đổi tuần hoàn giữa mức 1 đến 5. Khi cường độ được điều chỉnh đến mức 5, hãy nhấn lại để tắt áp suất không khí.
05. Phím sưởi ấm: Nhấn phím này để bật hoặc tắt chức năng sưởi ấm lưng. Có ba mức điều chỉnh: nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình và nhiệt độ cao.
Phím tăng thời gian massage: Nhấn phím này để tăng thời gian massage ban đầu thêm 5 phút, tối đa 40 phút.
06. Phím reset: Nhấn nút này để khôi phục lại trạng thái góc ban đầu.
Gạt nút nâng: Gạt nút về phía trước một lần và giữ, vị trí ngồi sẽ nâng lên và ghế massage sẽ đứng lên.
Gạt nút về phía sau một lần và giữ, vị trí ngồi sẽ hạ xuống và ghế massage sẽ nằm xuống. Gạt nút về phía trước hai lần và giữ, bắp chân sẽ hạ xuống. Gạt nút về phía sau hai lần và giữ, bắp chân sẽ nâng lên. Thả ra để dừng điều chỉnh..
07. Phím không trọng lực: Nhấn nhanh nút này để tự động điều chỉnh góc không trọng lực. Có hai mức không trọng lực có thể điều chỉnh. Khi không trọng lực đạt đến mức thứ hai, nhấn nút không trọng lực để tắt chế độ không trọng lực..

Cấu trúc sản phẩm


Left armrest shortcut button instructions

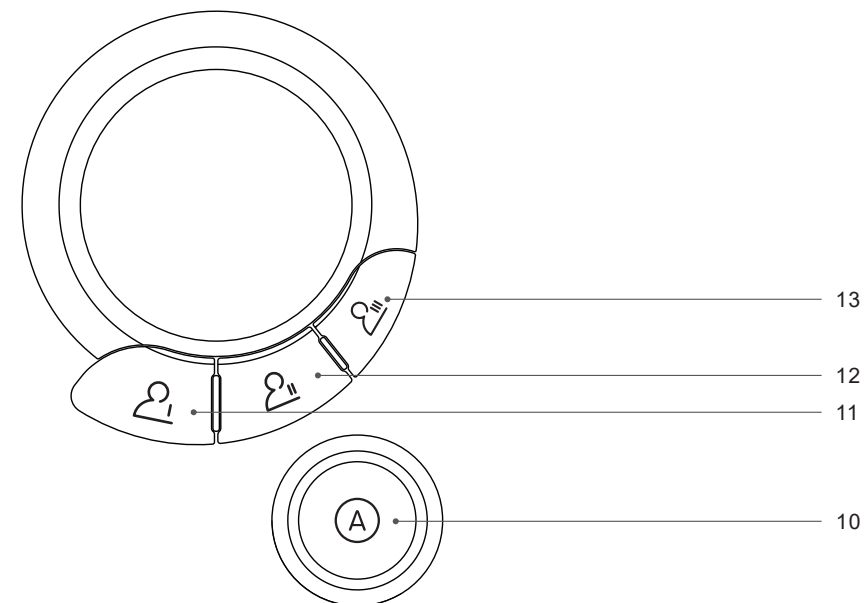

10. Phím chương trình tự động: Nhấn phím này để chuyển qua 18 chế độ tự động..
11. Phím chế độ lưu trữ 1: Nhấn và giữ để lưu chế độ massage hiện tại 1, nhấn và giữ để chạy chế độ massage đã lưu 1.
12. Phím chế độ lưu trữ 2: Nhấn và giữ để lưu chế độ massage hiện tại 2, nhấn và giữ để chạy chế độ massage đã lưu 2.
13. Phím chế độ lưu trữ 3: Nhấn và giữ để lưu chế độ massage hiện tại 3, nhấn và giữ để chạy chế độ massage đã lưu 3 .


Cấu trúc sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng phím điều khiển từ xa

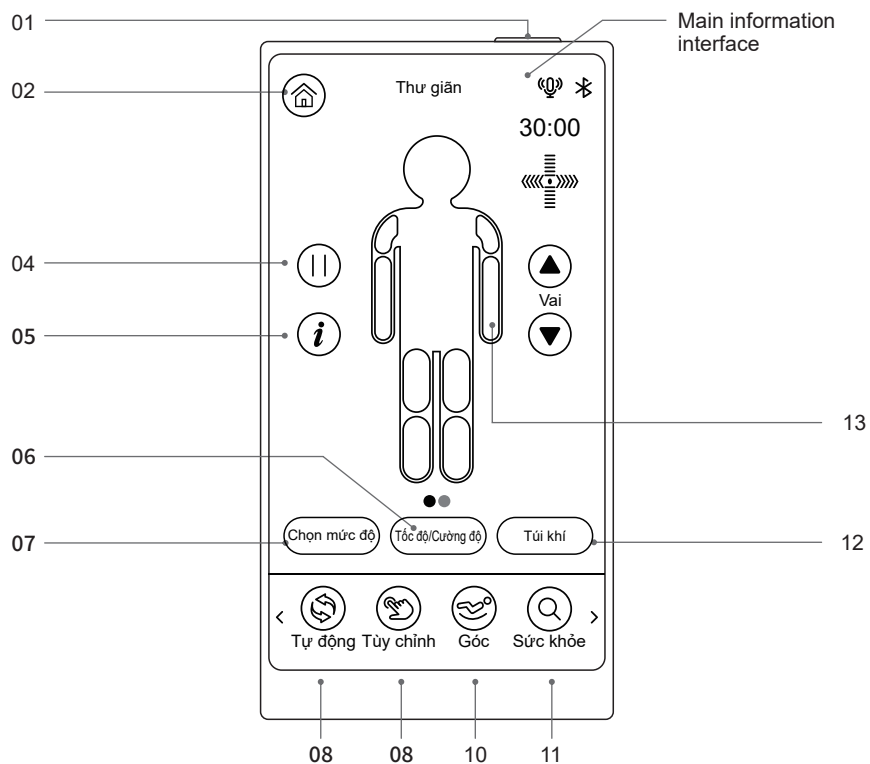

01. Phím Bật/Tắt: Bật hoặc tắt ghế massage.
 02. Phím Trang chủ: Quay lại nhanh chức năng giao diện chính.
 03. Phím Chức năng Hương thơm: Chọn để chuyển đổi chức năng.
 04. Phím Tạm dừng: Tạm dừng massage hoặc thoát khỏi chế độ tạm dừng massage.
 05. Phím Tính năng Phụ trợ: Chọn chức năng massage tương ứng
 06. Speed/Intensity key: Enter the massage speed/intensity interface to adjust 4D intensity
07. Phím chọn mức độ: Vào giao diện chọn cường độ massage..
 08. Phím chức năng tự động: Vào chức năng chọn chương trình massage tự động.
 09. Phím chế độ thủ công: Vào giao diện chức năng massage thủ công.
 10. Phím phát hiện sức khỏe: Vào giao diện phát hiện sức khỏe thông qua phím phát hiện sức khỏe
 11. Phím điều chỉnh góc: Vào giao diện điều chỉnh góc để chọn góc tư thế ngồi
12. Phím massage áp suất khí: Chọn chế độ massage áp suất khí và điều chỉnh cường độ áp suất khí tương ứng.
 13. Trạng thái hiển thị áp suất khí: Hiển thị vị trí massage áp suất khí hiện tại.

Cấu trúc sản phẩm

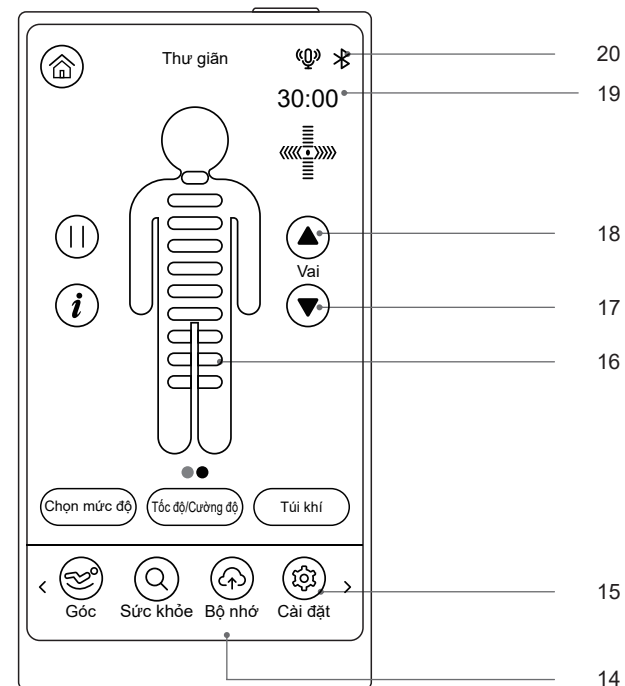


14. Phím bộ nhớ: Vào giao diện bộ nhớ
 15. Phím cài đặt: Vào giao diện menu cài đặt..
 16. Trạng thái hiển thị cơ chế massage: Hiển thị vị trí cơ chế massage hiện tại..
 17. Phím điều chỉnh vị trí vai xuống: Điều chỉnh vị trí vai xuống để xác định massage
 18. Phím điều chỉnh vị trí vai lên: Điều chỉnh vị trí vai lên để xác định điểm chuẩn massage.
 19. Phím điều chỉnh thời gian: Điều chỉnh thời gian massage..
 20. Phím thanh hiển thị trạng thái: Hiển thị thông tin trạng thái chương trình massage.


Hướng dẫn vận hành

I. Bắt đầu Massage

1. Nhấn và giữ công tắc trên cùng hoặc công tắc tay vịn bên phải của bộ điều khiển thủ công để bật ghế massage. Sau khi ghế massage ở chế độ tiết kiệm điện và chuyển sang chế độ ngủ, nút công tắc tay vịn bên phải không được hỗ trợ để bật nguồn..
2. Sau khi khởi động hệ thống, hãy chọn cường độ massage bằng cách nhấn bất kỳ phím nào trong số các phím "Nhẹ nhàng, Dịu nhẹ, Mạnh mẽ" trên điều khiển từ xa để bật ghế massage và chuyển sang chế độ nằm. Nếu không chọn cường độ trong vòng 20 phút, ghế massage sẽ tự động tắt.

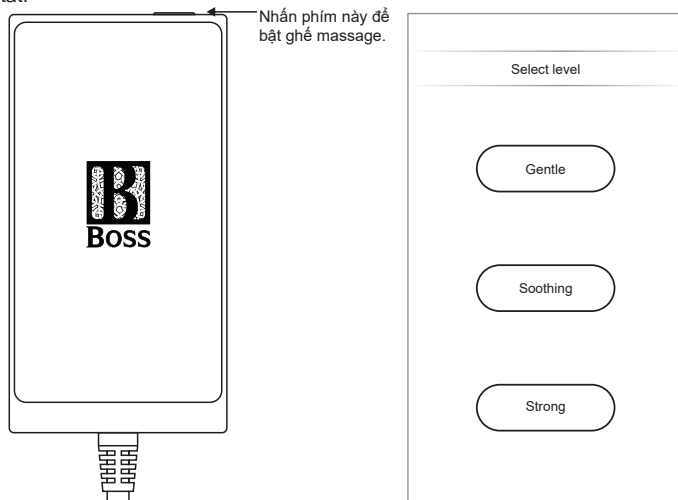


3. Sau khi chờ hệ thống khởi động, hãy vào giao diện điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó chọn nút "Zero 1" hoặc "Zero 2". Ghế massage sẽ tự động điều chỉnh đến góc không trọng lực đã chọn. Chờ cho đến khi điều chỉnh hoàn tất, hoặc bạn có thể nhấn trực tiếp nút "Bỏ qua" để chuyển sang bước tiếp theo

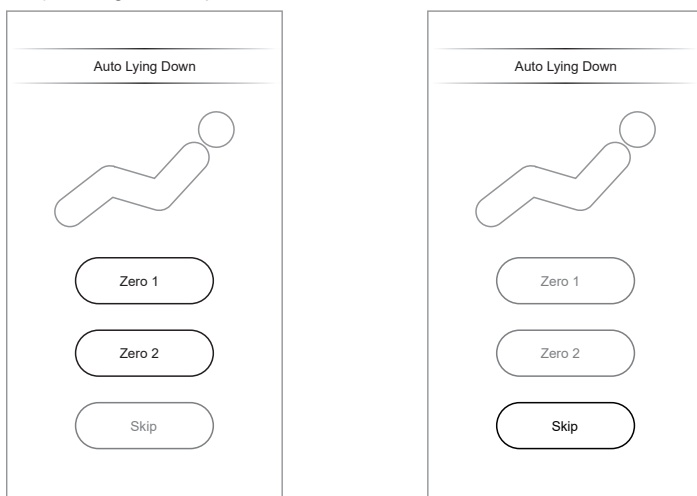


Hướng dẫn vận hành

4. Đợi cho đến khi phát hiện hình dạng cơ thể hoàn tất, cũng có thể nhấn phím "Bỏ qua" để bỏ qua phát hiện và bắt đầu massage trực tiếp.

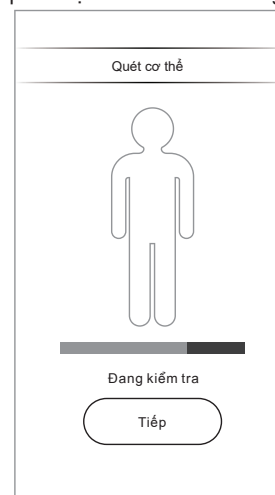


5. Điều chỉnh vị trí vai: Sau khi hoàn tất quá trình nhận dạng hình dạng cơ thể, điều khiển thủ công hoặc nhắc nhở bằng giọng nói sẽ nhắc người dùng điều chỉnh vị trí vai. Nếu bánh xe massage dừng ở vị trí vai của bạn, không cần điều chỉnh. Chỉ cần nhấn nút "OK" để bắt đầu massage. Nếu không, hãy chọn mũi tên lên hoặc xuống để điều chỉnh bánh xe massage đến vị trí vai phù hợp (có 1-10 vị trí vị trí vai có thể điều chỉnh), sau đó nhấn nút "OK" để bắt đầu massage. Nếu không có thao tác nào trong hơn 10 giây, vị trí bánh xe massage hiện tại sẽ được mặc định là vị trí vai và quá trình massage sẽ bắt đầu.

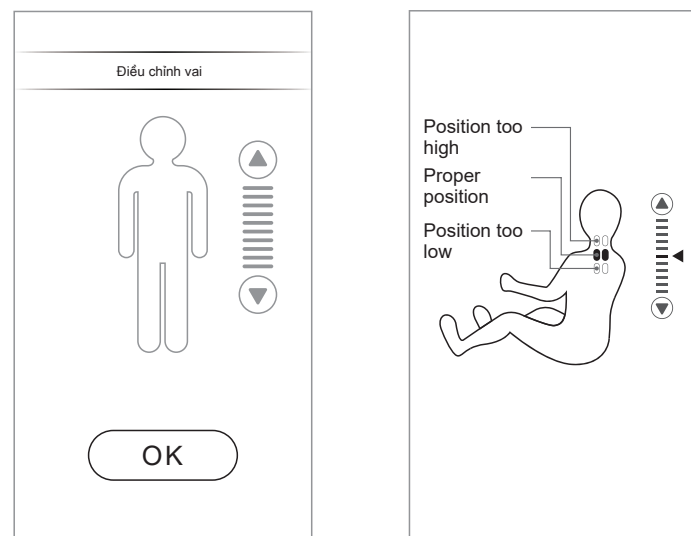


Hướng dẫn vận hành

II. Chức năng giao diện trang chủ (Vui lòng sử dụng chức năng này sau khi khởi động)

Tại trang chủ của màn hình hiển thị, như hình bên dưới, bạn có thể chọn chức năng massage tương ứng theo nhu cầu massage của mình, bao gồm: Tạm dừng, các chức năng phụ trợ (bao gồm nhiệt đai, nhiệt ngón chân, con lăn, xoa bóp bắp chân), điều chỉnh vùng massage, điều chỉnh vị trí vai, cường độ massage, tốc độ massage, cường độ massage, massage áp lực khí và các lựa chọn chức năng massage khác. Bạn cũng có thể vuốt sang trái và phải để xem vị trí massage áp lực khí hoặc vị trí massage hiện tại của robot.

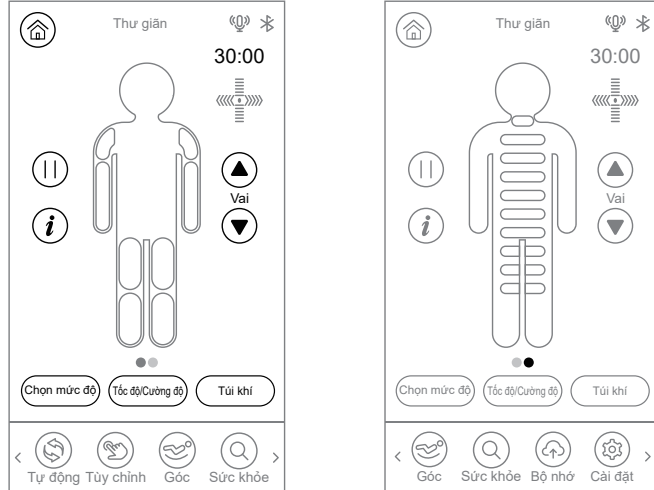


1. Tạm dừng: Trong giao diện "Trang chủ", như hình minh họa bên dưới, nhấn phím "Tạm dừng", chế độ massage sẽ chuyển sang trạng thái tạm dừng, tất cả các chức năng massage sẽ dừng lại. Nhấn lại nút "Tạm dừng" để khôi phục trạng thái massage trước đó. Bạn cũng có thể nhấn nhanh nút nguồn trên tay vịn bên phải để chuyển sang trạng thái tạm dừng. Lưu ý: Trong trạng thái tạm dừng, các chức năng khác ngoại trừ tắt máy sẽ không khả dụng.

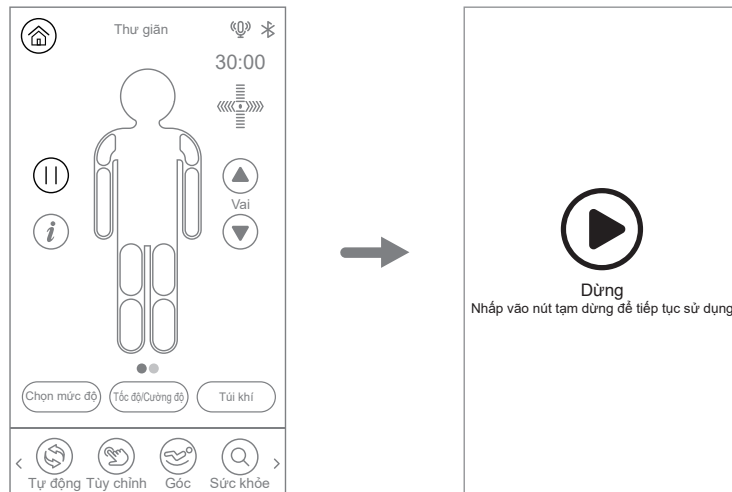


Hướng dẫn vận hành

2. Tính năng phụ trợ: Trong giao diện "Trang chủ", Như thể hiện trong hình bên dưới, hãy nhấn vào phím "Tính năng phụ trợ", sau đó chọn chức năng massage tương ứng trong giao diện bật lên, các chức năng phụ trợ bao gồm Nhiệt đai, Nhiệt ngón chân, Con lăn, Xoa bóp bắp chân và các chức năng massage khác.

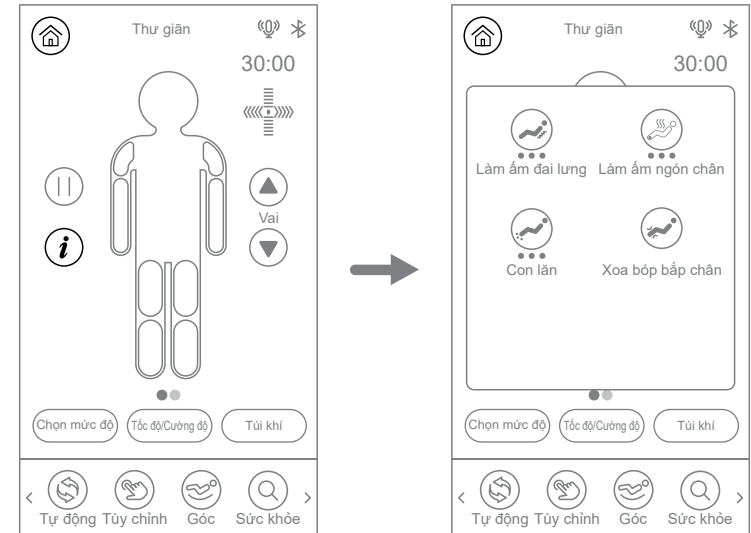


2.1. Sưởi ấm lưng: Sau khi vào giao diện "Chức năng phụ trợ", như minh họa trong hình bên dưới, hãy nhấn phím "Sưởi ấm lưng" để bật hoặc tắt chức năng sưởi ấm lưng. Chức năng sưởi ấm lưng sẽ ấm lên sau 3 phút bật chức năng sưởi ấm. Có ba mức nhiệt độ có thể điều chỉnh: nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình và nhiệt độ cao..

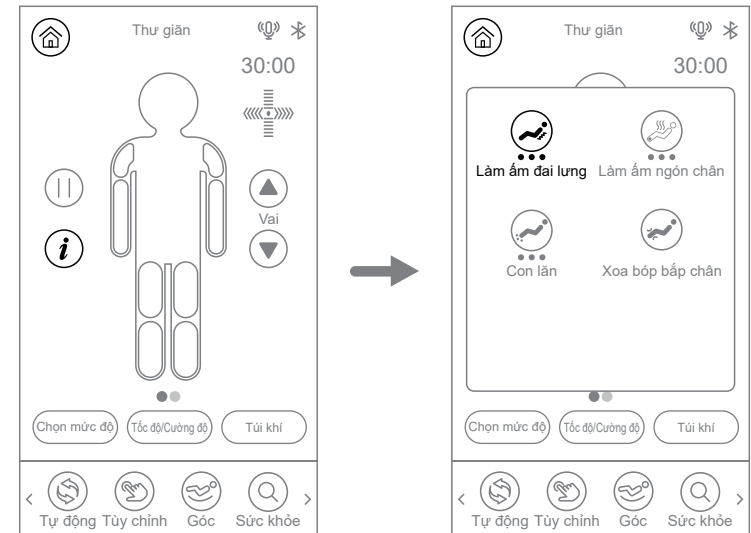


Hướng dẫn vận hành

2.2. Sưởi ấm ngón chân: Sau khi vào giao diện "Chức năng phụ trợ", như minh họa trong hình bên dưới, hãy nhấp vào phím "Sưởi ấm ngón chân" để bật hoặc tắt chức năng sưởi ấm ngón chân. Chức năng sưởi ấm ngón chân sẽ ấm lên sau 3 phút bật chức năng sưởi ấm. Có ba mức nhiệt độ có thể điều chỉnh: nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình và nhiệt độ cao..

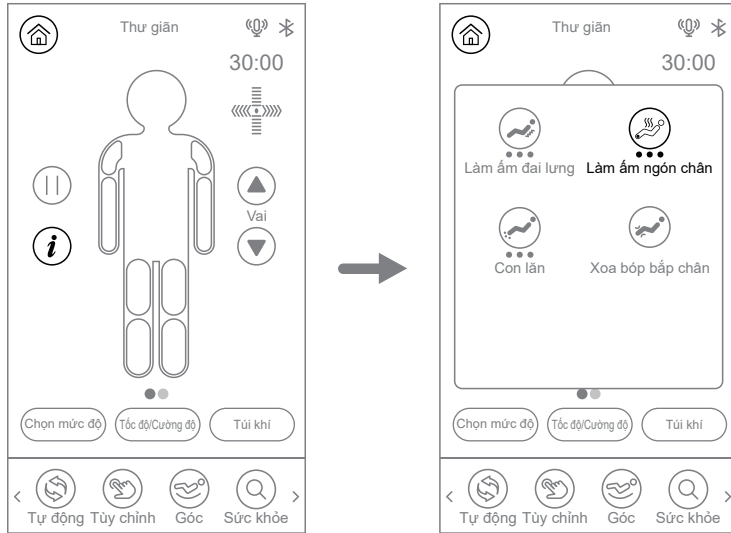


2.3. Con lăn chân: Sau khi vào giao diện "Chức năng phụ trợ", như hình minh họa bên dưới, hãy nhấp vào phím "Con lăn chân" để bật hoặc tắt chức năng massage con lăn chân. Có ba tốc độ có thể điều chỉnh, với chuyển đổi tuần hoàn 1, 2, 3 và tắt..

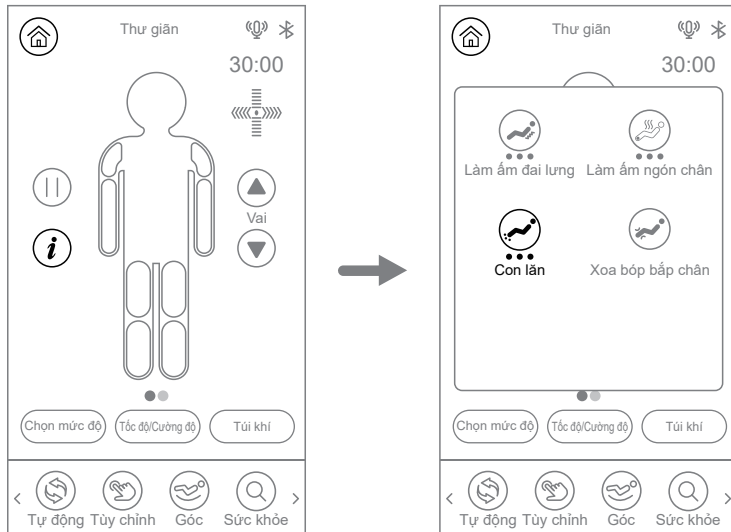


Hướng dẫn vận hành

2.4. Calf Knead: Sau khi vào giao diện "Chức năng phụ trợ", như hình minh họa bên dưới, hãy nhấp vào phím "Calf Knead" để bật hoặc tắt chức năng massage Calf Knead.

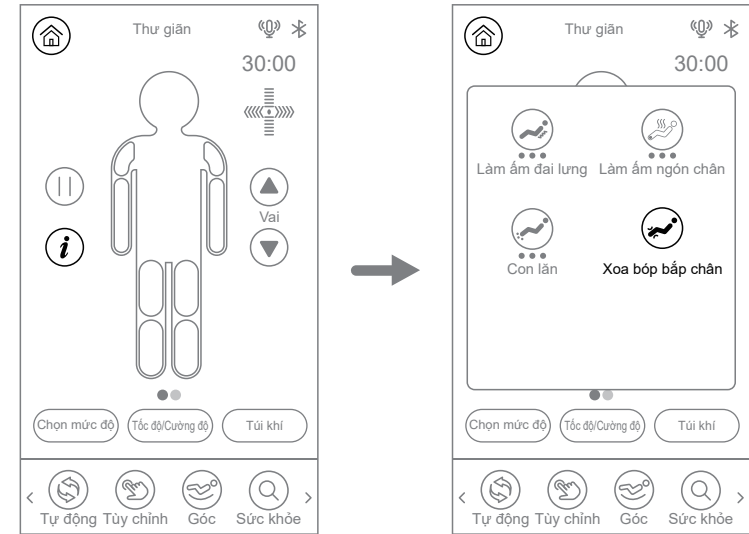


3. Hiển thị trạng thái: Trong giao diện "Trang chủ", Như thể hiện trong hình bên dưới, thông tin trạng thái chức năng massage hiện tại được hiển thị, chẳng hạn như chương trình tự động, chương trình thủ công, điều khiển bằng giọng nói, Bluetooth và thông tin trạng thái khác

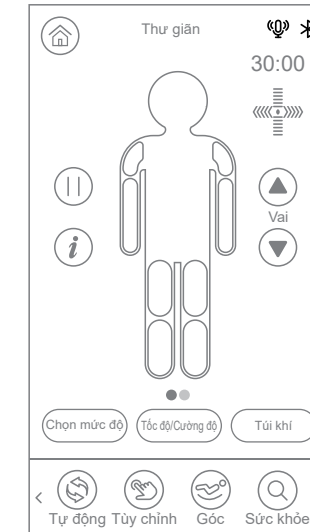


Hướng dẫn vận hành

4. Điều chỉnh thời gian: Trong giao diện "Trang chủ", Như thể hiện trong hình bên dưới, nhấp vào nút "30:00" trên màn hình hiển thị thời gian, sau đó điều chỉnh thời gian theo yêu cầu thời gian massage trong giao diện bật lên.

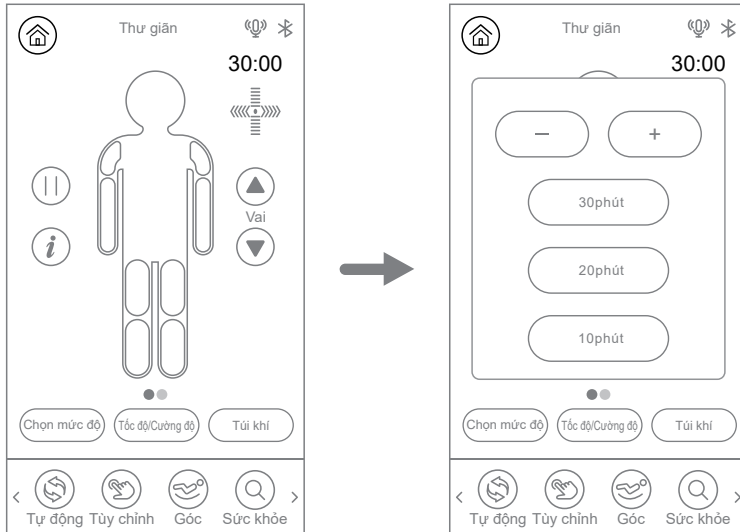


- 4.1. Chọn thời gian: Sau khi vào giao diện điều chỉnh thời gian, như hình minh họa bên dưới, nhấn phím cộng "+" để tăng thời gian thêm 5 phút, tối đa 40 phút, và nhấn phím trừ "-" để giảm thời gian thêm 5 phút. Hoặc trực tiếp chọn thời gian massage "10 phút, 20 phút, 30 phút" trong giao diện..

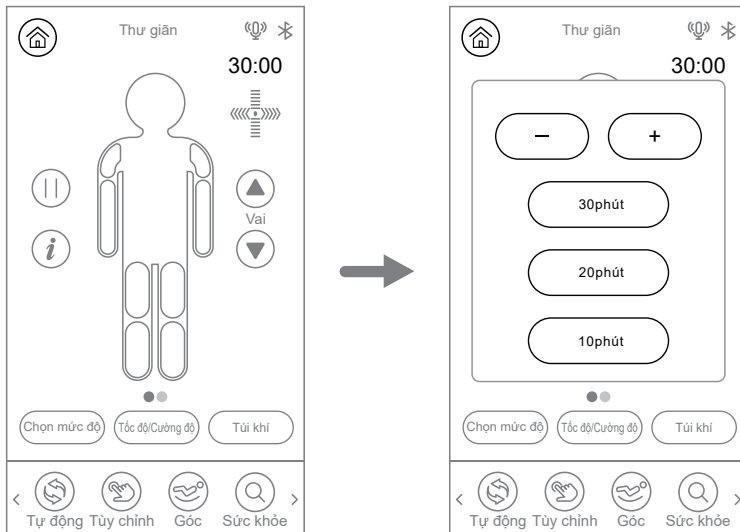


Hướng dẫn vận hành

5. Điều chỉnh vị trí: Trong giao diện "Trang chủ", Như thể hiện trong hình bên dưới, chọn phím lên "▲" hoặc phím xuống "▼" để điều chỉnh vị trí vai lên hoặc xuống, sau đó nhấn nút mũi tên lên hoặc xuống để điều chỉnh vị trí vai lên hoặc xuống, có tổng cộng 1-11 mức cố sẵn.

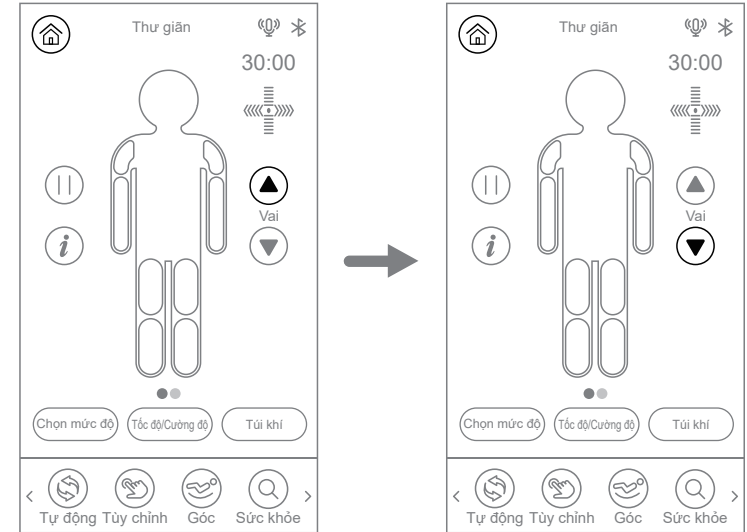


6. Cường độ massage: Trong giao diện "Trang chủ", nhấp vào nút "Cường độ massage" như hình minh họa bên dưới để nhanh chóng điều chỉnh cường độ massage trong giao diện bật lên. Lưu ý: Chức năng này có thể nhanh chóng chuyển đổi cường độ massage trong quá trình massage.

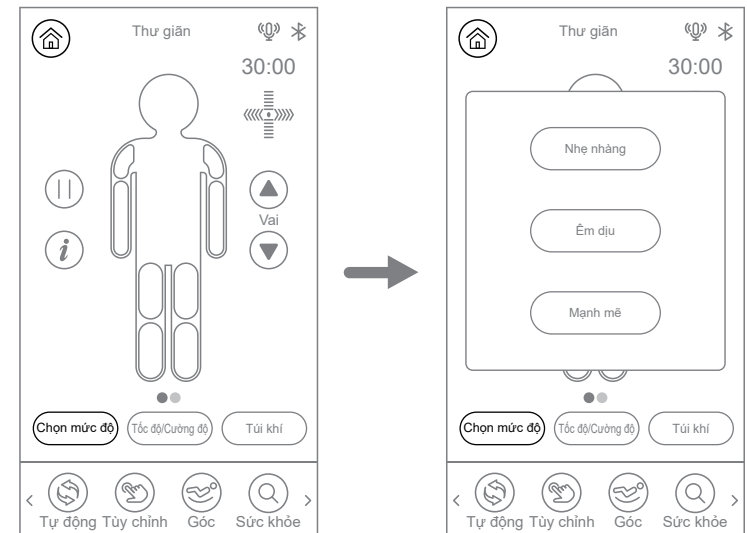


Hướng dẫn vận hành

7. Lựa chọn cường độ: Sau khi vào giao diện cường độ massage, bạn có thể chọn bất kỳ nút cường độ massage nào từ "nhẹ nhàng, êm dịu, mạnh" tùy theo nhu cầu massage của bạn để chuyển đổi cường độ massage

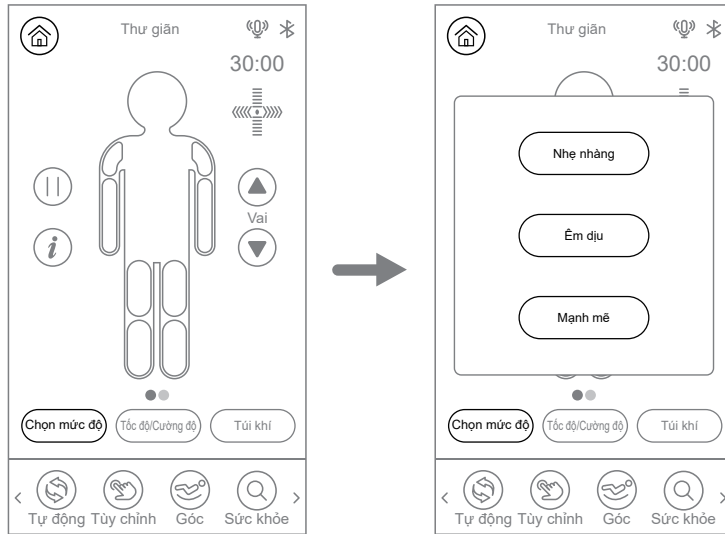


8. Đường độ/Tốc độ: Trong giao diện "Trang chủ", như hình minh họa bên dưới, nhấn vào phím "Cường độ/Tốc độ". Trong cửa sổ bật lên, chọn "Cường độ 4D (Massage trên)", Tốc độ massage (Massage trên), Cường độ 4D (Massage dưới), Tốc độ massage (Massage dưới)" tùy theo nhu cầu massage của bạn và trượt thanh trượt sang trái hoặc phải để điều chỉnh cường độ hoặc tốc độ..

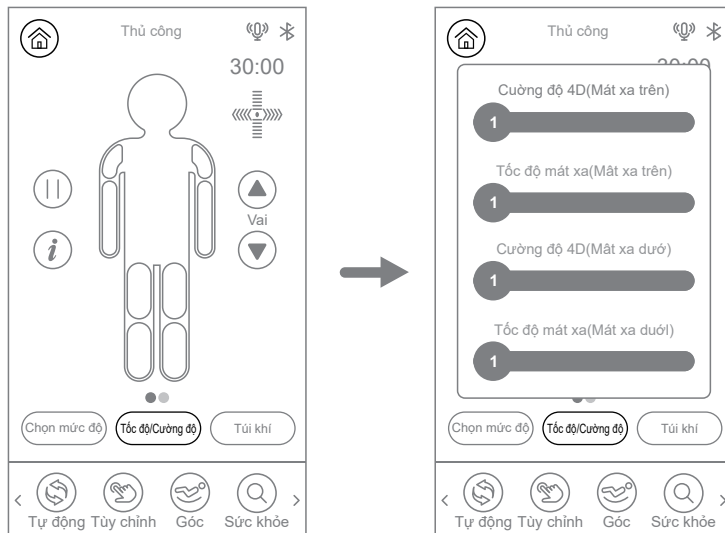


Hướng dẫn vận hành

- 8.1. Cường độ 4D (Massage phía trên): Sau khi vào giao diện "Cường độ/Tốc độ", như hình minh họa bên dưới, hãy chọn nút trượt "Cường độ 4D (Massage phía trên)" và trượt sang trái và phải để điều chỉnh cường độ 4D. Cường độ có thể được điều chỉnh từ 1 đến 5 mức, với 1 là yếu nhất và 5 là mạnh nhất. Cường độ 4D càng mạnh, vòng xoay massage càng mạnh và cường độ massage càng cao,

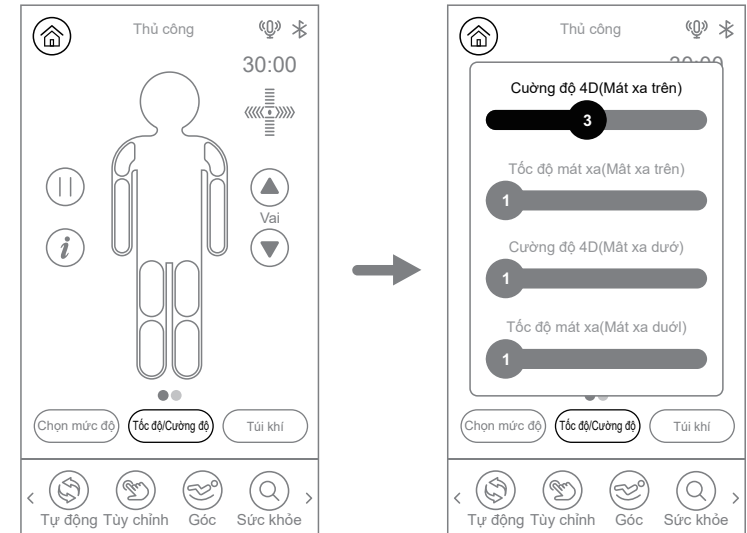


Trang chủ - Cường độ 4D (Massage phần trên) Hiển thị cường độ

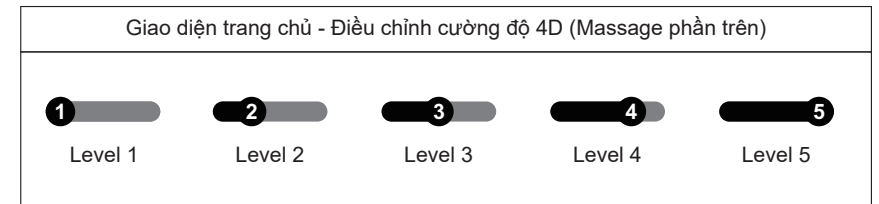


Phím	Mô tả
	Nhấn và giữ nút trượt và trượt sang phải để tăng cường độ 4D. Có thể điều chỉnh 1-5 mức cường độ.
	Nhấn và giữ nút trượt để trượt sang trái để giảm cường độ 4D, có thể điều chỉnh 1-5 mức cường độ.

Hướng dẫn vận hành

8.2. Cường độ 4D (Massage thấp): Sau khi vào giao diện "Cường độ/Tốc độ", như hình minh họa bên dưới, chọn nút trượt "Cường độ 4D (Massage thấp)" và trượt sang trái và phải để điều chỉnh cường độ 4D. Cường độ có thể được điều chỉnh từ 1 đến 5 mức, với 1 là yếu nhất và 5 là mạnh nhất. Cường độ 4D càng mạnh, vòng xoay massage càng mạnh và cường độ massage càng cao.

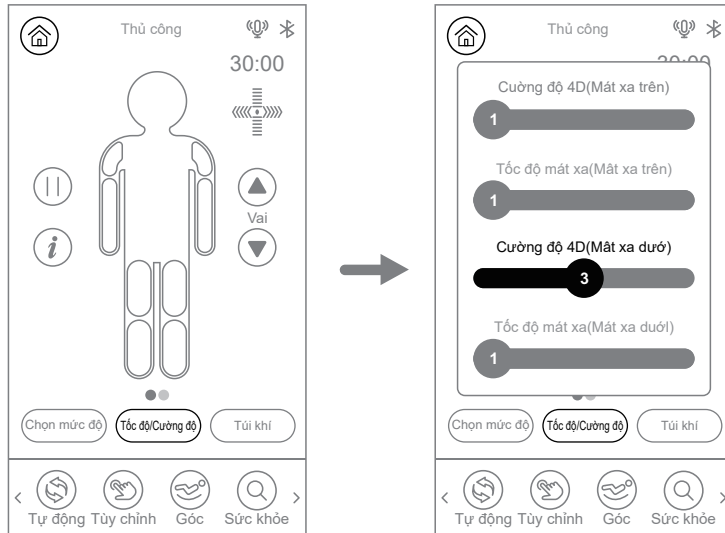


Trang chủ - Cường độ 4D (Massage thấp hơn) Hiển thị cường độ

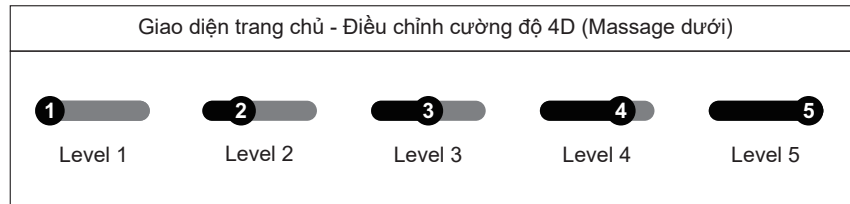


Phím	Mô tả
	Nhấn và giữ nút trượt và trượt sang phải để tăng cường độ 4D. Có thể điều chỉnh 1-5 mức cường độ.
	Nhấn và giữ nút trượt để trượt sang trái để giảm cường độ 4D, có thể điều chỉnh 1-5 mức cường độ.

Hướng dẫn vận hành

8.3. Tốc độ massage (Massage phía trên): Sau khi vào giao diện "Cường độ/Tốc độ", như hình minh họa bên dưới, chọn nút trượt "Tốc độ massage (Massage phía trên)" và trượt sang trái, phải để điều chỉnh tốc độ massage. Có 5 mức tốc độ để điều chỉnh, trong đó 1 là chậm nhất và 5 là nhanh nhất. Tốc độ không thể điều chỉnh khi kỹ thuật massage đã dừng

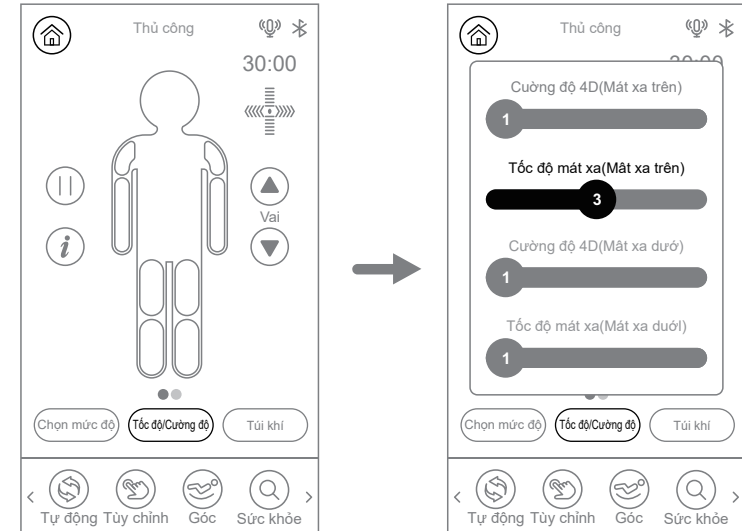


Trang chủ - Tốc độ massage (Massage phía trên) Hiển thị tốc độ

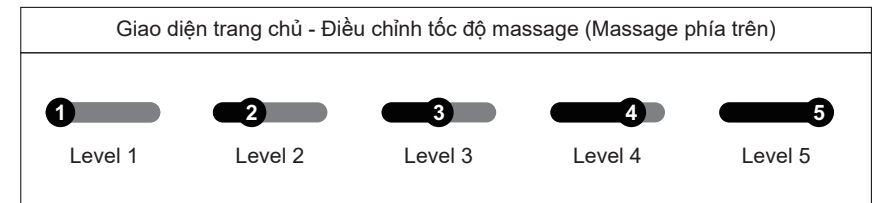

Phím	Mô tả
	Nhấn và giữ phím trượt và trượt sang phải để tăng tốc độ massage. Có thể điều chỉnh tốc độ từ 1-5 cấp độ
	Nhấn và giữ phím trượt và trượt sang trái để giảm tốc độ massage. Có thể điều chỉnh tốc độ từ 1-5 cấp.

Hướng dẫn vận hành


8.4. Tốc độ massage (Massage phía trên): Sau khi vào giao diện "Cường độ/Tốc độ", như hình minh họa bên dưới, chọn nút trượt "Tốc độ massage (Massage phía trên)" và trượt sang trái, phải để điều chỉnh tốc độ massage. Có 5 mức tốc độ để điều chỉnh, trong đó 1 là chậm nhất và 5 là nhanh nhất. Tốc độ không thể điều chỉnh khi kỹ thuật massage đã dừng..

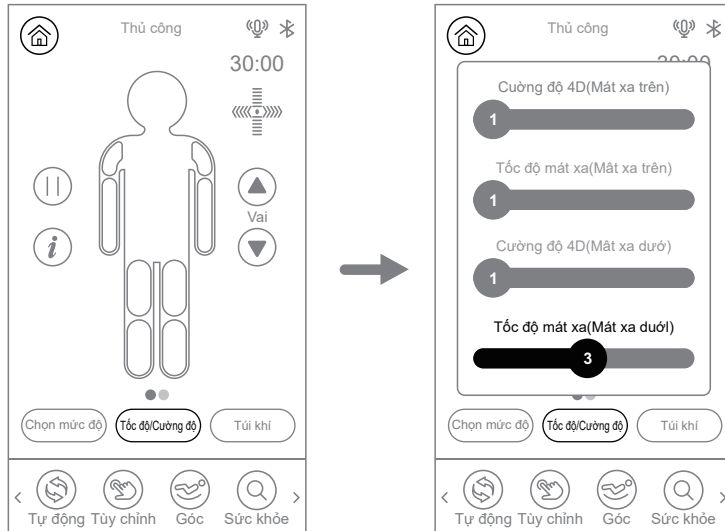

Trang chủ - Tốc độ massage (Massage phía trên) Hiển thị tốc độ

Hướng dẫn vận hành

9. Massage áp lực khí: Trong giao diện "Trang chủ", như minh họa trong hình bên dưới, nhấp vào phím "Massage áp lực khí", sau đó chọn chức năng massage áp lực khí tương ứng trong giao diện bật lên tùy theo nhu cầu massage của bạn. Các chế độ massage áp lực khí bao gồm tắt, thân trên, thân dưới, toàn thân và điều chỉnh cường độ áp lực khí. Tất sẽ tắt tất cả các chức năng massage áp lực khí

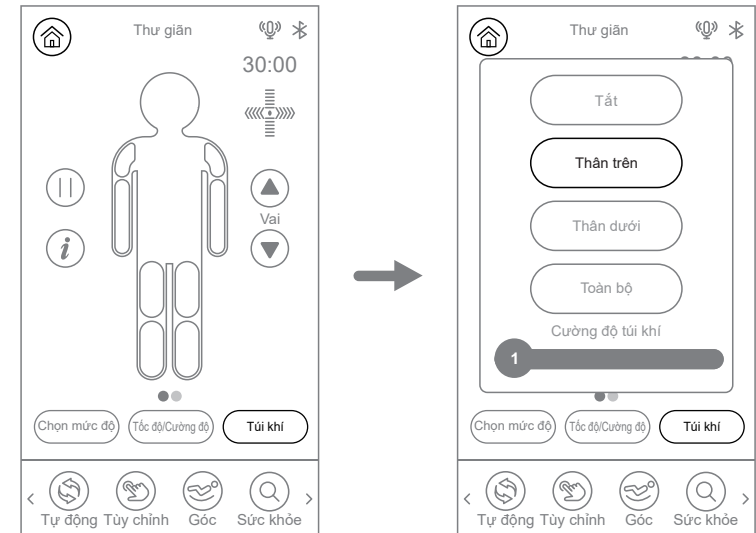

Giao diện trang chủ - sơ đồ massage áp suất không khí


Home page interface - Massage speed(Massage upper) speed adjustment				
Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Key	Description
	Press and hold the sliding key and slide to the right to increase the massage speed. There are 1-5 levels speed adjustable.
	Press and hold the sliding key and slide to the left to down the massage speed. There are 1-5 levels speed adjustable.

Phím	Mô tả
	Nhấn phím này để tắt chức năng áp suất không kh.
	Nhấn phím này để kích hoạt chức năng massage khí cho phần thân trên.
	Nhấn phím này để kích hoạt chức năng massage khí cho phần thân dưới.
	Nhấn phím này để kích hoạt chức năng massage toàn thân bằng khí.

Hướng dẫn vận hành

9.1. Đường độ áp suất khí: Sau khi vào giao diện "Massage khí", như hình minh họa bên dưới, sau khi chức năng massage áp suất khí được bật trong cửa sổ bật lên, bạn có thể trượt thanh trượt "Cường độ áp suất khí" sang trái và phải để điều chỉnh cường độ theo nhu cầu massage của mình. Có 5 mức điều chỉnh cường độ, mức 1 biểu thị cường độ yếu nhất và mức 5 biểu thị cường độ mạnh nhất.

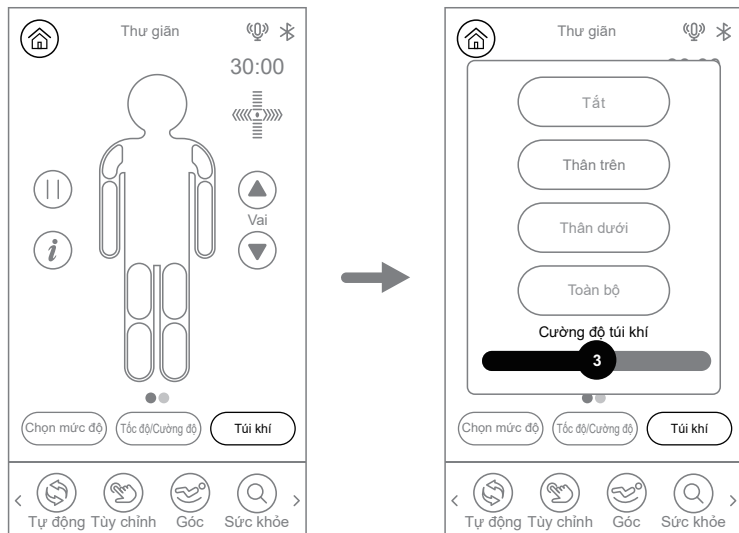

Giao diện trang chủ-biểu đồ cường độ áp suất không khí

Giao diện trang chủ-điều chỉnh cường độ áp suất không khí



Phím	Mô tả
	Nhấn và giữ phím trượt và trượt sang phải để tăng cường độ áp suất không khí. Có 1-5 mức cường độ có thể điều chỉnh..
	Nhấn và giữ phím trượt và trượt sang trái để giảm cường độ áp suất không khí. Có thể điều chỉnh cường độ từ 1-5 mức.

Hướng dẫn vận hành

III. Chế độ tự động (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi bật ghế)

Nhấp vào nút "Tự động" trên thanh menu ở cuối màn hình (như hình bên dưới) để vào giao diện chức năng tự động, sau đó chọn chức năng massage tự động ở các cảnh khác nhau tùy theo nhu cầu massage của bạn.


2. Có 18 chức năng tự động để lựa chọn, được phân loại thành bốn chế độ massage chính.

2.1. Dành riêng cho gia đình: Thư giãn toàn diện, Massage Trung Quốc, Giảm đau cơ, Cân bằng cơ thể, Massage Thái

2.2. Thư giãn và kích hoạt: Kéo giãn toàn thân, Chăm sóc cổ và vai, Kéo giãn cột sống, Thư giãn chân và bàn chân, Tận hưởng tuyệt vời

2.3. AI thông minh: Tổng thống thoải mái, giữ dáng, chế độ văn phòng, nạp lại sức khỏe, tăng cường năng lượng

2.4. Thư giãn toàn diện: Nghỉ trưa, Spa lưng, Giấc mơ ngọt ngào

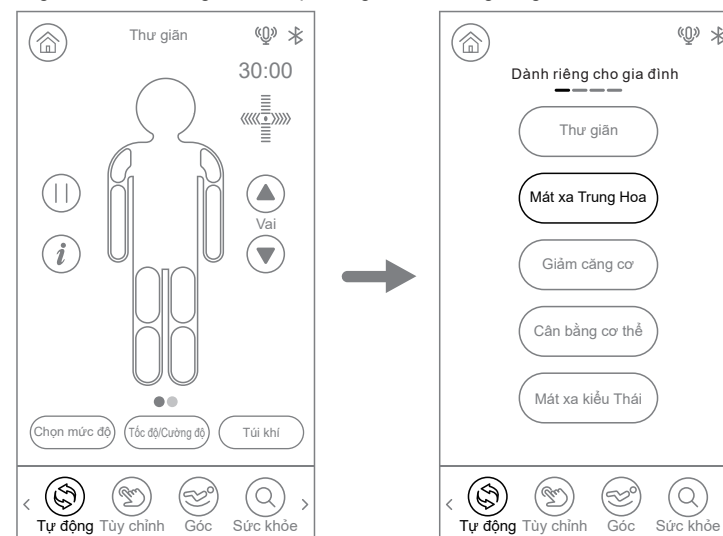

Sơ đồ lựa chọn chế độ tự động

Mát-xa (Độc quyền dành cho gia đình)

Chức năng	Mô tả
Thư giãn	Với sự hỗ trợ của thanh dẫn hướng linh hoạt, giúp cơ thể nghiêng về tư thế nằm thẳng; với khả năng chống cong vẹo cột sống hiệu quả của chuyển động 4D về phía lưng, đạt được hiệu quả kéo giãn không áp lực, giảm đau cơ thất lưng hiệu quả và loại bỏ mệt mỏi, mang lại trải nghiệm massage tốt hơn, giải tỏa căng thẳng cho cơ thể và tinh thần. Lưu ý: Có nhạc nền, có thể bật hoặc tắt thông qua tùy chọn Nhắc nhở bằng giọng nói trong phần cài đặt..

Hướng dẫn vận hành

Massage Trung Quốc	Sử dụng kỹ thuật massage y học cổ truyền Trung Quốc, massage 4D vùng lưng và eo, thúc đẩy tuần hoàn máu vùng lưng và eo, làm dịu kinh lạc và thông thoáng vùng lưng và eo. Thích hợp cho người bị đau lưng, eo và căng cơ thắt lưng. Cường độ massage nhẹ nhàng
Giảm đau cơ	Áp dụng kỹ thuật xoa bóp, vỗ nhẹ và ấn ngón tay sâu vào vùng cổ, lưng, eo, hông và chân, chủ yếu để giảm mệt mỏi cơ thể, giúp cơ thể thư giãn hơn. Lưu ý: Có nhạc nền, có thể bật hoặc tắt thông qua tùy chọn Nhắc nhở bằng giọng nói trong phần cài đặt.
Cân bằng cơ thể	Chủ yếu áp dụng massage khí toàn phần, kết hợp với việc sử dụng túi khí để tuần hoàn máu, xoa bóp và ấn huyết, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau nhức các bộ phận trên cơ thể, giảm mệt mỏi cơ bắp. (Ghi chú: chủ yếu áp dụng massage khí toàn phần, kết hợp với động tác massage khí thường xuyên)
Massage Thái	Chủ yếu sử dụng thanh đẩy điện ở bắp chân và lưng để kẹp chân, tay và vai với sự hỗ trợ của massage khí, sau đó thực hiện massage kéo giãn, đồng thời chuyển động giữ chặt lưng và eo để massage y tế 4D, giúp cơ thể ở trạng thái kéo giãn kiểu Thái. Thích hợp cho những người bị căng thẳng cao độ, giúp cải thiện tư thế đầu cúi xuống ngực và lưng gù. Cường độ massage mạnh mẽ. Lưu ý: Có nhạc nền, có thể bật hoặc tắt thông qua tùy chọn Nhắc nhở bằng giọng nói trong cài đặt.

massage (Thư giãn và Kích hoạt)	
Chức năng	Mô tả
Kéo giãn toàn thân	Bằng cách chủ yếu là nhào, vỗ, ấn ngón tay và các kỹ thuật massage y tế, kẹp chặt chân, tay và vai với sự hỗ trợ của massage bằng khí, sau đó thực hiện massage kéo giãn để làm dịu kinh lạc, thúc đẩy lưu thông máu, giải tỏa tắc nghẽn trong cơ thể..
Chăm sóc cổ và vai	Massage cổ và vai chủ yếu bằng các kỹ thuật xoa bóp và kéo giãn, và massage y học vùng lưng trên, sau đó ấn huyết Kiên Kinh để giảm thoái hóa đốt sống cổ và đạt hiệu quả thư giãn cơ cổ và vai. Cường độ massage nhẹ nhàng, phù hợp với người làm việc văn phòng và bị mỏi cổ. Lưu ý: Có nhạc nền, có thể bật hoặc tắt bằng tùy chọn Nhắc nhở bằng giọng nói trong phần cài đặt.

Hướng dẫn vận hành

Kéo giãn cột sống	Massage eo chủ yếu bằng cách nhào, vỗ và massage y tế, trong khi chuyển động giữ chặt vào lưng và eo để massage y tế 4D, nhằm giảm đau cột sống thắt lưng; kết hợp với cấu hình nhiệt điều chỉnh nhiệt độ xung quanh eo, duy trì nhiệt độ thoải mái để mang lại trải nghiệm massage ấm áp; với cường độ massage nhẹ nhàng và vừa phải và nhiệt độ thoải mái, mang lại trải nghiệm massage ấm áp.
Giảm đau chân và bàn chân	Massage vai và eo chủ yếu bằng cách nhào, vỗ, nhào và vỗ, áp dụng massage khí vào chân và bàn chân để massage bóp, cho phép massage chân và bàn chân nhẹ nhàng hơn, thích hợp cho những người ít vận động có ít căng thẳng ở chân và bàn chân, không chỉ làm giảm đau cột sống cổ, cột sống thắt lưng của những người ít vận động mà còn làm dịu chân và bàn chân. Cường độ massage nhẹ nhàng.
Massage khí toàn thân	Massage khí toàn thân, kết hợp với con lăn chân và massage bắp chân. Chức năng kéo giãn bắp chân được loại bỏ, phù hợp cho người cao tuổi và người bị đau lưng. Cường độ massage nhẹ nhàng..

massage (AI thông minh)	
Chức năng	Mô tả
Chế độ chủ tịch	Massage vai, cổ, lưng và eo chủ yếu bằng cách nhào, vỗ, nhào và vỗ, giúp giảm mệt mỏi, thúc đẩy lưu thông máu và giải tỏa căng thẳng. Sản phẩm phù hợp cho nam giới, cường độ massage vừa phải..
Giữ dáng	Massage vai, cổ, eo và hông bằng kỹ thuật xoa bóp và ấn ngón tay, massage toàn thân, giúp thư giãn cơ thể và tinh thần, tận hưởng liệu pháp massage đẳng cấp nữ hoàng. Phù hợp cho phụ nữ, cường độ massage nhẹ nhàng.
Chế độ văn phòng	Massage vai, cổ và eo chủ yếu bằng các kỹ thuật xoa bóp, day ấn, day ấn và day ấn, giúp giảm đau vai và cổ, cải thiện tình trạng đau nhức cơ thắt lưng và duy trì cột sống thắt lưng thông qua massage sâu. Sản phẩm phù hợp với nhân viên văn phòng và người ít vận động, cường độ massage vừa phải..
Phục hồi sức khỏe	Massage sâu toàn thân bằng các kỹ thuật nhào, vỗ và ấn ngón tay, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu khắp cơ thể và ngăn ngừa cục máu đông. Thích hợp cho những người sống ở nhà lâu ngày và không thích ra ngoài, cường độ massage nhẹ nhàng vừa phải

Hướng dẫn vận hành

Tăng cường năng lượng	Massage eo, vai và cổ bằng các kỹ thuật nhào, vỗ, nhào và vỗ, để đánh thức năng lượng sống của cơ thể, kích thích năng lượng thể chất thông qua việc massage sâu toàn bộ cơ thể với cường độ massage mạnh, phù hợp với những người bị căng thẳng mạnh như vận động viên, để kích thích tiềm năng trước khi thi đấu. Lưu ý: Có nhạc nền, có thể bật hoặc tắt thông qua tùy chọn Nhắc nhở bằng giọng nói trong phần cài đặt.
-----------------------	--

massage (Thư giãn toàn diện)	
Chức năng	Mô tả
Nghỉ trưa	Massage lưng và eo bằng kỹ thuật xoa bóp và vỗ nhẹ, đồng thời ấn huyết Thần Ngũ, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ trưa, giúp người dùng tràn đầy năng lượng hơn cho công việc buổi chiều. Sản phẩm phù hợp cho nhân viên văn phòng, cường độ massage nhẹ nhàng. Lưu ý: Có nhạc nền, có thể bật hoặc tắt thông qua tùy chọn Nhắc nhở bằng giọng nói trong phần cài đặt..
Spa lưng	Massage toàn thân sâu bằng cách ấn vào các huyết đạo liên quan bằng cách nhào, vỗ, ấn ngón tay và các kỹ thuật massage khác, để kích thích tiếp cận hoàn toàn đến lớp mô cơ sâu, cảm thấy ấm áp tại chỗ kết hợp với chức năng chườm nóng, điều hòa khí huyết để đạt được hiệu quả ấm áp và tổng xuất ẩm ướt. (Lưu ý: massage toàn thân kết hợp với chườm nóng)
Giấc mơ ngọt ngào	Massage vai, cổ, lưng và eo bằng các kỹ thuật xoa bóp và massage y học, đồng thời ấn huyết Phong Trì và Thần Ngũ, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ giấc ngủ. Sản phẩm phù hợp cho những người khó ngủ, cường độ massage nhẹ nhàng. Lưu ý: Có nhạc nền, có thể bật hoặc tắt thông qua tùy chọn Nhắc nhở bằng giọng nói trong phần cài đặt..

IV. Chương trình từ xa (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi bật thiết bị)


Nhấp vào nút "Thủ công" trên thanh menu ở cuối màn hình (như hình bên dưới) để vào menu thủ công. Bạn có thể chọn một trong ba loại chức năng massage thủ công tùy theo nhu cầu massage của mình.

1. Kỹ thuật massage: bao gồm lựa chọn kỹ thuật massage cơ chế trên (cường độ 4D, tốc độ massage, độ rộng massage cũng có thể điều chỉnh); lựa chọn kỹ thuật massage cơ chế dưới (cường độ 4D, tốc độ massage cũng có thể điều chỉnh).

1.1. Phạm vi massage: bao gồm phạm vi massage của đầu massage trên và điều chỉnh phạm vi massage của đầu massage dưới.


Hướng dẫn vận hành

1.2. Bộ điều khiển: bao gồm điều chỉnh bộ điều khiển cơ cấu trên và điều chỉnh bộ điều khiển cơ cấu dưới.

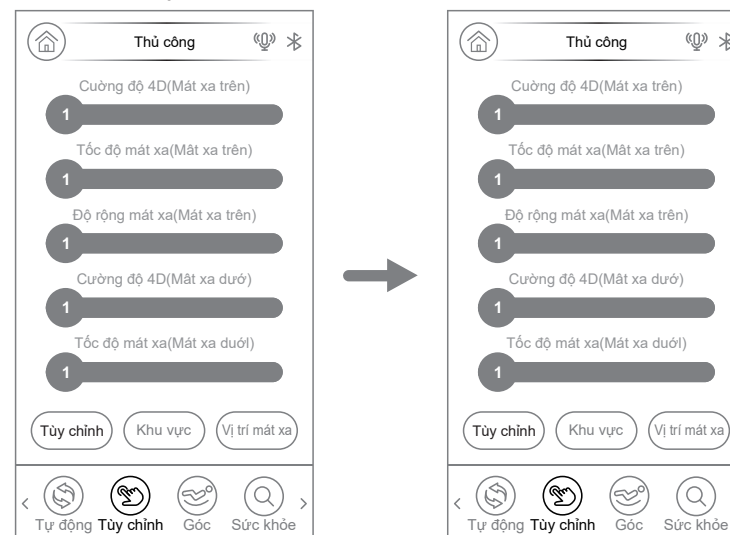

Chế độ thủ công - sơ đồ lựa chọn kỹ thuật


2. Kỹ thuật massage: Sau khi vào giao diện thủ công, Như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút "Thủ công" và chọn chức năng massage "Massage phần trên" hoặc "Massage phần dưới" theo nhu cầu của bạn trong cửa sổ bật lên.

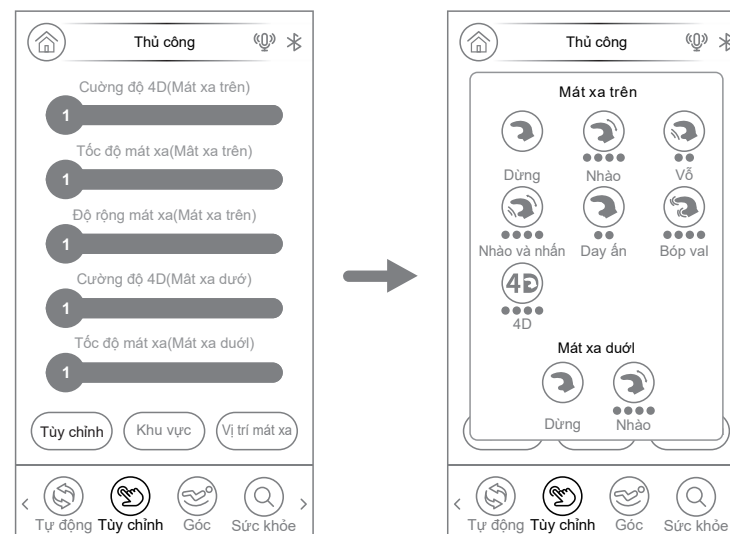

Chế độ thủ công - Sơ đồ lựa chọn massage phần trên hoặc massage phần dưới

Hướng dẫn vận hành

2.1. Massage phần trên: Sau khi vào giao diện kỹ thuật massage như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút biểu tượng "kỹ thuật" của cơ chế phía trên để thực hiện massage thủ công, bao gồm Dừng (tổng cộng 4 kỹ thuật), Nhào (tổng cộng 2 kỹ thuật), Nhào & Chạm (tổng cộng 4 kỹ thuật), Shiatsu (tổng cộng 2 kỹ thuật), Nắm (tổng cộng 4 kỹ thuật), 4D (tổng cộng 4 kỹ thuật), tổng cộng có 21 kỹ thuật.

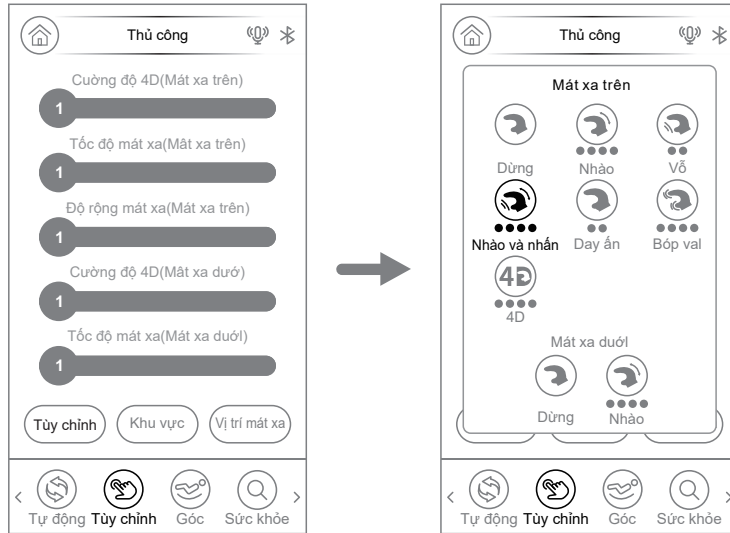


Chế độ thủ công - sơ đồ lựa chọn kỹ thuật massage cơ chế

Chức năng	Điều chỉnh con lăn massage
Dừng	Có thể điều chỉnh độ rộng và cường độ.
Nhào (4 kỹ thuật)	Có thể điều chỉnh tốc độ và cường độ.
Tap(2 kỹ thuật)	Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.
Nhào và Đấm (4 kỹ thuật)	Có thể điều chỉnh tốc độ và cường độ.
Shiatsu (2 kỹ thuật)	Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.
Bóp (4 kỹ thuật)	Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.
4D(1,2 kỹ thuật)	Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.
4D(3,4 kỹ thuật)	Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.

Hướng dẫn vận hành

2.2. Massage lower: After entering the massage technique interface, As shown in the figure below, click the lower mechanism "technique" icon button, to perform manual massage, including no technique, kneading (a total of 4 techniques), a total of 5 techniques to choose from.

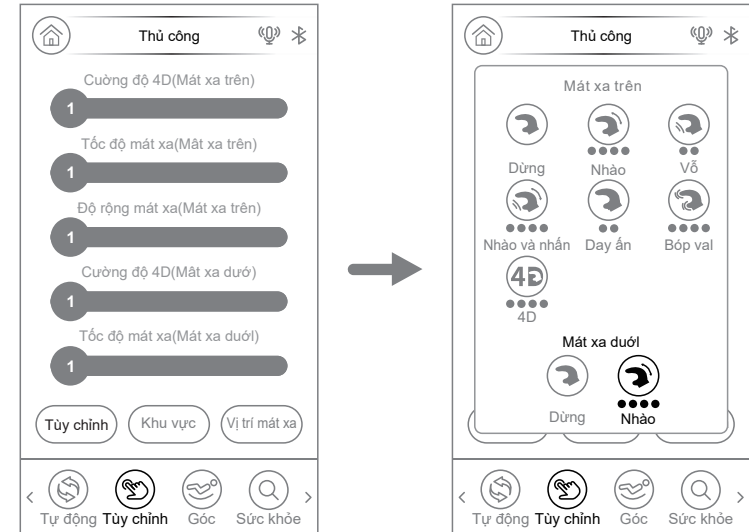

Manual mode - Down mechanism massage technique selection diagram

Chức năng	Điều chỉnh con lăn massage
Dừng	Có thể điều chỉnh được độ rộng và cường độ. 5 mức độ rộng có thể điều chỉnh
Nhào (4 kỹ thuật)	Tốc độ, cường độ có thể được điều chỉnh. Có thể điều chỉnh 5 mức cường độ adjust

Hướng dẫn vận hành

3. Khu vực massage: Sau khi vào giao diện thủ công, Như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút "Khu vực" và chọn chức năng massage ngất quăng "Massage phần trên" hoặc "Massage phần dưới" theo nhu cầu của bạn trong cửa sổ bật lên

3.1. Massage phần trên: Sau khi vào giao diện vùng massage, Như thể hiện trong hình bên dưới, hãy nhấp vào nút biểu tượng "Tên vùng" trên cơ chế phía trên để chọn chức năng massage vùng, bao gồm năm tùy chọn (Điểm, Một phần, Toàn bộ, Trên, Dưới)




hế độ thủ công - Sơ đồ lựa chọn vùng massage cơ chế trên

Phím	Mô tả
Dừng	Massage điểm cố định tại vị trí điểm cố định.
Phần	Massage địa phương quy mô nhỏ qua lại.
Toàn bộ	Massage toàn bộ lưng.
Trên	Massage phần lưng trên qua lại.
Dưới	Massage lưng dưới qua lại.

Hướng dẫn vận hành

3.2. Massage vùng dưới: Sau khi vào giao diện khoảng thời gian massage, Như thể hiện trong hình bên dưới, hãy nhấp vào nút biểu tượng "Tên vùng" của cơ chế phía trên như thể hiện trong hình bên dưới để chọn chức năng massage vùng, bao gồm điểm và một phần.

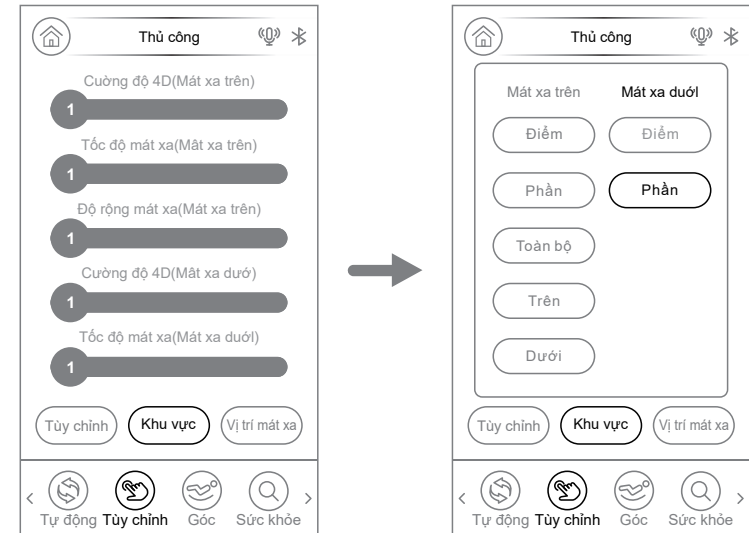


Chế độ thủ công - Sơ đồ lựa chọn vùng massage cơ chế xuống

Phím	Mô tả
Dừng	Massage điểm cố định vị trí cố định
Phần	Massage nhẹ nhàng theo từng vùng nhỏ

Hướng dẫn vận hành

4. Cơ chế: Sau khi vào giao diện thủ công, Như thể hiện trong hình bên dưới, hãy nhấp vào nút "Vị trí massage" và chọn chức năng điều chỉnh vị trí robot massage "Massage trên" hoặc "Massage dưới" theo nhu cầu của bạn trong cửa sổ bật lên.

4.1. Massage phần trên: Sau khi vào giao diện điều chỉnh cơ chế, như hình minh họa bên dưới, nhấn biểu tượng mũi tên "lên" hoặc "xuống" của cơ chế trên để điều chỉnh cơ chế lên xuống. Nhấn nút để cơ chế ngừng di chuyển lên xuống. Việc điều chỉnh cơ chế cần được thực hiện trong phạm vi massage "điểm" và "một phần".

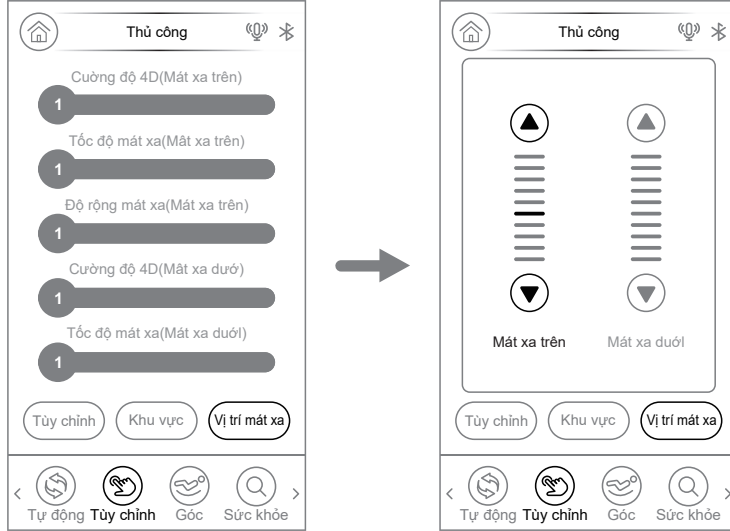


Chế độ thủ công - sơ đồ điều chỉnh cơ chế phía trên

Phím	Mô tả
▲ 	Nhấn và giữ nút trên để tay massage di chuyển lên trên, thả nút để tay massage dừng di chuyển lên trên, tổng cộng có 1-10 mức điều chỉnh
▼	Nhấn và giữ nút dưới để di chuyển xuống, thả nút để dừng di chuyển xuống, tổng cộng có thể điều chỉnh từ 1-10.

Hướng dẫn vận hành

4.2. Massage phần dưới: Sau khi vào giao diện điều chỉnh cơ chế, như hình minh họa bên dưới, nhấn biểu tượng mũi tên "lên" hoặc "xuống" của cơ chế dưới để điều chỉnh cơ chế lên xuống. Thả tay ra để dừng điều chỉnh cơ chế lên xuống. Việc điều chỉnh cơ chế cần được thực hiện trong phạm vi massage điểm.

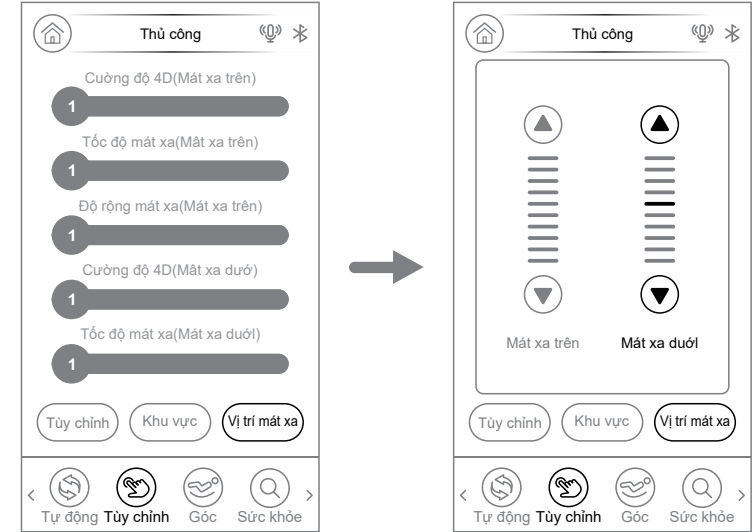

Chế độ thủ công - sơ đồ điều chỉnh cơ cấu hạ xuống

Phím	Mô tả
▲ 	Nhấn và giữ nút trên cùng để massage tay di chuyển lên trên, thả nút để massage tay dừng di chuyển lên trên, tổng cộng có 1-10 mức điều chỉnh.
▼	Nhấn và giữ nút Xuống để di chuyển xuống, thả nút để dừng di chuyển xuống, tổng cộng có thể điều chỉnh Xuống từ 1-10.


Hướng dẫn vận hành

5. Điều chỉnh cường độ 4D: Sau khi vào giao diện thủ công, Như thể hiện trong hình bên dưới, hãy trượt thanh trượt "Cường độ 4D (Massage trên)" hoặc "Cường độ 4D (Massage dưới)" để điều chỉnh cường độ 4D theo nhu cầu massage của bạn.

5.1. Cường độ 4D (Massage phần trên): Chọn thanh trượt "Cường độ 4D (Massage phần trên)" trong giao diện hướng dẫn, sau đó trượt sang trái và phải để điều chỉnh cường độ 4D theo nhu cầu massage của bạn. Cường độ có thể được điều chỉnh từ 1 đến 5 mức, với 1 là yếu nhất và 5 là mạnh nhất. Cường độ 4D càng mạnh, vòng xoay massage càng mạnh và cường độ massage càng lớn.



M Chế độ hàng năm - Cường độ 4D (Massage phần trên) Biểu đồ cường độ

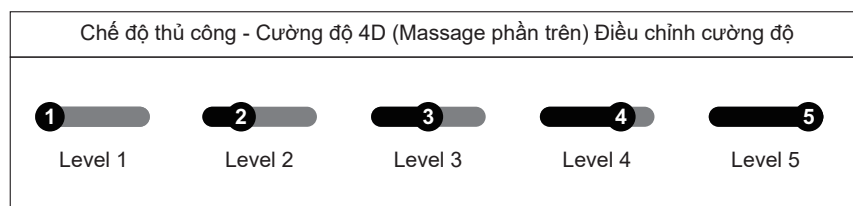


Phím	Mô tả
	Nhấn và giữ nút trượt để trượt sang phải để tăng cường độ 4D, có thể điều chỉnh 1-5 mức cường độ.
	Nhấn và giữ nút trượt để trượt sang trái để giảm cường độ 4D, có thể điều chỉnh 1-5 mức cường độ

Hướng dẫn vận hành

5.2. Cường độ 4D (Massage thấp hơn): Chọn thanh trượt "Cường độ 4D (Massage thấp hơn)" trong giao diện hướng dẫn, sau đó trượt sang trái và phải để điều chỉnh cường độ 4D theo nhu cầu massage của bạn. Cường độ có thể được điều chỉnh từ 1 đến 5 mức, với 1 là yếu nhất và 5 là mạnh nhất. Cường độ 4D càng mạnh, vòng xoay massage càng mạnh và cường độ massage càng lớn.




Chế độ thủ công - Cường độ 4D (Massage thấp hơn) Biểu đồ cường độ

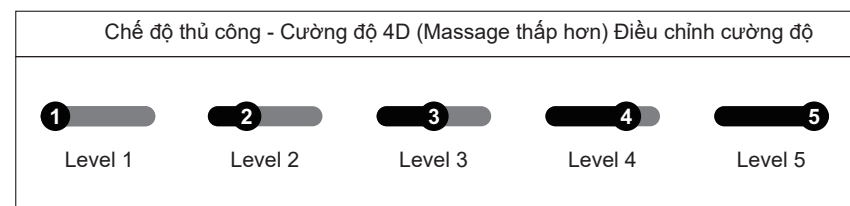

Phím	Mô tả
	Nhấn và giữ nút trượt để trượt sang phải nhằm tăng cường độ 4D, có thể điều chỉnh 1-5 mức cường độ.
	Nhấn và giữ nút trượt để trượt sang trái nhằm giảm cường độ 4D, có thể điều chỉnh 1-5 mức cường độ.

Hướng dẫn vận hành

6. Tốc độ massage: Sau khi vào giao diện thủ công, Như hình minh họa bên dưới, hãy trượt thanh trượt "Tốc độ massage (Massage phía trên)" hoặc "Tốc độ massage (Massage phía trên)" để điều chỉnh tốc độ massage theo nhu cầu massage của bạn.
- 6.1. Tốc độ massage (Massage phần trên): Chọn thanh trượt "Tốc độ massage (Massage phần trên)" trong giao diện hướng dẫn, sau đó trượt sang trái và phải để điều chỉnh tốc độ massage theo nhu cầu massage của bạn. Tốc độ có thể được điều chỉnh từ 1 đến 5 mức, với mức 1 là chậm nhất và mức 5 là nhanh nhất. Tốc độ cần được điều chỉnh cho các kỹ thuật sau: Nhào (tổng cộng 4 kỹ thuật), Vỗ (tổng cộng 2 kỹ thuật), Nhào & Vỗ (tổng cộng 4 kỹ thuật), Shiatsu (tổng cộng 2 kỹ thuật), Nắm (tổng cộng 4 kỹ thuật), 4D (1, 2 kỹ thuật), 4D (3, 4 kỹ thuật).
- 6.1.1. Tốc độ massage phải ở chế độ thủ công và kỹ thuật massage phải được chọn trước khi có thể điều chỉnh tốc độ.

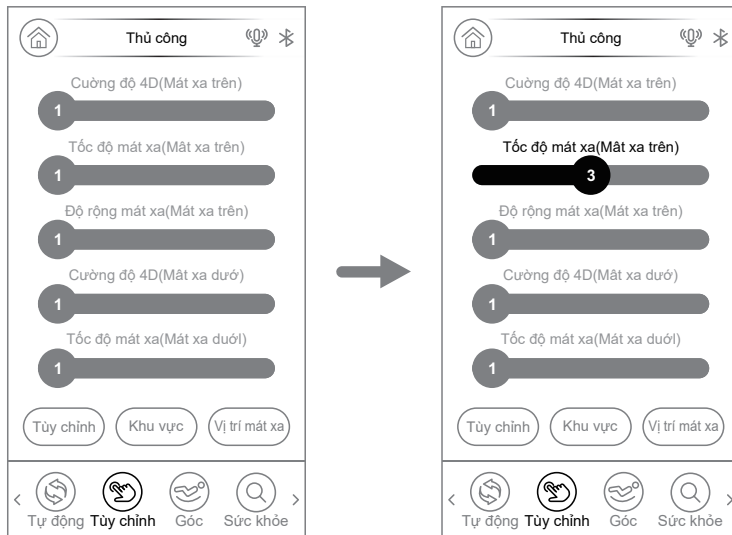

Chế độ thủ công - Biểu đồ tốc độ massage (Massage phía trên)

Chế độ thủ công - Điều chỉnh tốc độ massage (Massage phía trên)				
1	2	3	4	5
Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Phím	Mô tả			
5	Nhấn và giữ nút trượt để trượt sang phải để tăng tốc độ massage, có thể điều chỉnh tốc độ từ 1-5.			
1	Nhấn và giữ nút trượt để trượt sang trái để làm chậm tốc độ massage, có thể điều chỉnh tốc độ từ 1-5.			

Hướng dẫn vận hành

- 6.2. Tốc độ massage (Massage dưới): Chọn thanh trượt "Tốc độ massage (Massage dưới)" trong giao diện hướng dẫn, sau đó trượt sang trái và phải để điều chỉnh tốc độ massage theo nhu cầu massage của bạn. Tốc độ điều chỉnh có 1 đến 5 mức, mức 1 là tốc độ chậm nhất, mức 5 là tốc độ nhanh nhất, và cần điều chỉnh tốc độ trong các kỹ thuật sau: nhào (tổng cộng 4 kỹ thuật).
- 6.2.1. Tốc độ massage phải ở chế độ thủ công và kỹ thuật massage phải được chọn trước khi có thể điều chỉnh tốc độ.



Chế độ thủ công - Biểu đồ tốc độ massage (Massage thấp hơn)


Chế độ thủ công - Điều chỉnh tốc độ massage (Massage thấp hơn)				
1	2	3	4	5
Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Phím	Mô tả			
5	Nhấn và giữ nút trượt để trượt sang phải để tăng tốc độ massage, có thể điều chỉnh tốc độ từ 1-5.			
1	Nhấn và giữ nút trượt để trượt sang trái để giảm tốc độ massage, có thể điều chỉnh tốc độ từ 1-5.			

Hướng dẫn vận hành

7. Độ rộng massage: Sau khi vào giao diện thủ công, Như hình minh họa bên dưới, hãy trượt thanh trượt "Độ rộng massage (Massage upper)" để điều chỉnh độ rộng massage theo nhu cầu massage của bạn.
- 7.1. Độ rộng massage (Massage upper): Chọn thanh trượt "Độ rộng massage (Massage upper)" trong giao diện hướng dẫn, sau đó trượt sang trái và phải để điều chỉnh độ rộng massage theo nhu cầu massage của bạn. Độ rộng massage có thể được điều chỉnh từ 1 đến 5 mức, với mức 1 biểu thị độ rộng hẹp nhất và mức 5 biểu thị độ rộng rộng nhất. Để điều chỉnh độ rộng, vui lòng sử dụng các kỹ thuật massage sau: Stop, Tap (tổng cộng 2 kỹ thuật), Shiatsu (tổng cộng 2 kỹ thuật), 4D (3, 4 kỹ thuật).
- 7.1.1. Độ rộng massage phải ở chế độ thủ công và có thể điều chỉnh độ rộng sau khi chọn kỹ thuật massage.



Chế độ thủ công - Chiều rộng massage (Massage phía trên) Biểu đồ chiều rộng

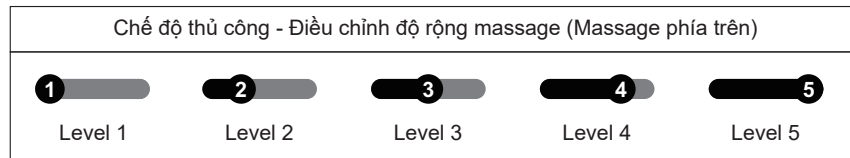


Phím	Mô tả
	Nhấn và giữ phím trượt và trượt sang phải để tăng độ rộng massage. Có thể điều chỉnh độ rộng từ 1-5 mức.
	Nhấn và giữ phím trượt và trượt sang trái để giảm độ rộng massage. Có thể điều chỉnh độ rộng từ 1-5 mức.

Hướng dẫn vận hành

V. Điều chỉnh tư thế ngồi

Click Nhấp vào nút "Góc ngồi" trong menu ở cuối màn hình (như hình bên dưới), vào menu thủ công và điều chỉnh góc ngồi theo nhu cầu massage.s.

Bao gồm các chức năng: rút ngắn chân, duỗi chân, nâng chân, hạ chân, nâng lưng, hạ lưng, nâng bắp chân, hạ bắp chân, không trọng lực I, không trọng lực II và các chức năng massage khác

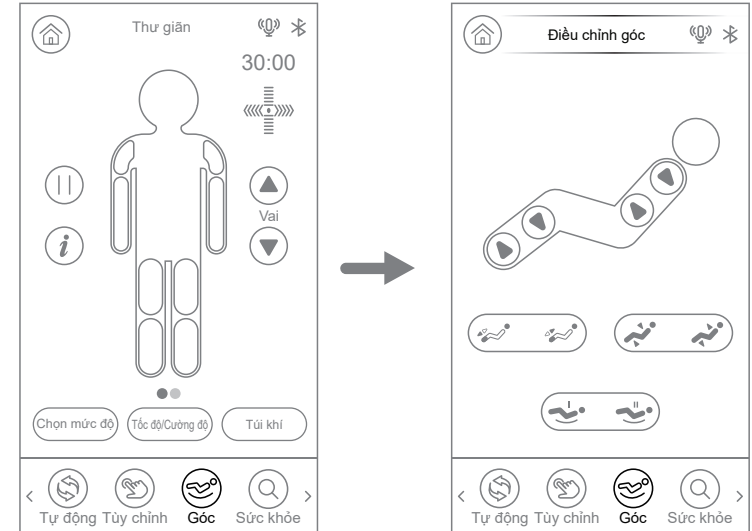

Sơ đồ điều chỉnh tư thế ngồi

1.Điều chỉnh không trọng lực


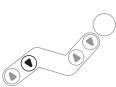
Phím	Mô tả
	Nút Zero Gravity I: Tự động điều chỉnh cơ cấu chân và cơ cấu tựa lưng về vị trí Zero Gravity I. Sau khi hoàn tất hành động Zero Gravity I, cơ cấu chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân..
	Nút Zero Gravity II: Tự động điều chỉnh cơ cấu chân và cơ cấu tựa lưng về vị trí Zero Gravity II. Sau khi hoàn tất chế độ Zero Gravity II, cơ cấu chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân

2. Điều chỉnh chỗ để chân bằng kính thiên văn



Phím	Mô tả
	Nút thu ngắn phần để chân: Điều chỉnh thủ công phần để chân để thu ngắn; nhấn và giữ nút này để từ từ nâng phần để chân lên, và thả ra để dừng. Khi đã đạt đến vị trí giới hạn, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và phát ra âm thanh nhắc nhở "Didi"..
	Phím mở rộng chỗ để chân: Điều chỉnh độ mở rộng của chỗ để chân bằng tay; nhấn và giữ nút này để từ từ di chuyển chỗ để chân xuống dưới, sau đó thả ra để dừng. Khi đã đạt đến vị trí giới hạn, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và phát ra tiếng "Didi".

Hướng dẫn vận hành



3. Điều chỉnh độ dài/ngắn của chân

Phím	Mô tả
	Nút nâng cơ cấu chân: Nhấn và giữ nút này để từ từ nâng cơ cấu chân lên, và thả ra để dừng nâng. Khi đạt đến vị trí giới hạn, quá trình nâng sẽ dừng lại và phát ra âm thanh nhắc nhở "Didi". Sau khi cơ cấu chân hoàn tất quá trình nâng, cơ cấu bàn chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân..
	Nút hạ cơ cấu chân: Nhấn và giữ nút này để từ từ hạ cơ cấu chân xuống và thả ra để dừng hạ xuống; khi điều chỉnh đến vị trí giới hạn, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và phát ra âm thanh nhắc nhở "Didi"; sau khi hoàn tất quá trình hạ cơ cấu chân, cơ cấu bàn chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân.

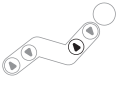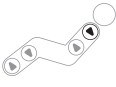4. Điều chỉnh góc của bộ phận tựa lưng

Phím	Mô tả
	Phím Nâng phần tựa lưng: Nhấn và giữ phím này để từ từ nâng phần tựa lưng lên và thả ra để dừng nâng. Khi đã điều chỉnh đến vị trí giới hạn, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và phát ra âm thanh nhắc nhở "Didi"..
	Phím Hạ phần tựa lưng: Nhấn và giữ phím này để từ từ hạ phần tựa lưng xuống và thả ra để dừng hạ. Khi đã đạt đến vị trí giới hạn, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và phát ra âm thanh nhắc nhở "Didi".


5. Điều chỉnh góc nâng liên kết

Phím	Mô tả
 Toàn bộ lên	Nút Liên kết Nâng: Nhấn và giữ nút này để từ từ nâng cơ cấu tựa lưng và từ từ hạ cơ cấu chân. Nhả nút để ngăn cơ cấu tựa lưng nâng lên và cơ cấu chân hạ xuống. Khi đạt đến vị trí giới hạn, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và phát ra âm thanh nhắc nhở "Didi". Sau khi hoàn tất quá trình nâng liên kết, cơ cấu chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân.
 Toàn bộ xuống	Nút hạ liên kết: Nhấn và giữ nút này để từ từ hạ cơ cấu tựa lưng và đồng thời từ từ nâng cơ cấu chân lên; nhả nút để dừng cơ cấu tựa lưng hạ xuống và cơ cấu chân lên; khi điều chỉnh đến vị trí giới hạn, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và phát ra âm thanh nhắc "Didi"; sau khi quá trình hạ liên kết hoàn tất, cơ cấu chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân.


Hướng dẫn vận hành

VI. Phát hiện sức khỏe (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi bật thiết bị)

- Bắt đầu phát hiện sức khỏe: Nhấp vào nút "Sức khỏe" trên thanh menu bên trái màn hình để vào giao diện phát hiện sức khỏe, nhấn nút "Bắt đầu" để thực hiện phát hiện sức khỏe, sau đó nhẹ nhàng đặt ngón trỏ hoặc ngón giữa lên cảm biến. Sau vài giây, dữ liệu nhịp tim, oxy trong máu và vi tuần hoàn sẽ hiển thị theo thời gian thực, chờ quá trình phát hiện hoàn tất.

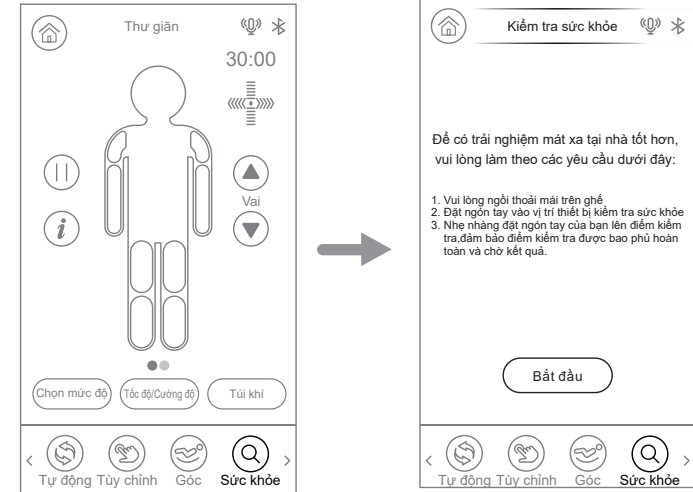


- Chương trình đề xuất: Khi hoàn tất quá trình phát hiện bình thường, máy sẽ hiển thị nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và mức độ mệt mỏi tương ứng. Nồng độ oxy trong máu bình thường dao động từ 95% đến 99%. Các mức độ mệt mỏi bao gồm Tốt, Nhẹ, Trung bình và Nặng. Dựa trên mức độ mệt mỏi của bạn, một chương trình tự động sẽ được đề xuất cho bạn. Chọn "Có" để bắt đầu sử dụng chương trình đề xuất và "Không" để trở về trạng thái massage trước khi phát hiện sức khỏe..

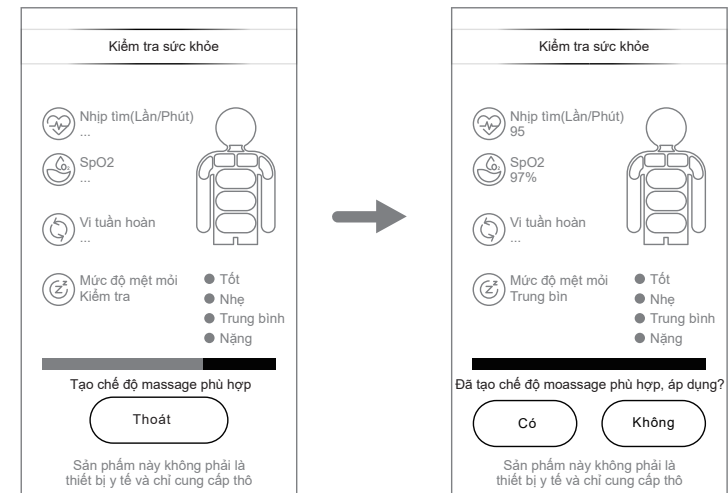

Hướng dẫn vận hành


- Không phát hiện dữ liệu hợp lệ: Nếu không phát hiện dữ liệu hợp lệ, người dùng sẽ được nhắc hỏi có muốn phát hiện lại hay không. Chọn "Có" để khởi động lại quá trình phát hiện sức khỏe, và "Không" để thoát khỏi quá trình phát hiện và trở về trạng thái mát-xa trước khi phát hiện sức khỏe..
- Thoát khỏi chế độ phát hiện sức khỏe: Trong quá trình phát hiện sức khỏe, nhấn phím "Thoát" để thoát khỏi chế độ phát hiện và trở về trạng thái massage trước khi phát hiện sức khỏe.

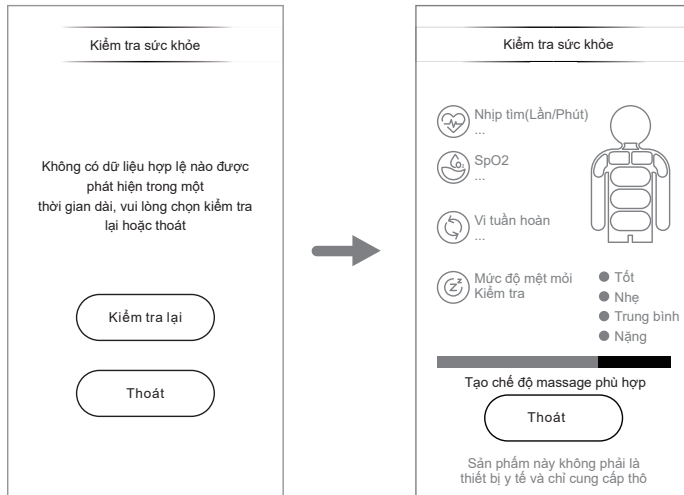

VII. Bộ nhớ (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi bật ghế)


Nhấp vào nút "Bộ nhớ" trên thanh menu bên dưới màn hình hiển thị (như hình dưới đây) để vào giao diện lựa chọn bộ nhớ, tại đó bạn có thể lựa chọn chức năng bộ nhớ theo nhu cầu massage của mình.

- Chức năng lưu trữ chủ yếu được chia thành hai loại: "Lưu trữ và Gọi lại". Mỗi loại có ba nhóm lựa chọn chế độ..

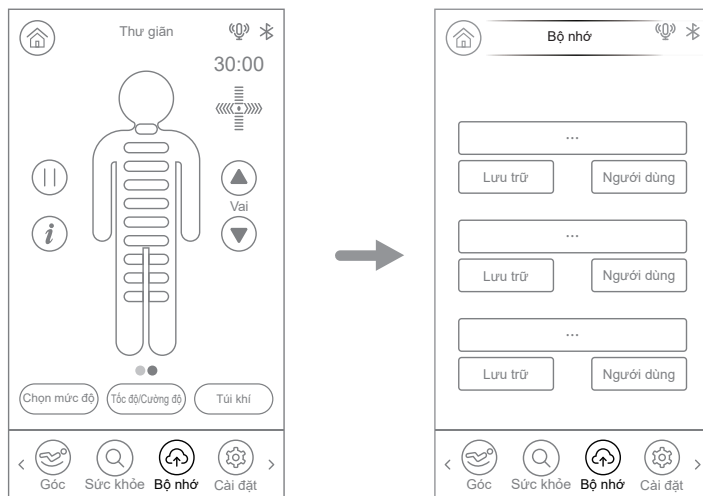


Hướng dẫn vận hành

- Không phát hiện dữ liệu hợp lệ: Nếu không phát hiện dữ liệu hợp lệ, người dùng sẽ được nhắc hỏi có muốn phát hiện lại hay không. Chọn "Có" để khởi động lại quá trình phát hiện sức khỏe, và "Không" để thoát khỏi quá trình phát hiện và trở về trạng thái mát-xa trước khi phát hiện sức khỏe..

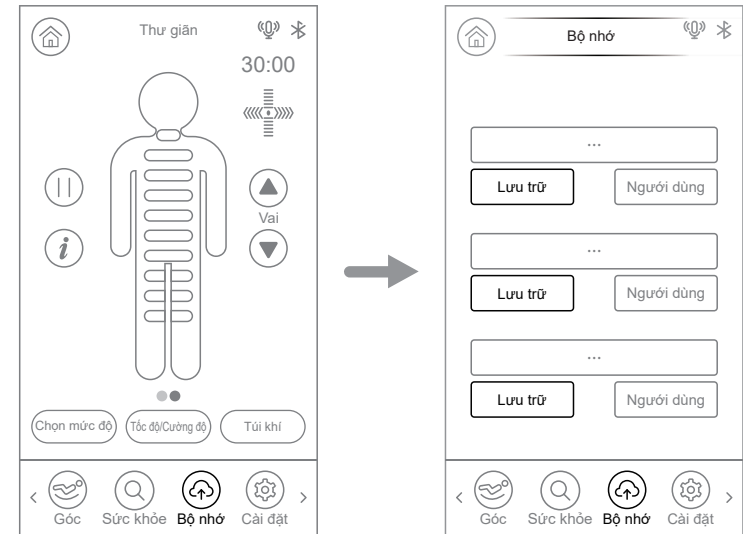

- Gọi lại: Sau khi vào giao diện lưu trữ, hãy nhấp vào bất kỳ nút "Gọi lại I, Gọi lại II, Gọi lại III" nào như trong hình bên dưới để gọi chương trình massage đã lưu trữ; bao gồm chức năng tự động, chức năng thủ công, chế độ áp suất không khí và chức năng massage cường độ, cũng như điều chỉnh góc ghế massage và các chức năng massage khác.

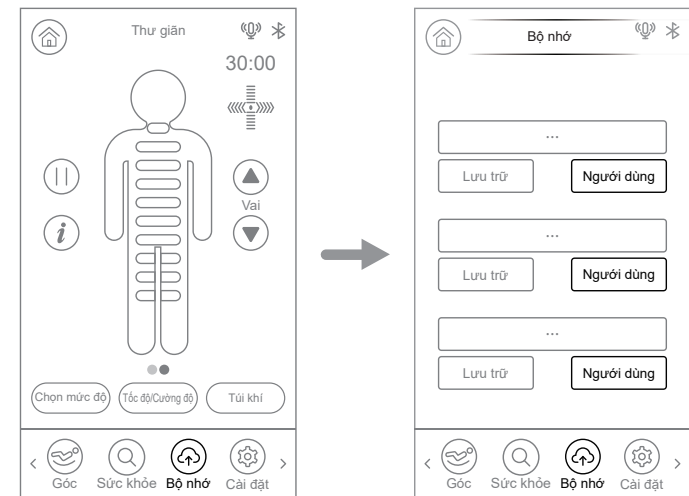

Hướng dẫn vận hành


VIII. Cài đặt (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi bật ghế)

Nhấp vào nút "Cài đặt" trên thanh menu bên dưới màn hình hiển thị (như hình dưới) và hệ thống sẽ vào giao diện cài đặt. Sau đó, bạn có thể chọn các chức năng cài đặt hệ thống theo nhu cầu massage của mình.


1. Chức năng cài đặt chủ yếu được chia thành hai loại

1.1. Thông tin sản phẩm: model sản phẩm, số sê-ri sản phẩm, phiên bản phần mềm

1.2. Cài đặt hệ thống: Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, nhạc nền, âm lượng, thiết lập lại ghế massage, mức tiêu thụ điện năng thấp, lựa chọn ngôn ngữ và các chức năng cài đặt hệ thống khác.

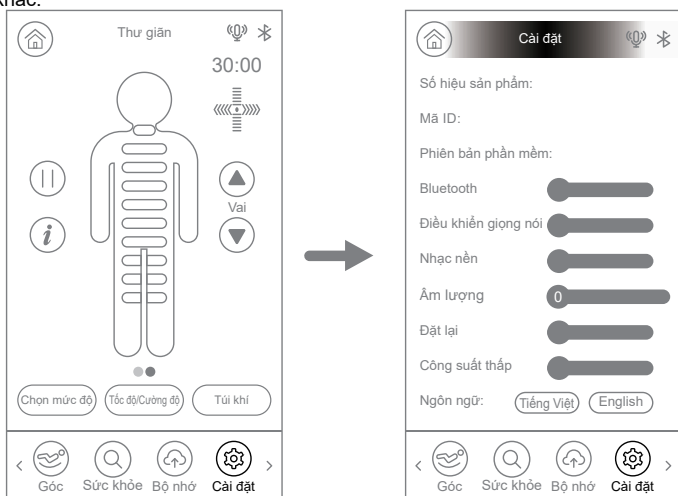


2. Thông tin sản phẩm: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình dưới đây, bạn có thể xem số sản phẩm, mã ID, phiên bản phần mềm và các thông tin khác

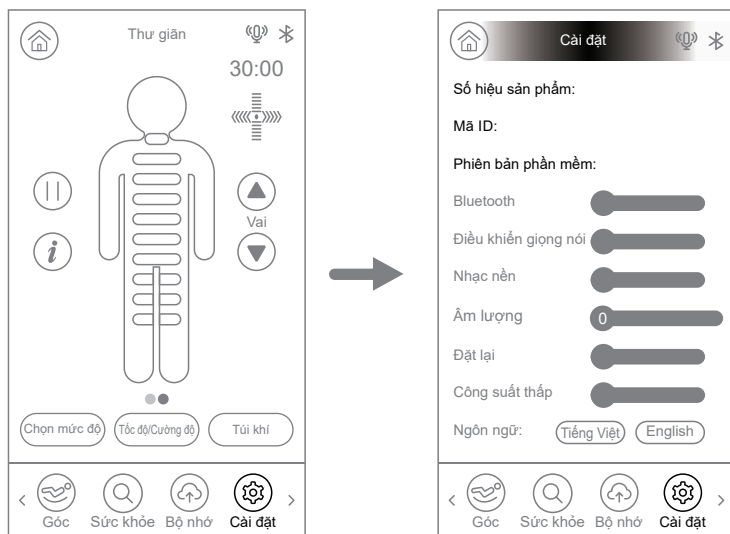

Hướng dẫn vận hành

3. Bluetooth: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút chuyển đổi "Bluetooth" để bật hoặc tắt chức năng Bluetooth. Sau khi bật chức năng Bluetooth, thiết bị nguồn âm thanh có chức năng Bluetooth (như điện thoại di động, máy tính bảng MID, v.v.) có thể được ghép nối và kết nối với mô-đun Bluetooth của ghế massage, và nhạc phát ra từ thiết bị nguồn âm thanh có thể được truyền không dây đến hệ thống âm thanh của ghế massage thông qua Bluetooth để phát nhạc..

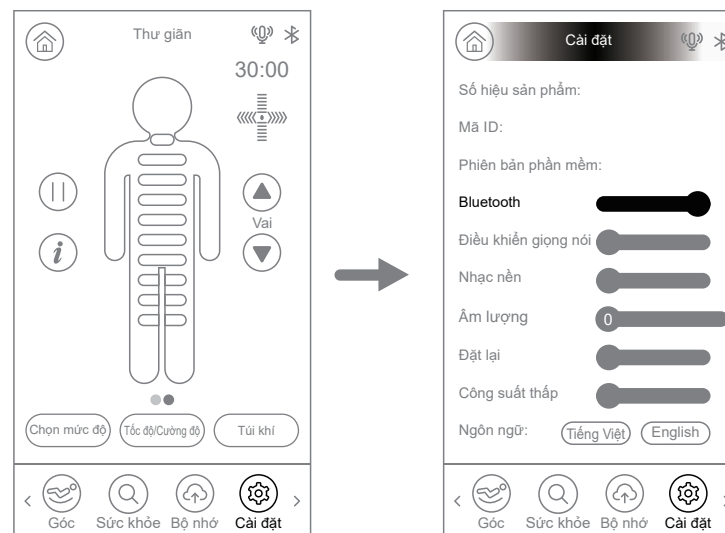


3.1. Vào menu chính của thiết bị thông minh. Mở "Cài đặt" và chọn tùy chọn "Bluetooth"., Mở "Bluetooth", Bluetooth sẽ tự động "Tìm kiếm thiết bị Bluetooth mới".

3.2. Thiết bị thông minh sẽ tìm kiếm model Bluetooth tương ứng (ví dụ: MCB-909-XXXX). Nhấp vào nút "Kết hợp". Nếu được hỏi có muốn kết hợp với thiết bị hay không, bạn chỉ cần chọn "Kết hợp" để hoàn tất quá trình kết hợp.

3.3. Bật "Trình phát nhạc" trên thiết bị thông minh và chọn bài hát để phát.

Hướng dẫn vận hành

4. Điều khiển bằng giọng nói: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút chuyển đổi "Điều khiển bằng giọng nói" để bật hoặc tắt chức năng điều khiển bằng giọng nói. Sau khi bật chức năng điều khiển bằng giọng nói, bạn có thể điều khiển ghế massage bằng giọng nói theo nội dung nhập bằng giọng nói..

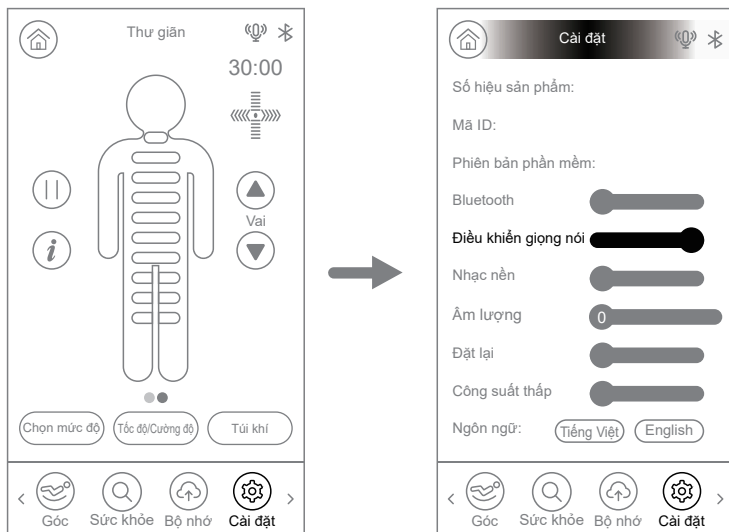


- 4.1. Khi ghế massage đang bật hoặc ở chế độ chờ, hãy đến gần vị trí tay vịn bên phải để nói "Hi Alice" hoặc "Hey Alice" để đánh thức trợ lý giọng nói (Nếu không thể đánh thức, vui lòng vào giao diện cài đặt để kiểm tra xem công tắc điều khiển giọng nói có bật hay không, nếu không, vui lòng bật công tắc điều khiển giọng nói), khi trợ lý giọng nói trả lời "Tôi ở đây" thay mặt cho việc đánh thức, bạn có thể sử dụng chức năng trợ lý điều khiển giọng nói để điều khiển ghế massage..
- 4.2. Bạn cũng có thể nhấn nhanh phím tắt "Giọng nói" trên loa bên trái để đánh thức trợ lý giọng nói và nhấn lâu trong 3 giây để bật hoặc tắt.
- 4.3. Sau khi trợ lý giọng nói được kích hoạt, vui lòng nói lệnh trong vòng 6 giây để kích hoạt chức năng điều khiển ghế massage. Sau khi trợ lý giọng nói phản hồi, bạn có thể tiếp tục nói lệnh. Khoảng thời gian giữa hai lệnh liên kế không được vượt quá 6 giây, nếu không, bạn cần phải kích hoạt lại trợ lý giọng nói. Bảng lệnh thoại chi tiết như sau:
- Lưu ý: Khi kích hoạt chức năng điều khiển giọng nói, tốc độ nói không nên quá nhanh và lệnh thoại nên được đưa ra theo Hướng dẫn nhập lệnh điều khiển bằng giọng nói.

Hướng dẫn vận hành


Nhập điều khiển bằng giọng nói		
Gọi: "Em ơi ". Trả lời: Dạ, thưa chủ nhân		
No.	Điều khiển bằng giọng nói	Trả lời
1	Khởi động	Trả lời: Dạ Boss xin nghe
2	Tắt máy	Trả lời: Vâng ạ, tắt máy
3	Thư giãn	Trả lời: Vâng ạ, Thư giãn
4	Tăng cường năng lượng	Trả lời: Vâng ạ, Tăng cường năng lượng
5	Ngủ ngon	Trả lời: Vâng ạ, Ngủ ngon
6	Cổ vai	Trả lời: Vâng ạ, Cổ vai
7	Nghỉ ngơi	Trả lời: Vâng ạ, Nghỉ ngơi
8	Mát xa kiểu thái	Trả lời: Vâng ạ, Mát xa kiểu thái
9	Túi khí	Trả lời: Vâng ạ, túi khí
10	Tắt túi khí	Trả lời: Vâng ạ, Tắt túi khí
11	Nâng ghế lên	Trả lời: Vâng ạ, Nâng lên
12	Hạ ghế xuống	Trả lời: Vâng ạ, Hạ xuống
13	Đổi vị trí	Trả lời: Vâng ạ
14	Xuống dưới	Trả lời: Vâng ạ, xuống dưới
15	Lên trên	Trả lời: Vâng ạ, lên trên
16	Mạnh lên em	Trả lời: Vâng ạ
17	Nhẹ thôi em	Trả lời: Vâng ạ

Hướng dẫn vận hành

5. Nhạc nền: Sau khi vào giao diện cài đặt, nhấp vào nút chuyển đổi "Nhạc" như trong hình bên dưới để bật hoặc tắt chức năng nhạc nền; sau khi bật nhạc nền, khi người dùng chọn bất kỳ chức năng massage tự động là "Thư giãn hoàn toàn, Phục hồi mệt mỏi, Sóng nhẹ, Tận hưởng tuyệt vời, Nạp lại sức khỏe, Nghỉ trưa, Giấc mơ ngọt ngào", hệ thống sẽ tự động phát nhạc nền.

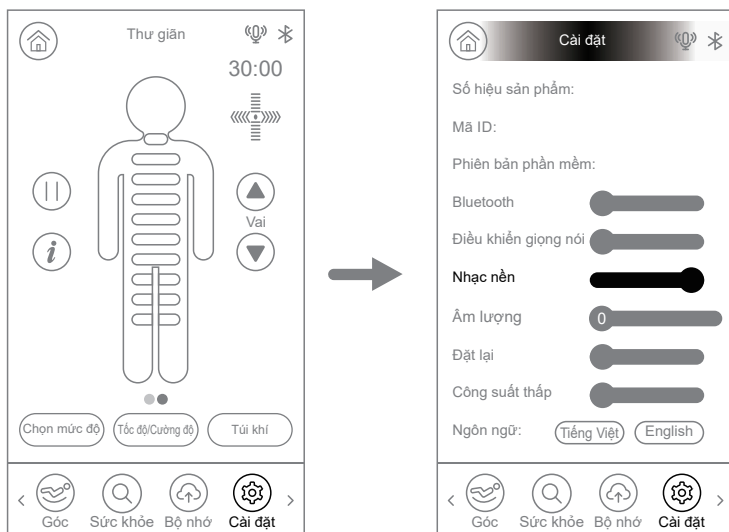


6. Điều chỉnh âm lượng: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút trượt "Âm lượng", nhấn và giữ thanh trượt để trượt sang trái và phải để điều chỉnh âm lượng. Có 0-15 mức âm lượng để cài đặt.

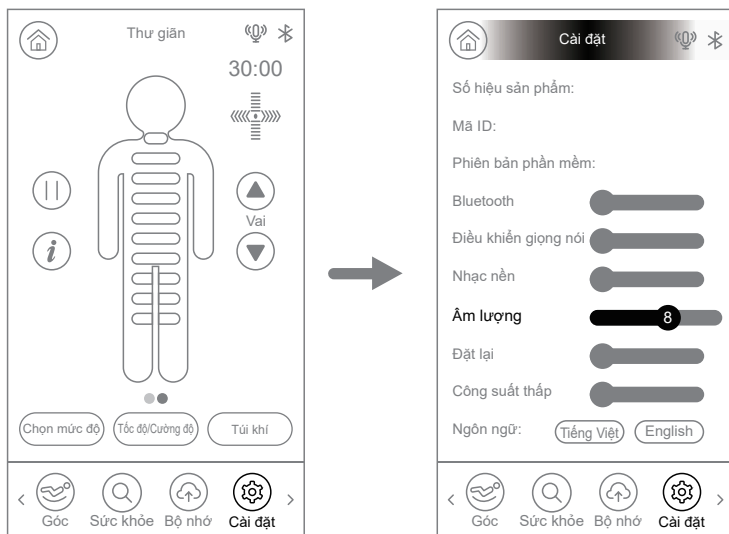


Hướng dẫn vận hành

7. Thiết lập lại ghế massage: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút "Thiết lập lại" để bật hoặc tắt chức năng thiết lập lại ghế massage; sau khi bật chức năng thiết lập lại ghế massage, góc ghế massage sẽ được thiết lập lại sau khi thời gian chạy của ghế massage kết thúc. Nếu tắt chức năng thiết lập lại ghế massage, góc ghế massage sẽ không được thiết lập lại sau khi thời gian chạy của ghế massage kết thúc.

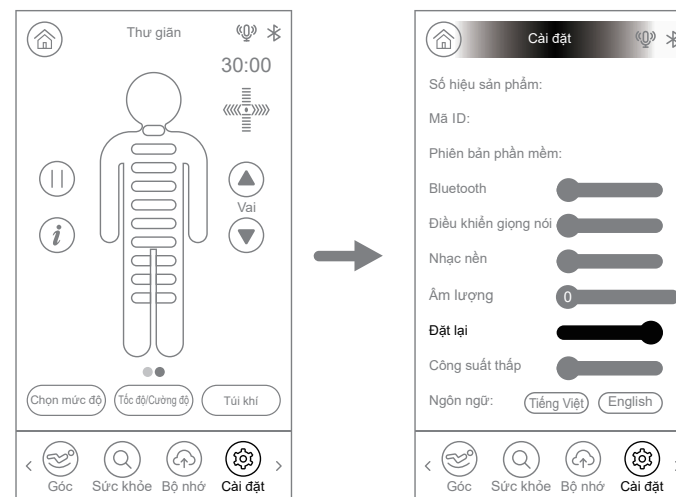


8. Công suất thấp: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút chuyển đổi "Công suất thấp" để bật hoặc tắt chức năng tiêu thụ điện năng thấp. Sau khi bật chức năng tiêu thụ điện năng thấp, ghế massage sẽ chuyển sang trạng thái tiêu thụ điện năng thấp sau khi tắt, và tất cả các chức năng sẽ bị tắt. Chỉ có thể bật bằng nút nguồn trên bộ điều khiển cầm tay.

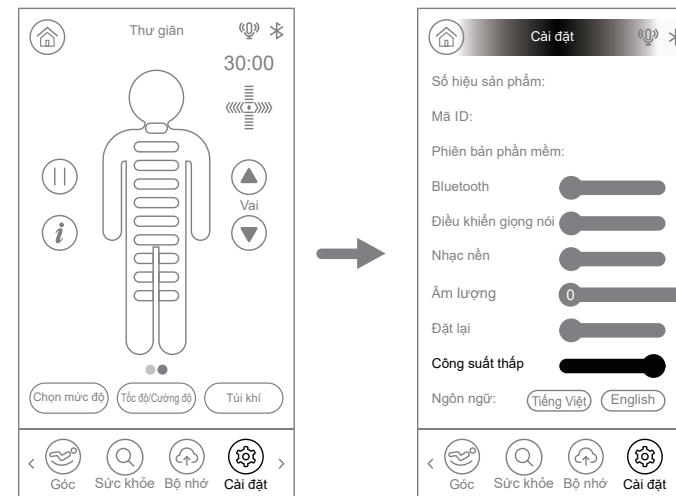

Hướng dẫn vận hành

9. Chọn ngôn ngữ: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, hãy chọn ngôn ngữ khác nhau tùy theo nhu cầu massage. Mặc định là tiếng Việt, có thể chọn tiếng Anh..

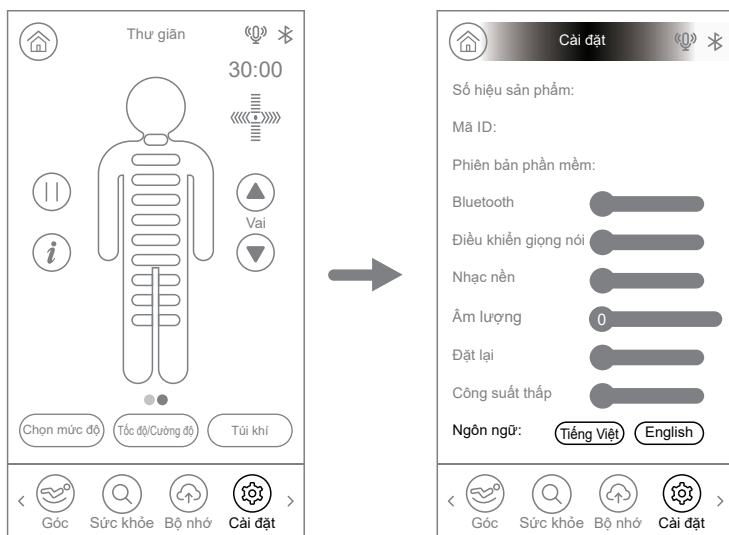

IX. Hoàn tất thao tác massage bằng tay

Trong quá trình massage:

1. Nhấn và giữ nút nguồn ở phía trên bộ điều khiển từ xa để tắt tất cả các chức năng massage và thiết lập lại góc của ghế massage.
2. Nhấn và giữ nút nguồn của tay vịn bên phải để tắt tất cả các chức năng massage và thiết lập lại góc của ghế massage.
3. Sử dụng điều khiển bằng giọng nói để tắt, tắt tất cả các chức năng massage và đặt lại góc ghế.
4. Sau khi hết thời gian quy định, tất cả các chức năng massage sẽ tắt. Nếu bật chức năng đặt lại ghế massage, góc của ghế massage sẽ được đặt lại. Nếu không, góc của ghế massage sẽ không thay đổi..



Đây là phần cuối của hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa của ghế massage

Hướng dẫn vận hành

X. Ứng dụng Bluetooth kết nối ghế massage Hướng dẫn vận hành

1. Tải xuống và cài đặt ứng dụng Bluetooth:

1.1. Phương pháp tải xuống Android (hệ điều hành Android): Tìm kiếm "Boss Well" trên Google Play (Google Store) để tải xuống và cài đặt phiên bản Android, hoặc quét mã QR bên dưới để tải xuống và cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể sử dụng ứng dụng Bluetooth để điều khiển ghế massage.


1.2. Phương pháp tải xuống Apple (hệ điều hành iOS): Tìm kiếm "Boss Well" trên App Store (Apple App Store) để tải xuống và cài đặt phiên bản Android, hoặc quét mã QR bên dưới để tải xuống và cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể sử dụng ứng dụng Bluetooth để điều khiển ghế massage.chair.



Boss Well



2. Kết nối tìm kiếm Bluetooth của APP: Sau khi APP được cài đặt thành công, hãy nhấp vào biểu tượng "Boss Well" trên giao diện thiết bị thông minh. Sau khi mở APP "Boss Well", ứng dụng sẽ tự động chuyển đến giao diện kết nối Bluetooth. Đồng thời, APP sẽ tự động tìm kiếm số Bluetooth của thiết bị tương ứng (ví dụ: MCB-909-XXXX), sau đó nhấp vào số Bluetooth của thiết bị tương ứng (và hiển thị đã kết nối), kết nối thành công. Sau khi kết nối thành công, bạn có thể vận hành ghế massage thông qua APP. Lưu ý: Chức năng Bluetooth và thông tin vị trí của hệ thống thiết bị thông minh phải được bật trước khi thiết bị được kết nối.

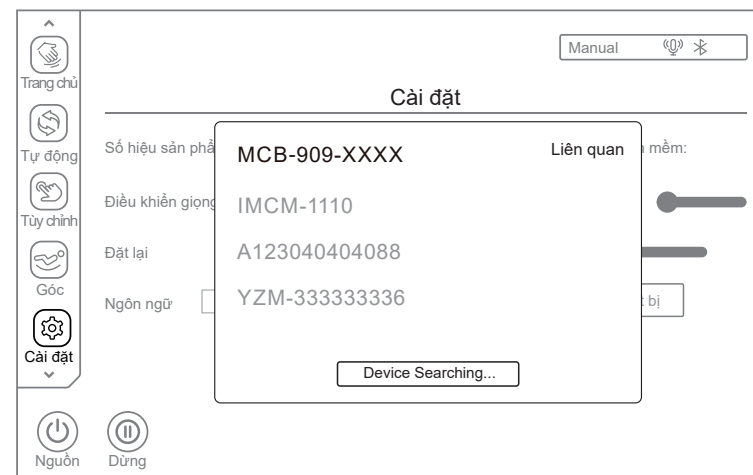


Hướng dẫn vận hành

3. Đổi tên Bluetooth của APP: Nếu vị trí ghế massage bị thay đổi hoặc tên Bluetooth bị thay đổi, bạn cần kết nối lại thiết bị theo tình hình thực tế; sau khi vào giao diện APP như hình dưới đây, chọn và nhấp vào phím "Cài đặt" trên thanh menu bên trái, sau đó chọn phím "Kết nối thiết bị" để kết nối thiết bị. Lưu ý: Chức năng Bluetooth và thông tin vị trí của hệ thống thiết bị thông minh phải được bật trước khi kết nối thiết bị.




- 3.1. Sau khi vào giao diện cài đặt như hình dưới đây, chọn và nhấp vào phím "Kết nối thiết bị". Trong giao diện cửa sổ bật lên, ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm số Bluetooth của thiết bị tương ứng (ví dụ: MCB-909-XXXX), sau đó nhấp để chọn số Bluetooth của thiết bị tương ứng (và hiển thị đã kết nối), kết nối thành công. Sau khi thiết bị được kết nối thành công, ghế massage có thể được sử dụng.

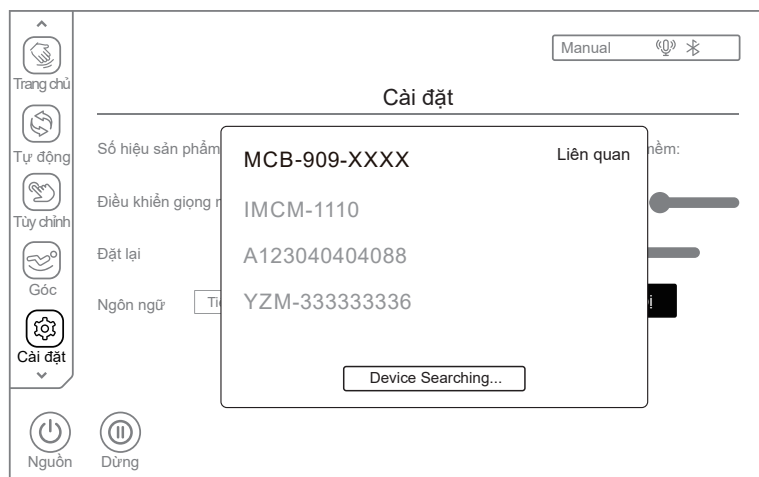


Hướng dẫn vận hành

XI. Hướng dẫn sử dụng ghế massage điều khiển bằng ứng dụng Bluetooth

1. Sau khi thiết bị được kết nối thành công, ứng dụng Bluetooth sẽ tự động vào giao diện chờ. Như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút "Nguồn" ở góc dưới bên trái của thanh menu để bật chức năng massage..
2. Sau khi bật, hệ thống sẽ tự động vào màn hình khởi động và chờ thao tác tiếp theo

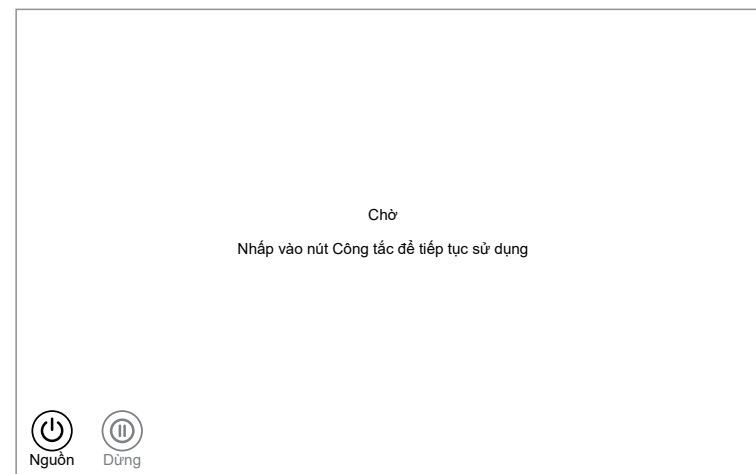


3. Sau khi chờ hệ thống khởi động, hãy chọn cường độ massage và nhấn bất kỳ nút nào trong số các nút "nhẹ nhàng, êm dịu, mạnh" trên điều khiển từ xa để khởi động ghế massage và chuyển sang chế độ nằm. Nếu không có lựa chọn nào được thực hiện trong vòng 5 phút, ghế massage sẽ tự động tắt.

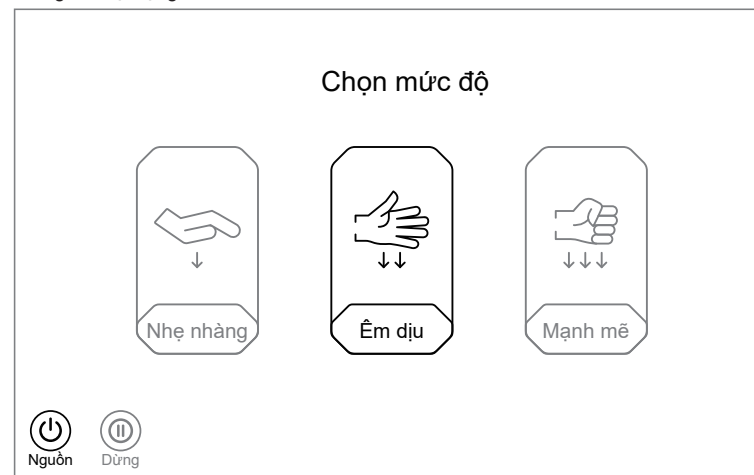


Hướng dẫn vận hành

4. Tự động điều chỉnh góc: Sau khi chọn chương trình tự động, ghế massage sẽ tự động điều chỉnh về góc không trọng lực. Chỉ cần chờ quá trình điều chỉnh hoàn tất. Bạn có thể nhấn nút "Bỏ qua" để chuyển thẳng sang bước tiếp theo..

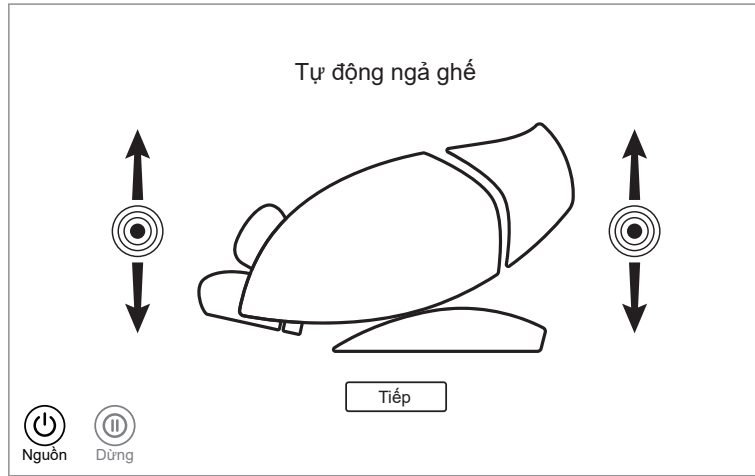


5. Đợi cho đến khi quá trình phát hiện hình dạng cơ thể hoàn tất hoặc bạn có thể nhấn phím "bỏ qua" để bỏ qua quá trình phát hiện và bắt đầu massage trực tiếp.

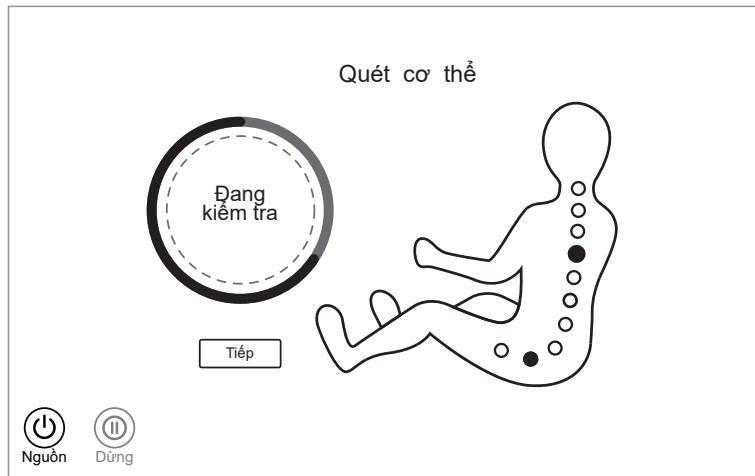


Hướng dẫn vận hành

6. Để tinh chỉnh vị trí vai, sau khi nhận diện hình dạng cơ thể, bộ điều khiển từ xa hoặc giọng nói sẽ nhắc nhở người dùng tinh chỉnh vị trí vai. Nếu con lăn massage dừng ở vị trí vai, hãy nhấn trực tiếp phím "OK" để bắt đầu massage. Nếu không, hãy sử dụng phím Lên "▲" và phím Xuống "▼" để điều chỉnh con lăn massage về vị trí vai, sau đó nhấn phím "OK" để bắt đầu massage. Nếu không có thao tác nào được thực hiện trong vòng 20 giây, hãy đặt trực tiếp vị trí con lăn massage hiện tại về vị trí vai và bắt đầu massage.

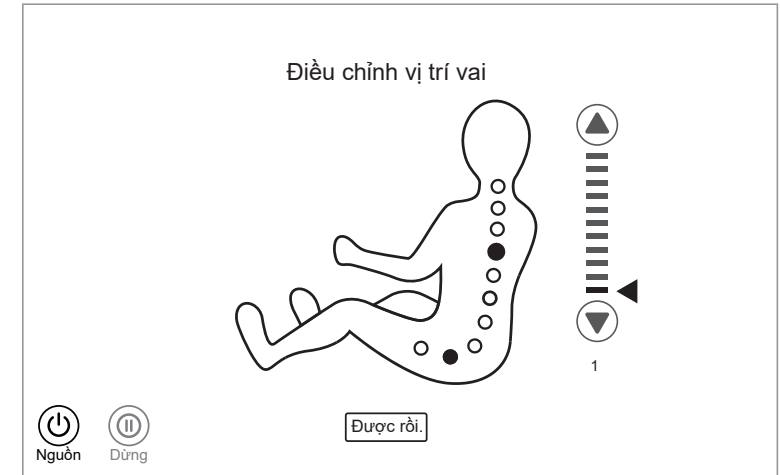


7. Sau khi hoàn tất việc phát hiện hình dạng cơ thể hoặc phát hiện vị trí vai, hãy vào giao diện chính và chọn chức năng massage tương ứng theo nhu cầu của bạn.

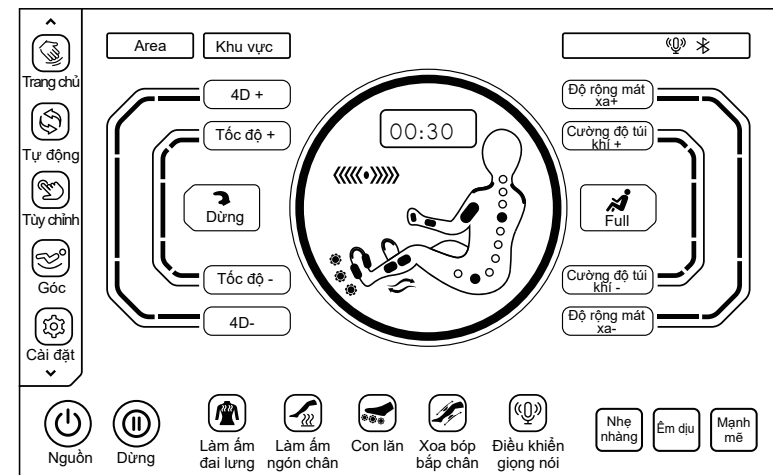


Hướng dẫn vận hành

7.1.Hướng dẫn sử dụng phím điều

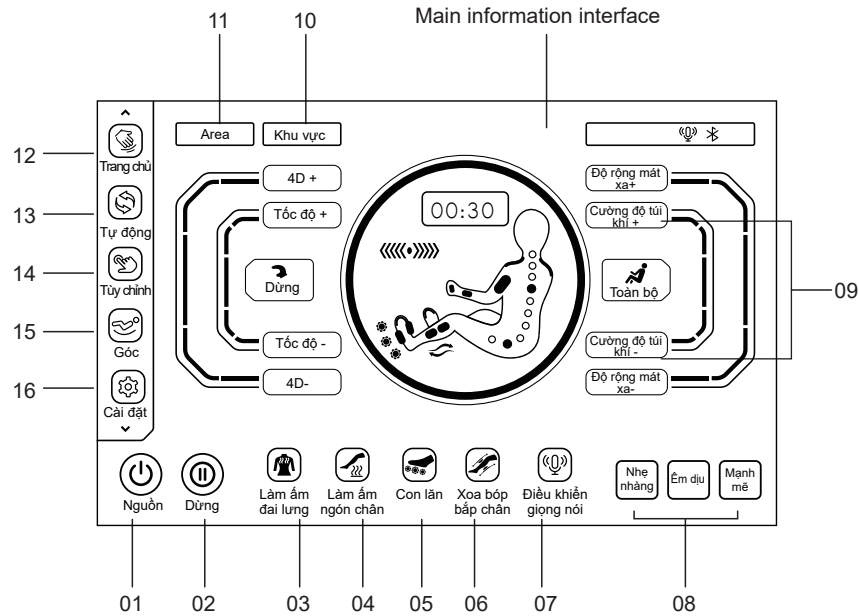

01. Phím chạm bật/tắt: Bật hoặc tắt chức năng massage của ghế
02. Phím tạm dừng: Tạm dừng massage hoặc thoát khỏi trạng thái tạm dừng
03. Phím sưởi đai: Bật/tắt chức năng sưởi vùng vai
04. Phím sưởi chân: Bật/tắt chức năng sưởi lòng bàn chân
05. Phím con lăn: Bật/tắt chức năng con lăn để chân
06. Phím bóp chân: Bật/tắt chức năng nhào bóp bóp chân.
07. Phím điều khiển giọng nói: Bật/tắt chức năng điều khiển bằng giọng nói.
08. Phím chọn cường độ: Chọn một trong các mức cường độ massage tự động khác nhau
09. Phím điều chỉnh lực khí: Điều chỉnh cường độ massage bằng túi khí.
10. Phím chọn vùng massage: Chọn khu vực phù hợp để massage
11. Phím điều chỉnh vị trí vai: Điều chỉnh vị trí vai và xác nhận tiêu chuẩn massage.
12. Phím trạng thái hiện tại: Xem trạng thái hiện tại của ghế massage
13. Phím menu chế độ tự động: Vào giao diện massage tự động
14. Phím menu chế độ thủ công: Vào giao diện massage thủ công
15. Phím điều chỉnh tư thế: Vào giao diện điều chỉnh tư thế để chọn góc ngã phù hợp .
16. Phím cài đặt: Vào giao diện cài đặt

Hướng dẫn vận hành

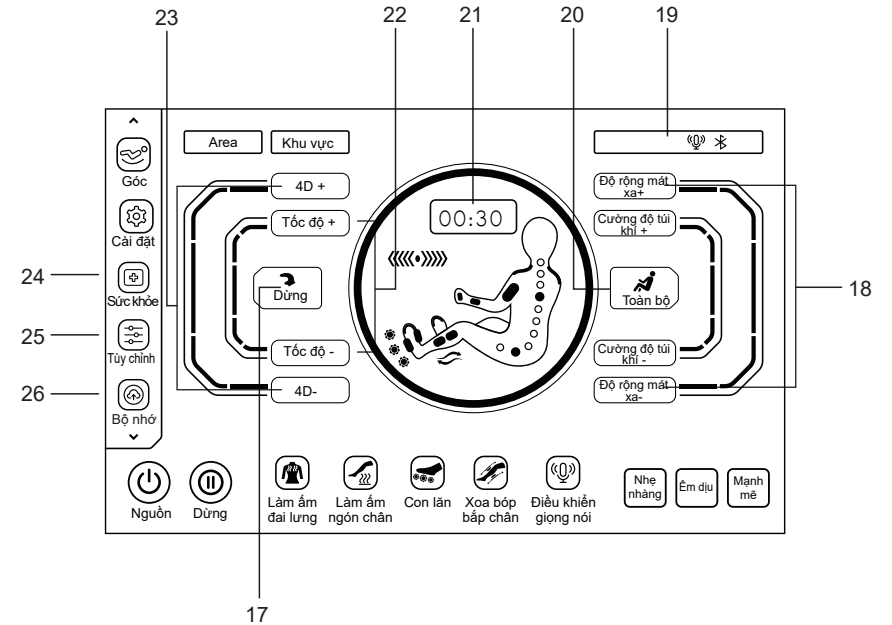


17. Phím chọn kỹ thuật massage: Chọn kỹ thuật massage
18. Phím điều chỉnh độ rộng: Điều chỉnh độ rộng massage.
19. Phím hiển thị trạng thái: Hiển thị thông tin trạng thái chương trình massage.
20. Phím chọn vùng khí nén: Chọn vùng túi khí.
21. Phím điều chỉnh thời gian: Điều chỉnh thời gian massage.
22. Phím điều chỉnh tốc độ: Điều chỉnh tốc độ massage
23. Phím điều chỉnh cường độ 4D: Điều chỉnh cường độ massage 4D
24. Phím kiểm tra sức khỏe: Vào giao diện kiểm tra sức khỏe
25. Phím tùy chỉnh: Vào giao diện tùy chỉnh.
26. Phím bộ nhớ: Vào giao diện bộ nhớ

Hướng dẫn vận hành

XII. Chương trình tự động (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi bật ghế)

Nhấn phím "Tự động" trên thanh menu bên trái (như hình minh họa bên dưới) để vào giao diện chức năng tự động. Sau đó, chọn chức năng massage tự động tùy theo nhu cầu massage trong các tình huống khác nhau.

1. Có 18 chức năng tự động để lựa chọn, được phân loại thành bốn chế độ massage chính.
 - 1.1. Dành riêng cho gia đình: Thư giãn toàn diện, Massage Trung Quốc, Giảm đau cơ, Cân bằng cơ thể, Massage Thái
 - 1.2. Thư giãn và kích hoạt: Kéo giãn toàn thân, Chăm sóc cổ và vai, Kéo giãn cột sống, Thư giãn chân và bàn chân, Tận hưởng tuyệt vời
 - 1.3. AI thông minh: Tổng thống thoải mái, giữ dáng, chế độ văn phòng, nạp lại sức khỏe, tăng cường năng lượng
 - 1.4. Thư giãn toàn diện: Nghỉ trưa, Spa lưng, Giấc mơ ngọt ngào

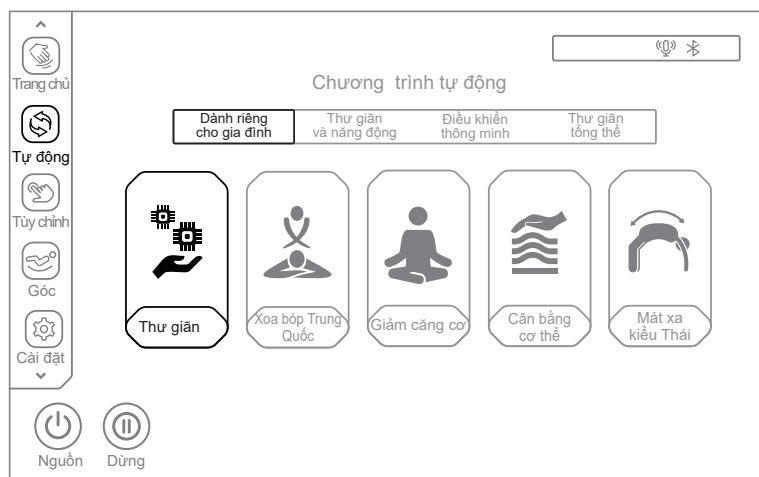


Sơ đồ lựa chọn chương trình massage tự động

Lưu ý: Để biết mô tả chi tiết về tên của từng chức năng tự động, vui lòng tham khảo trang 37-40 của hướng dẫn này..


Hướng dẫn vận hành

XIII. Chương trình thủ công (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi thiết bị được bật)

Nhấp vào nút "Thủ công" trên thanh menu bên trái (như hình dưới). Sau khi hệ thống vào giao diện chế độ thủ công, bạn có thể chọn chức năng massage thủ công tương ứng theo nhu cầu massage của mình.

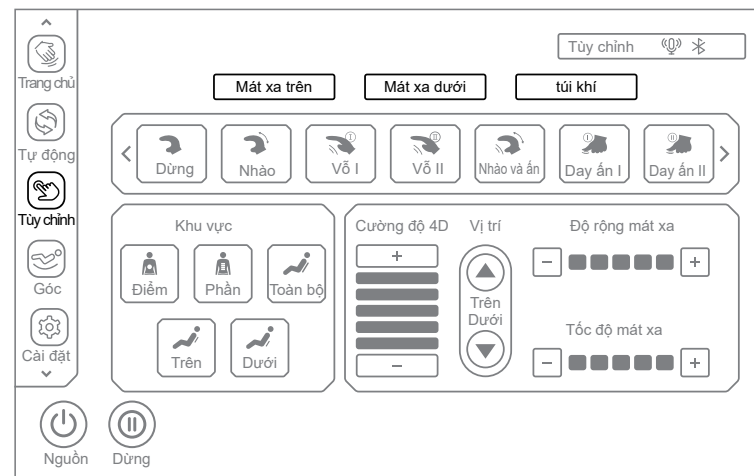


1. Chế độ thủ công: Sau khi vào giao diện chế độ thủ công, bạn có thể chọn chức năng massage thủ công tương ứng theo nhu cầu massage của mình. Chức năng massage thủ công chủ yếu được chia thành ba loại: "Massage phần trên, Massage phần dưới, Massage khí".
 - 1.1. Chế độ thủ công: Sau khi vào giao diện chế độ thủ công, bạn có thể chọn chức năng massage thủ công tương ứng theo nhu cầu massage của mình. Chức năng massage thủ công chủ yếu được chia thành ba loại: "Massage phần trên, Massage phần dưới, Massage khí".

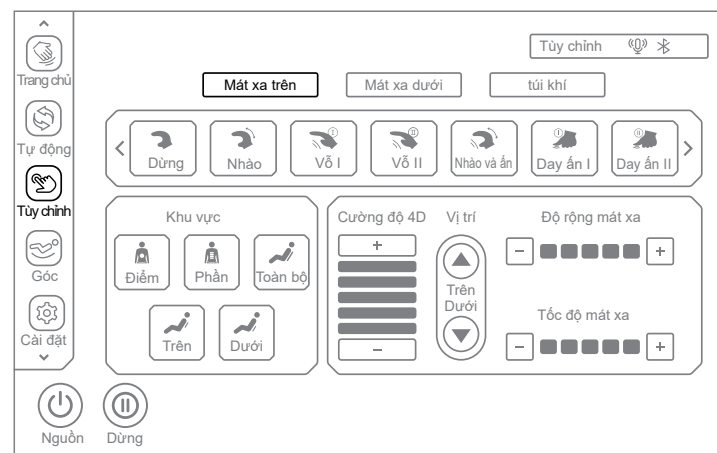

Chế độ thủ công - Sơ đồ lựa chọn phần trên của massage

Hướng dẫn vận hành

1.2. Kỹ thuật: Sau khi vào menu chức năng massage phần trên của Massage, như hình minh họa bên dưới, hãy nhấn phím "Biểu tượng" Kỹ thuật để thực hiện massage kỹ thuật, bao gồm không kỹ thuật, nhào (tổng cộng 7 chế độ chuyển đổi tuần hoàn), vỗ I, vỗ II, nhào và vỗ, shiatsu I, shiatsu II, nắm vai, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV, v.v., tổng cộng có 18 kỹ thuật. (Lưu ý: Nhấn phím "Mũi tên Trái và Mũi tên Phải" trong menu điều chỉnh kỹ thuật để cuộn sang trái và phải để hiển thị thêm các kỹ thuật massage).

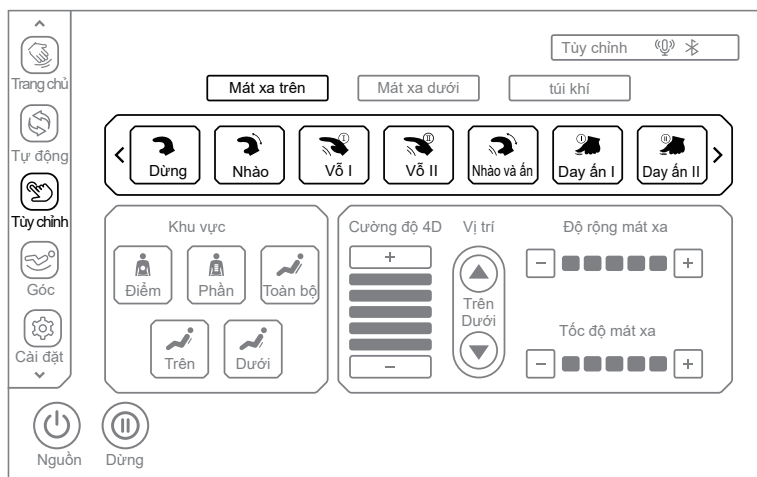


Chế độ thủ công - Massage phần trên Sơ đồ lựa chọn kỹ thuật

Chức năng	Điều chỉnh con lăn massage	
Stop		Có thể điều chỉnh độ rộng và cường độ.
Knead(7 techniques)		Có thể điều chỉnh tốc độ và cường độ.
Tap I		Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ
Tap II		Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.
Knead&Tap		Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.
Shiatsu I		Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.
Shiatsu II		Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.
Grasp		Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.
4D I		Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.
4D II		Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ
4D III		Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ
4D IV		Có thể điều chỉnh tốc độ, độ rộng và cường độ.

Hướng dẫn vận hành


Lưu ý: Trong khi chương trình massage đang chạy, như hình minh họa bên dưới, hãy nhấn vào phím "Trang chủ" ở phía bên trái màn hình, vào giao diện và nhấn vào phím "Biểu tượng" Kỹ thuật, sau đó chọn biểu tượng kỹ thuật tương ứng (như nhào, vỗ, shiatsu, v.v.) trong cửa sổ bật lên để chuyển đổi kỹ thuật massage.

Phương pháp massage tắt: Tính năng này cho phép chuyển đổi nhanh giữa các kỹ thuật massage ở chế độ thủ công trong giao diện trạng thái hiện tại; vui lòng tham khảo hình minh họa được cung cấp.

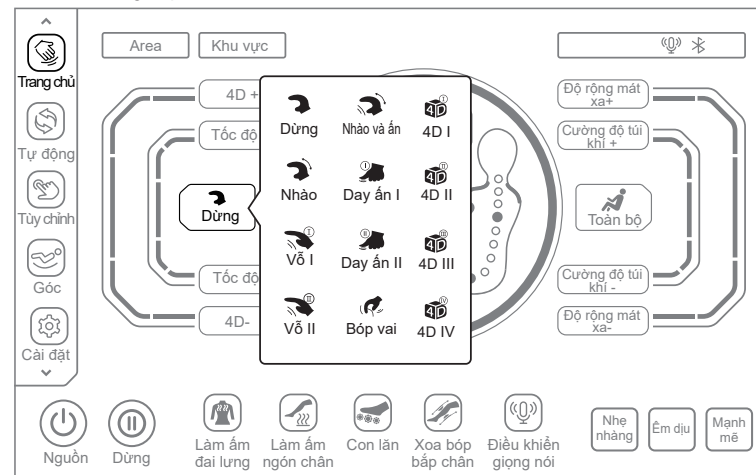

Giao diện trang chủ - Sơ đồ lựa chọn thủ công

1.3. Khu vực Massage: Sau khi vào menu chức năng massage Thủ công (hướng lên), như hình minh họa bên dưới, hãy chọn phím "Khu vực massage" để thực hiện massage khu vực. Chức năng này bao gồm 5 khu vực massage: điểm cố định, một phần, toàn bộ lưng, lưng trên và lưng dưới. Chọn khu vực massage tương ứng trong menu phạm vi massage để massage.

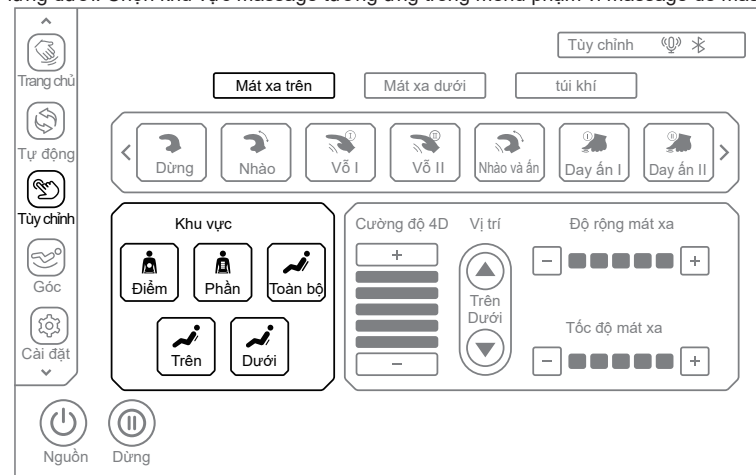


Chế độ thủ công - Sơ đồ lựa chọn vùng massage phía trên

Hướng dẫn vận hành

Phím	Mô tả
	Massage điểm cố định tại vị trí điểm cố định.
	Massage cục bộ quy mô nhỏ qua lại.
	Massage toàn bộ lưng tới lui.
	Massage lưng trên qua lại.
	Massage lưng dưới qua lại.

Lưu ý: Trong khi chương trình massage đang chạy, như hình minh họa bên dưới, hãy nhấn vào phím "Trang chủ" ở phía bên trái màn hình, vào giao diện và nhấn vào phím "Khu vực", sau đó chọn biểu tượng khu vực massage tương ứng (như điểm cố định, một phần, toàn bộ lưng, v.v.) trong cửa sổ bật lên để chuyển đổi khu vực massage.


1.2.1. Phím tắt vùng massage: Chức năng này là phím tắt để chuyển đổi vùng massage trong giao diện trạng thái hiện tại ở chế độ thủ công.

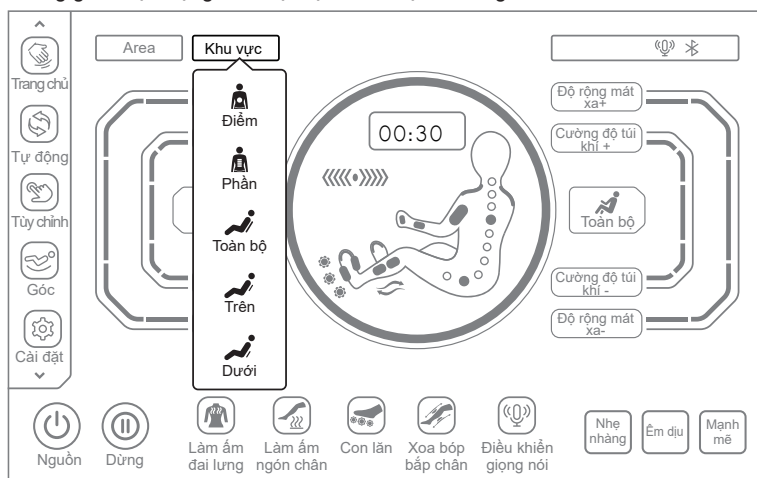


Giao diện trang chủ - Sơ đồ lựa chọn vùng massage

Hướng dẫn vận hành

1.7. Cường độ 4D: Sau khi vào menu chức năng massage Thủ công (lên), như minh họa trong hình bên dưới, hãy chọn phím "+" hoặc "-" để điều chỉnh cường độ 4D; cường độ có thể điều chỉnh từ 1 đến 5 mức (mặc định là mức 3), với mức 1 là yếu nhất và mức 5 là mạnh nhất. Cường độ 4D càng mạnh, bánh xe massage càng nhô ra và lực massage càng lớn..

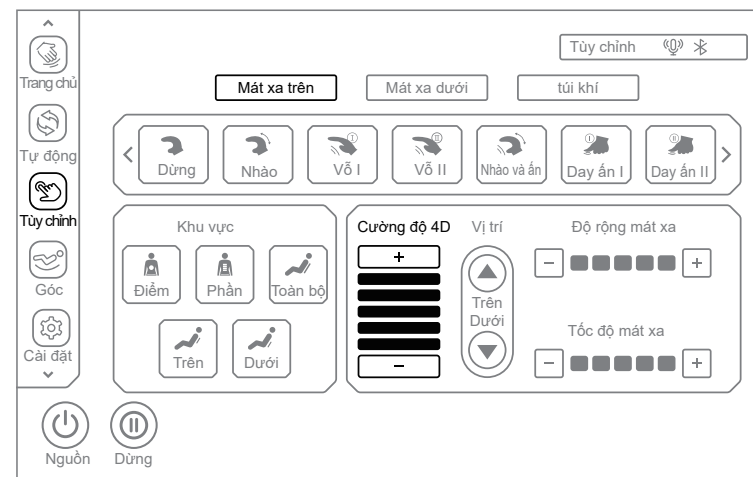

Chế độ thủ công - Sơ đồ cường độ massage 4D trên

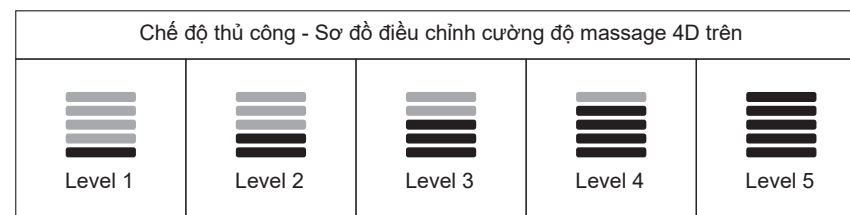


Phím	Mô tả
	Nhấn phím này để tăng cường độ 4D có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.
	Nhấn phím này để giảm cường độ 4D có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.

Hướng dẫn vận hành


Lưu ý: Trong quá trình vận hành chương trình massage, như minh họa trong hình bên dưới, nhấn phím "Trang chủ" ở phía bên trái màn hình, vào giao diện, sau đó nhấn phím "4D Intensity+" hoặc "4D Intensity-" để điều chỉnh cường độ 4D. Cường độ có thể được điều chỉnh từ 1 đến 5 mức (mặc định là mức 3), với mức 1 là yếu nhất và mức 5 là mạnh nhất. Cường độ 4D càng mạnh, bánh xe massage nhô ra càng cao và lực massage càng lớn..

1.3.1. Phím tắt cường độ 4D: Chức năng này đóng vai trò là phím tắt để chuyển đổi cường độ 4D trong giao diện trạng thái hiện tại ở chế độ thủ công.

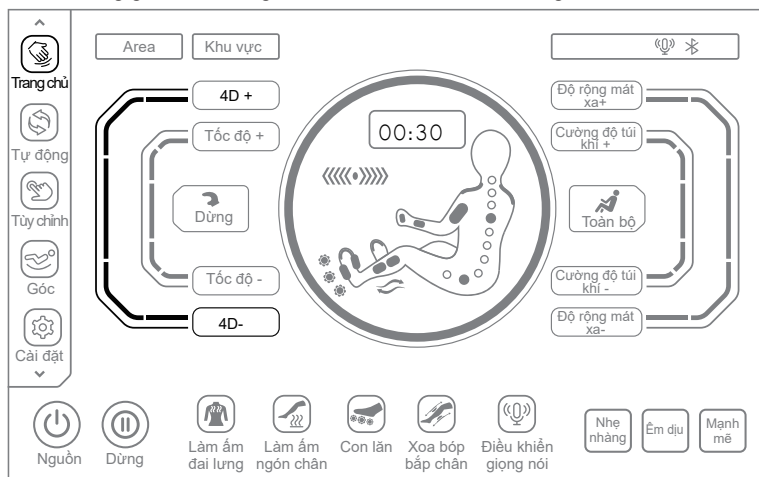

Giao diện trang chủ - Sơ đồ cường độ 4D


Giao diện trang chủ - Sơ đồ điều chỉnh cường độ 4D

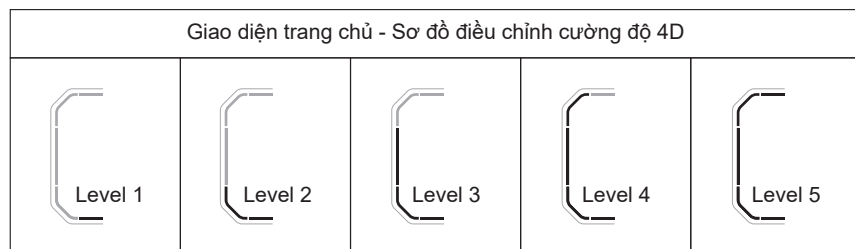

Phím	Mô tả
4D+	Nhấn phím này để tăng cường độ 4D có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.
4D-	Nhấn phím này để giảm cường độ 4D có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.

Hướng dẫn vận hành

1.5. Điều chỉnh tay massage: Sau khi vào menu chức năng massage Thủ công (hướng lên), như hình minh họa bên dưới, hãy chọn phím "▲" hoặc "▼" của tay massage để điều chỉnh vị trí lên xuống của tay massage. Việc điều chỉnh tay massage cần được thực hiện ở vị trí cố định và một phần vùng massage ở chế độ thủ công.

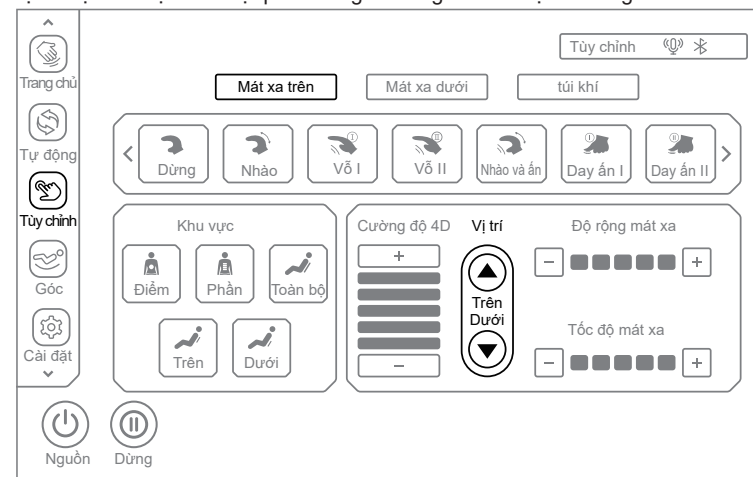


Chế độ thủ công - Sơ đồ điều chỉnh vị trí massage phía trên


Phím	Mô tả
▲	Giữ phím lên, tay massage sẽ di chuyển lên, thả ra, tay massage sẽ dừng di chuyển lên.
▼	Giữ phím xuống, tay massage sẽ di chuyển xuống, thả ra, tay massage sẽ dừng di chuyển xuống

Hướng dẫn vận hành

1.6. Độ rộng massage: Sau khi vào menu chức năng massage phía trên, như hình minh họa bên dưới, hãy chọn phím "+" hoặc "-" để điều chỉnh độ rộng massage. Độ rộng có thể được chọn từ 1 đến 5 mức (mặc định là mức 3), với mức 1 là hẹp nhất và mức 5 là rộng nhất; chức năng điều chỉnh độ rộng có thể được sử dụng cho các kỹ thuật massage sau: Stop, Tap I, Tap II, shiatsu I, shiatsu II, 4D III, 4D IV. Người dùng phải chọn kỹ thuật massage hoặc vùng massage để vào chế độ thủ công trước khi có thể điều chỉnh độ rộng.

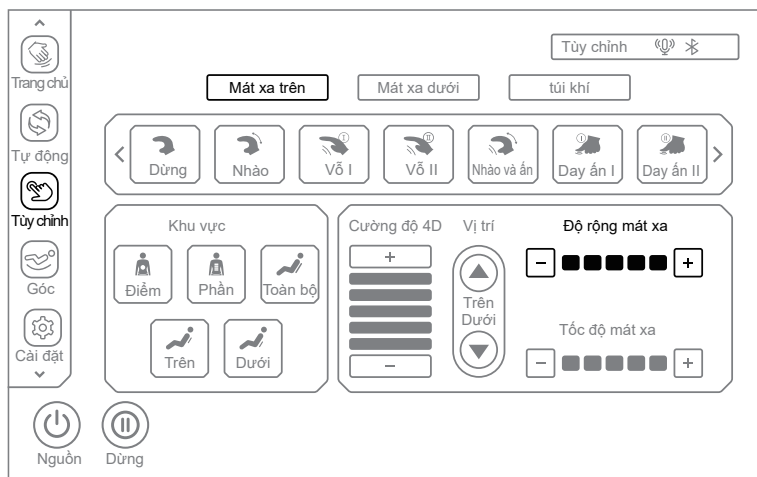

Chế độ thủ công - Sơ đồ chiều rộng massage phía trên

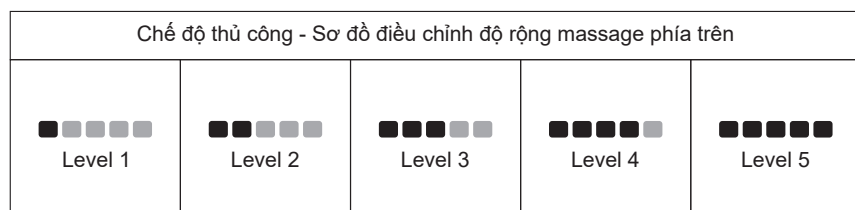


Phím	Mô tả
+	Nhấn phím này để tăng độ rộng massage có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.
-	Nhấn phím này để giảm độ rộng massage có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.


Hướng dẫn vận hành

Lưu ý: Trong quá trình vận hành chương trình massage, như hình minh họa bên dưới, hãy nhấn vào phím "Trang chủ" ở phía bên trái màn hình, vào giao diện, sau đó nhấn vào phím "Chiều rộng massage+" hoặc "Chiều rộng massage-" để điều chỉnh độ rộng massage; Độ rộng có thể được chọn từ 1 đến 5 mức, trong đó mức 1 là hẹp nhất và mức 5 là rộng nhất.

1.5.1. Phím tắt Chiều rộng massage: Chức năng này đóng vai trò là phím tắt để chuyển đổi Chiều rộng massage ở trạng thái hiện tại tại Chiều rộng ở chế độ thủ công.

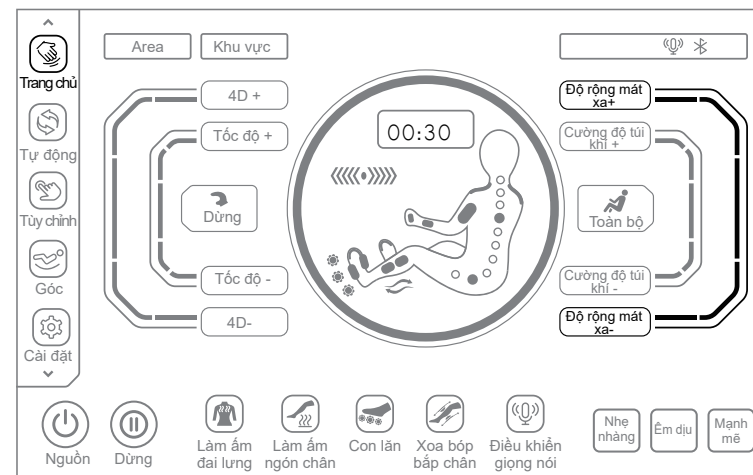


Home interface - Schematic diagram of Massage Width

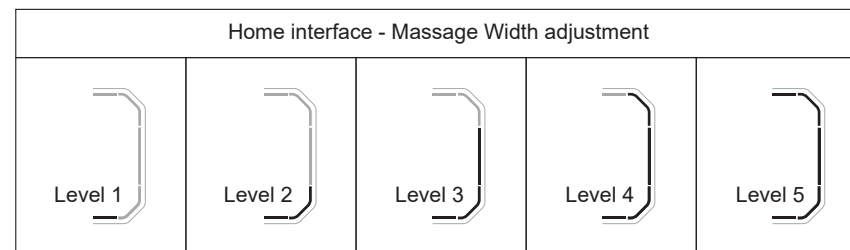

Key	Description
Width +	Nhấn phím này để mở rộng phạm vi massage, phạm vi có thể được điều chỉnh từ 1 đến 5 mức.
Width -	Nhấn phím này để thu hẹp chiều rộng massage và có thể điều chỉnh chiều rộng từ 1 đến 5 mức.

Hướng dẫn vận hành

1.7. Tốc độ massage: Sau khi vào menu chức năng massage phía trên, như hình minh họa bên dưới, chọn nút "+" hoặc "-" để điều chỉnh tốc độ massage. Tốc độ có thể được chọn từ 1 đến 5 mức (mặc định là mức 3), với mức 1 là chậm nhất và mức 5 là nhanh nhất; không thể điều chỉnh tốc độ khi kỹ thuật massage đã dừng. Người dùng phải chọn kỹ thuật massage hoặc vùng massage để vào chế độ thủ công trước khi có thể điều chỉnh tốc độ.

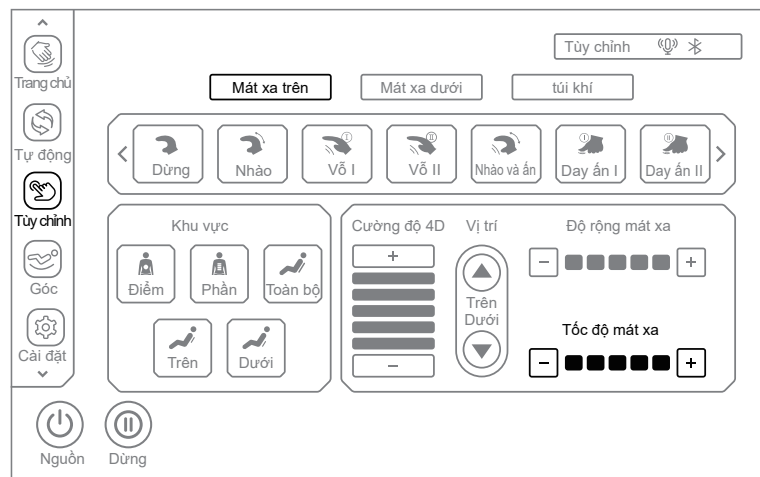

Chế độ thủ công - Sơ đồ tốc độ massage phía trên


Chế độ thủ công - Sơ đồ điều chỉnh tốc độ massage phía trên				
Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Phím	Mô tả
	Nhấn phím này để tăng tốc độ massage có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.
	Press this key to decrease massage speed which is adjustable from 1 to 5.

Hướng dẫn vận hành

Lưu ý: Trong quá trình vận hành chương trình massage, như minh họa trong hình bên dưới, hãy nhấn vào phím "Trang chủ" ở phía bên trái màn hình, vào giao diện, sau đó nhấn vào phím "Tốc độ +" hoặc "Tốc độ -" để điều chỉnh tốc độ massage; tốc độ có thể được chọn từ 1 đến 5 mức (mặc định là mức 3), với mức 1 là chậm nhất và mức 5 là nhanh nhất.

1.5.1. Phím tắt cường độ massage: Chức năng này đóng vai trò là phím tắt để chuyển đổi cường độ massage trong giao diện trạng thái hiện tại ở chế độ thủ công.

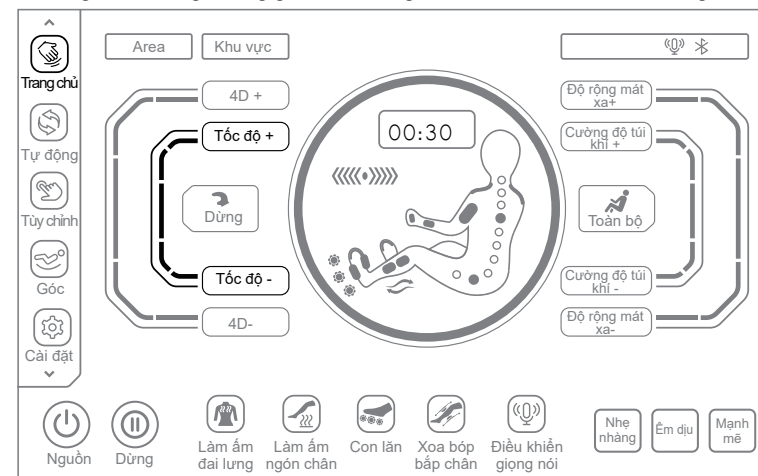


Giao diện trang chủ - Sơ đồ của Massage Speed

Giao diện trang chủ - Điều chỉnh tốc độ massage				
Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Key	Mô tả
	Nhấn phím này để tăng tốc độ massage có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.
	Nhấn phím này để giảm tốc độ massage có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.


Hướng dẫn vận hành

2. Massage phần dưới: Sau khi vào giao diện chế độ thủ công như hình minh họa bên dưới, hãy nhấp vào nút "Massage phần dưới" và bạn có thể chọn chức năng massage cơ chế phần dưới theo nhu cầu của mình, bao gồm kỹ thuật massage, vùng massage, cường độ 4D, tay massage, tốc độ massage, độ rộng massage và các chức năng massage khác.

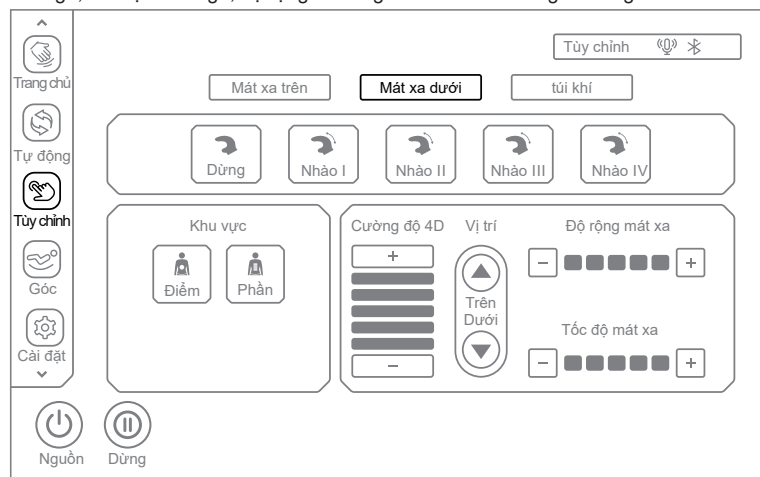

Chế độ thủ công - Sơ đồ sơ đồ lựa chọn Massage thấp hơn

- 2.1. Kỹ thuật: Sau khi vào menu chức năng massage dưới như hình minh họa bên dưới, chọn phím "biểu tượng" Kỹ thuật tương ứng để thực hiện kỹ thuật massage, bao gồm Dừng, Nhào I, Nhào II, Nhào III, Nhào IV, tổng cộng có 5 kỹ thuật có sẵn.

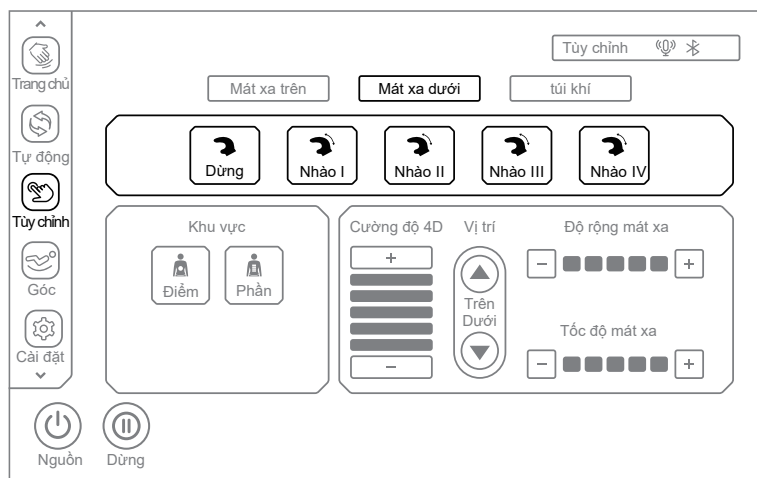


Chế độ thủ công - Sơ đồ lựa chọn kỹ thuật massage thấp hơn

Hướng dẫn vận hành

Chức năng	Điều chỉnh con lăn massage		
Dừng		Có thể điều chỉnh tốc độ và độ rộng..	Có thể điều chỉnh 5 mức tốc độ
Nhào I		Có thể điều chỉnh cường độ và tốc độ.	
Nhào II		Có thể điều chỉnh cường độ và tốc độ.	Có thể điều chỉnh 5 mức độ rộng
Nhào III		Có thể điều chỉnh cường độ và tốc độ..	
Nhào IV		Có thể điều chỉnh cường độ và tốc độ.	Có thể điều chỉnh 5 mức cường độ

- 2.2. Khu vực massage: Sau khi vào menu chức năng massage phần dưới như hình minh họa bên dưới, hãy chọn phím "biểu tượng" Khu vực massage tương ứng để thực hiện massage vùng. Nó bao gồm 5 vùng massage: điểm cố định, một phần, toàn bộ lưng, lưng trên và lưng dưới. Chọn vùng massage tương ứng trong menu vùng massage để massage...

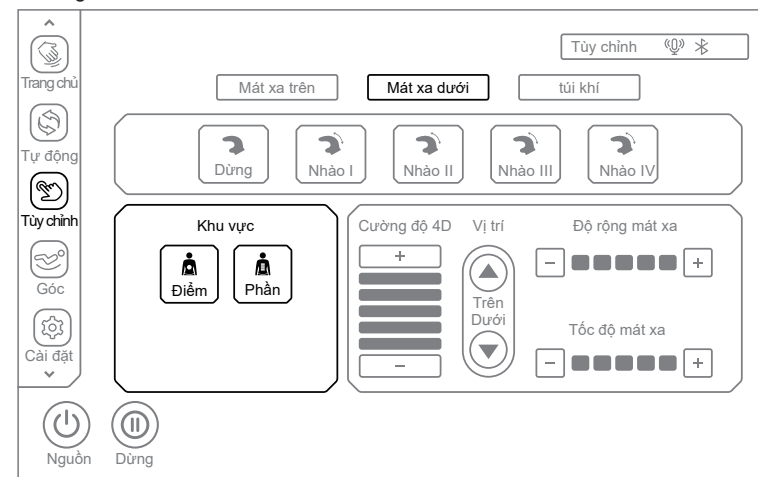


Massage điểm cố định tại vị trí điểm cố định

Phím	Mô tả
	Massage điểm cố định tại vị trí điểm cố định.
	Massage cục bộ quy mô nhỏ qua lại.

Hướng dẫn vận hành

2.3. Cường độ 4D: Sau khi vào menu chức năng massage dưới, như hình minh họa bên dưới, chọn phím "+" hoặc "-" để điều chỉnh cường độ 4D; cường độ có thể điều chỉnh từ 1 đến 5 mức, với mức 1 là yếu nhất và mức 5 là mạnh nhất. Cường độ 4D càng mạnh, bánh xe massage càng nhô ra và lực massage càng lớn..

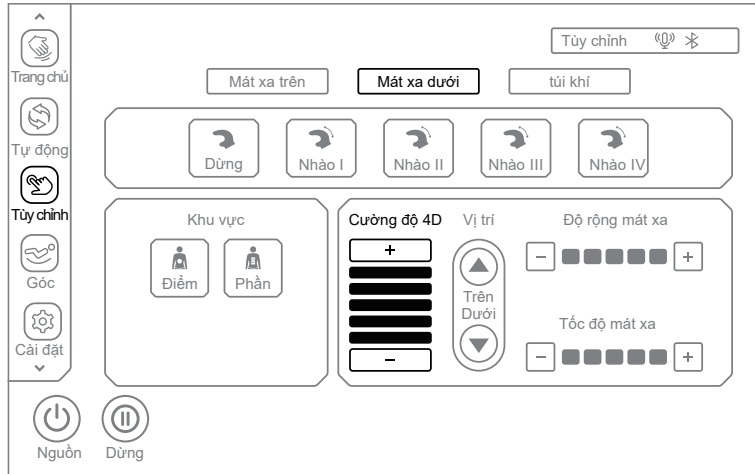


Chế độ thủ công - Sơ đồ của cường độ massage 4D

Chế độ thủ công - Sơ đồ điều chỉnh cường độ massage 4D dưới				
Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Phím	Mô tả
	Nhấn phím này để tăng cường độ 4D có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.
	Nhấn phím này để giảm cường độ 4D có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.

Hướng dẫn vận hành

2.4. Điều chỉnh tay massage: Sau khi vào menu chức năng massage dưới như minh họa trong hình bên dưới, hãy chọn phím "▲" hoặc "▼" của tay massage để điều chỉnh vị trí lên xuống của tay massage. Việc điều chỉnh tay massage cần được thực hiện thủ công tại điểm cố định và một phần vùng massage.

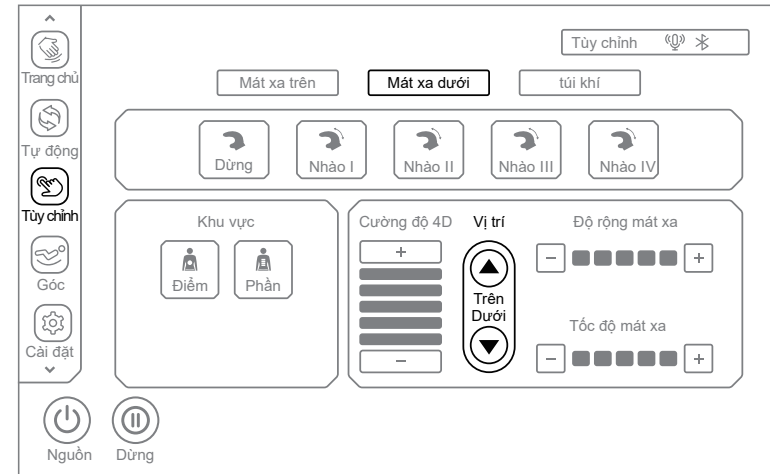


Chế độ thủ công - Sơ đồ điều chỉnh vị trí massage thấp hơn

Phím	Mô tả
	Giữ phím lên, tay massage sẽ di chuyển lên, thả ra, tay massage sẽ dừng di chuyển lên
	Giữ phím xuống, tay massage sẽ di chuyển xuống, thả ra, tay massage sẽ dừng di chuyển xuống

Hướng dẫn vận hành

2.5. Độ rộng massage: Sau khi vào menu chức năng massage dưới, như hình minh họa bên dưới, hãy chọn phím "+" hoặc "-" để điều chỉnh độ rộng massage. Độ rộng có thể được chọn từ 1 đến 5 mức, với mức 1 là hẹp nhất và mức 5 là rộng nhất; chức năng điều chỉnh độ rộng có thể được sử dụng cho các kỹ thuật massage sau: Dừng. Người dùng phải chọn kỹ thuật massage hoặc vùng massage để vào chế độ thủ công trước khi có thể điều chỉnh độ rộng.

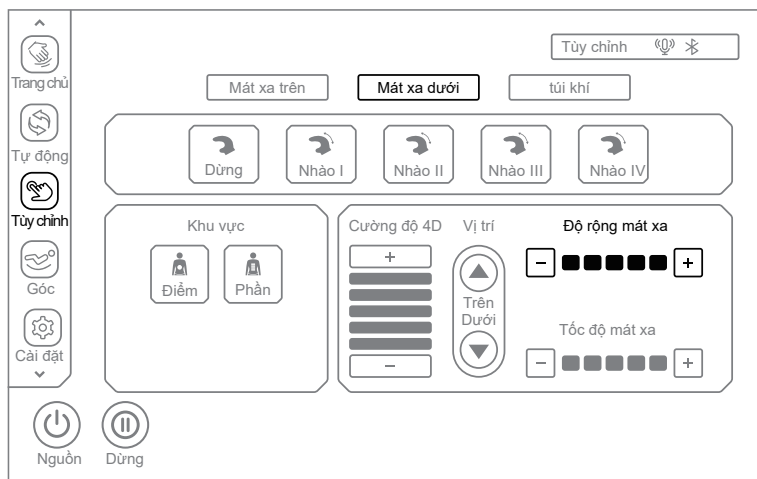


Chế độ thủ công - Sơ đồ nguyên lý Massage chiều rộng massage thấp hơn

Chế độ thủ công - Sơ đồ điều chỉnh độ rộng massage dưới				
■ ■ ■ ■ ■ Level 1	■ ■ ■ ■ ■ Level 2	■ ■ ■ ■ ■ Level 3	■ ■ ■ ■ ■ Level 4	■ ■ ■ ■ ■ Level 5

Phím	Mô tả
+	Nhấn phím này để tăng độ rộng massage có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.
-	Nhấn phím này để giảm độ rộng massage có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.

Hướng dẫn vận hành

2.6. Tốc độ massage: Sau khi vào menu chức năng massage, chọn nút "+" hoặc "-" như hình minh họa bên dưới để điều chỉnh tốc độ massage. Có 5 mức tốc độ từ 1 đến 5, mức 1 biểu thị tốc độ chậm nhất, mức 5 biểu thị tốc độ nhanh nhất. Việc điều chỉnh tốc độ phải được thực hiện trong các kỹ thuật massage sau: xoa bóp I, xoa bóp II, xoa bóp III, xoa bóp IV. Người dùng chỉ có thể điều chỉnh tốc độ sau khi chọn kỹ thuật massage hoặc vùng massage có thể chuyển sang chế độ thủ công..

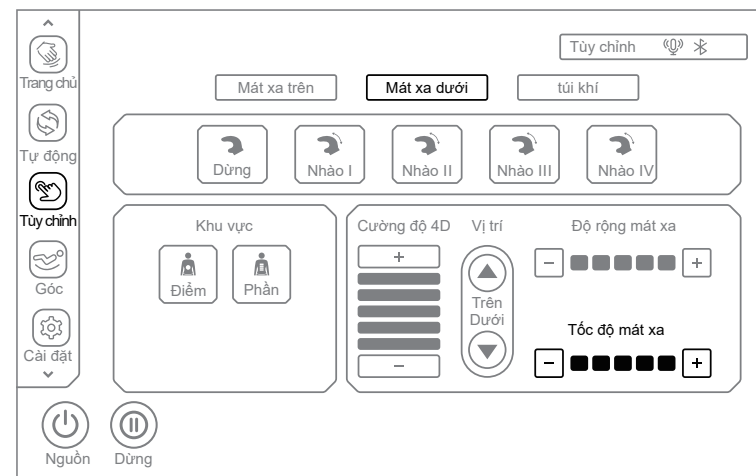

Chế độ thủ công - Sơ đồ của chế độ massage tốc độ thấp hơn


Chế độ thủ công - Sơ đồ điều chỉnh tốc độ massage thấp hơn				
■ ■ ■ ■ ■ Level 1	■ ■ ■ ■ ■ Level 2	■ ■ ■ ■ ■ Level 3	■ ■ ■ ■ ■ Level 4	■ ■ ■ ■ ■ Level 5

Phím	Mô tả
+	Nhấn phím này để tăng tốc độ massage có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.
-	Nhấn phím này để giảm tốc độ massage có thể điều chỉnh từ 1 đến 5.

Hướng dẫn vận hành

3. Massage khí: Sau khi vào giao diện chế độ thủ công, như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút "Air" để chọn chức năng massage khí nén tương ứng theo nhu cầu massage của bạn. Bao gồm chế độ massage toàn thân, thân trên, thân dưới và điều chỉnh cường độ massage..


3.1. Chọn vùng áp lực khí: Sau khi vào menu Áp lực khí, bạn có thể chọn các nút "Toàn thân, Thân trên, Thân dưới", tùy theo nhu cầu massage của bạn để bật hoặc tắt chức năng massage áp lực khí của vùng tương ứng. Nếu bạn tắt tất cả, tất cả các chức năng áp lực khí sẽ bị tắt..

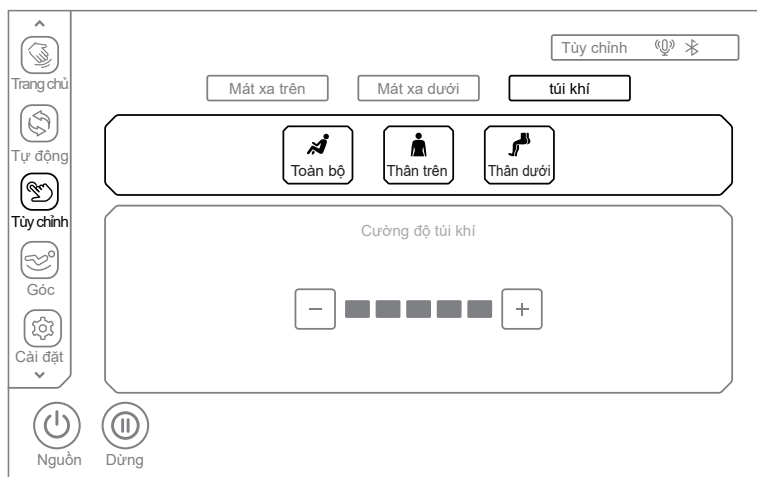

Chương trình thủ công - Sơ đồ của massage bằng khí


Phím	Mô tả
	Nhấn phím này để bật hoặc tắt chức năng massage toàn thân bằng khí.
	Nhấn phím này để bật hoặc tắt chức năng massage khí cho phần thân trên.
	Nhấn phím này để bật hoặc tắt chức năng massage khí cho phần thân dưới.

Hướng dẫn vận hành

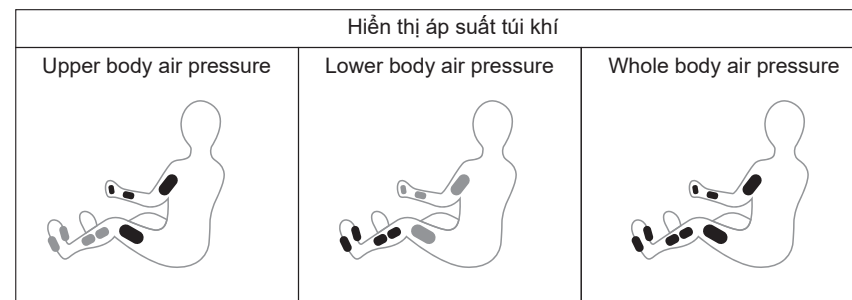

Lưu ý: Khi chương trình massage đang chạy, hãy nhấp vào nút "Trang chủ" ở phía bên trái màn hình như hình dưới đây, sau khi vào giao diện, nhấp vào nút "Biểu tượng áp suất khí" và chọn biểu tượng massage áp suất khí tương ứng (như Đầy đủ, Trên, Dưới) trong cửa sổ bật lên để chuyển sang vùng massage áp suất khí


2.1.2. Phím tắt massage bằng áp suất khí: Chức năng ở đây là phím tắt để chuyển sang chế độ massage bằng áp suất khí ở giao diện Trang chủ ở chế độ thủ công.

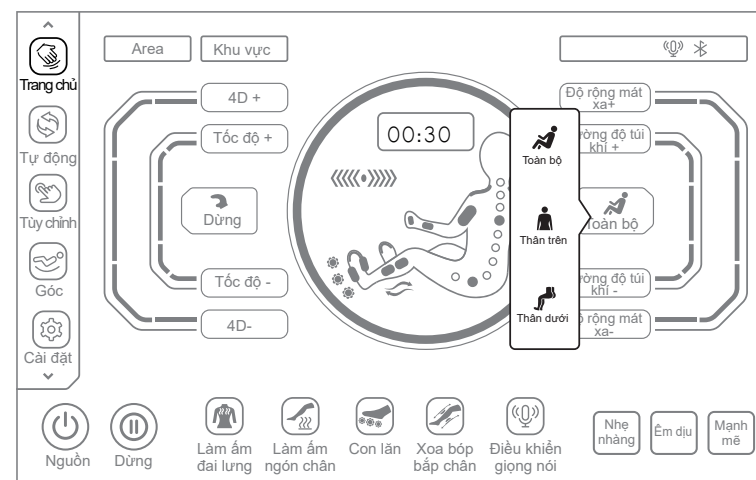

Giao diện trang chủ - Sơ đồ nguyên lý massage bằng khí nén

Hướng dẫn vận hành

3.2. Cường độ áp suất khí: Sau khi vào menu chức năng massage áp suất khí, hãy bật chức năng massage áp suất khí của vùng tương ứng như hình minh họa bên dưới. Sau đó chọn "Cường độ khí +" hoặc "Cường độ khí -" để điều chỉnh cường độ theo nhu cầu massage, tăng hoặc giảm cường độ áp suất khí theo từng bước. Cường độ có thể được điều chỉnh từ 1 đến 5 mức, mức 1 biểu thị cường độ yếu nhất và mức 5 biểu thị cường độ mạnh nhất

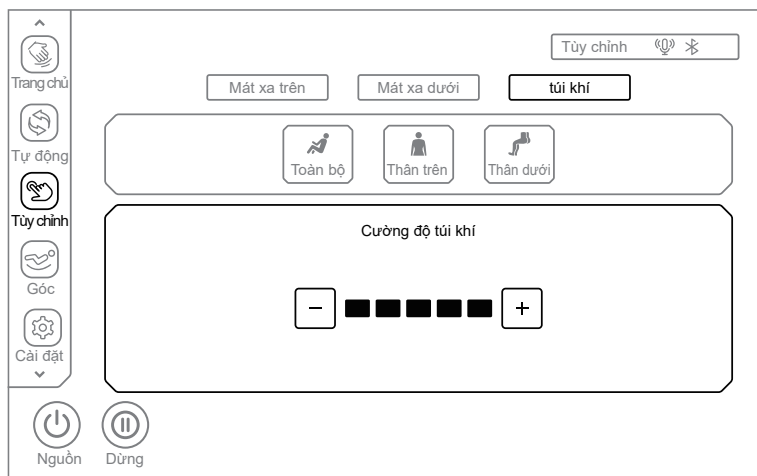


Chế độ thủ công - Sơ đồ nguyên lý massage bằng khí

Manual mode - Air intensity adjustment				
Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Phím	Mô tả			
	Nhấn phím này để tăng cường độ không khí có thể điều chỉnh từ 1 đến -5.			
	Nhấn phím này để giảm cường độ không khí có thể điều chỉnh từ 1 đến -5.			

Hướng dẫn vận hành

Lưu ý: Khi chương trình massage đang chạy, hãy nhấp vào nút "Trang chủ" ở phía bên trái màn hình như hình minh họa bên dưới, sau đó nhấp vào nút "Cường độ khí +" hoặc "Cường độ khí -" để điều chỉnh cường độ áp suất khí, tăng hoặc giảm cường độ áp suất khí theo từng bước. Cường độ có thể được điều chỉnh từ 1 đến 5 mức, mức 1 biểu thị cường độ yếu nhất và mức 5 biểu thị cường độ mạnh nhất.

3.2.1. Phím tắt cường độ áp suất khí: Trước tiên, bạn phải bật chức năng massage áp suất khí cho vùng massage tương ứng (như toàn thân, thân trên, thân dưới) trong giao diện thủ công trước khi có thể sử dụng phương pháp điều chỉnh phím tắt ở trên

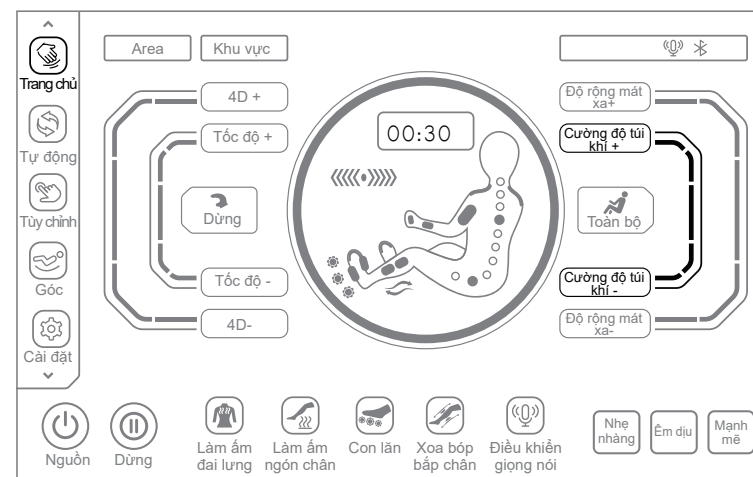


Giao diện trang chủ - Sơ đồ cường độ không khí

Giao diện trang chủ - Điều chỉnh cường độ không khí				
Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Phím	Mô tả			
	Nhấn phím này để tăng cường độ không khí có thể điều chỉnh từ 1 đến -5.			
	Nhấn phím này để giảm cường độ không khí có thể điều chỉnh từ 1 đến -5.			

Hướng dẫn vận hành

XIV. Điều chỉnh ghế

Nhấn phím "Góc" trên thanh menu bên trái (như hình minh họa bên dưới) để vào menu Góc. Tùy theo nhu cầu massage, hãy chọn điều chỉnh góc ngồi, bao gồm: Chân ngắn, Chân dài, Chân ngắn, Chân dài, Chân nâng lên, Chân hạ xuống, Toàn thân nâng lên, Toàn thân hạ xuống, Lùi lên, Lùi xuống, Số 1, Số 2.

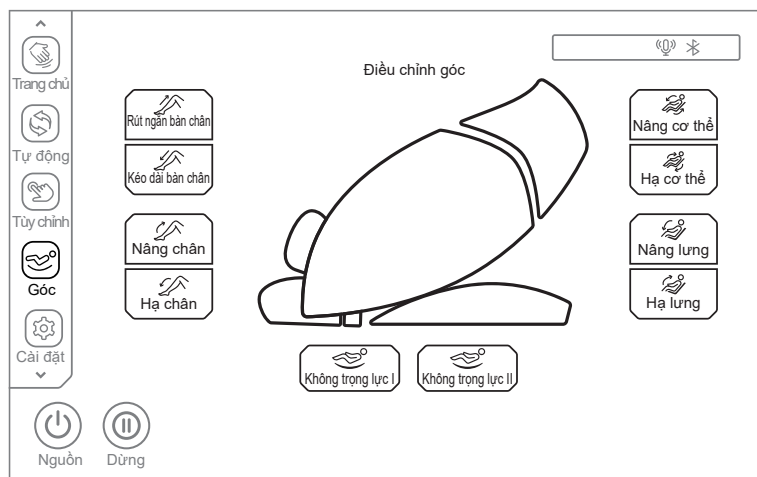

Sơ đồ điều chỉnh tư thế ngồi

1. Điều chỉnh chế độ ko trọng lực

Phím	Mô tả
Zero 1	Phím Không trọng lực 1: tự động điều chỉnh vị trí của bộ phận chân và tựa lưng về vị trí Không trọng lực 1. Khi hoàn tất chế độ Không trọng lực 1, bộ phận chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân.
Zero 2	Phím Không trọng lực 2: tự động điều chỉnh vị trí của bộ phận chân và bộ phận tựa lưng về vị trí Không trọng lực 2. Khi hoàn tất chế độ Không trọng lực 1, bộ phận chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân.

2. Điều chỉnh chân

Phím	Mô tả
Nâng chân	Nút rút ngắn chỗ để chân: Điều chỉnh thủ công chỗ để chân để rút ngắn; nhấn và giữ nút này để di chuyển chỗ để chân lên từ từ và thả ra để dừng lại. Quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và sẽ nghe thấy tiếng "tách" khi quá trình điều chỉnh đạt đến vị trí giới hạn.
Kéo chân	Phím mở rộng chỗ để chân: Điều chỉnh thủ công độ mở rộng của chỗ để chân; nhấn và giữ nút này để di chuyển chỗ để chân xuống từ từ và thả ra để dừng lại. Quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và sẽ nghe thấy tiếng "tách" khi quá trình điều chỉnh đạt đến vị trí giới hạn.

Hướng dẫn vận hành

3. Điều chỉnh độ dài/ ngắn của chân

Phím	Mô tả
Nâng chân	Phím Nâng chân: Nhấn và giữ phím này để từ từ nâng chân, sau đó thả ra để dừng nâng; sau khi hoàn tất quá trình nâng chân, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và sẽ nghe thấy tiếng "tách" khi đạt đến vị trí giới hạn. Khi quá trình nâng hoàn tất, chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân.
Hạ chân	Phím Hạ chân: Nhấn và giữ phím này để từ từ hạ chân xuống, sau đó thả ra để dừng hạ; sau khi hoàn tất việc hạ chân, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và sẽ nghe thấy tiếng "tách" khi đạt đến vị trí giới hạn. Khi hoàn tất quá trình hạ chân, chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân..

4. Điều chỉnh góc của bộ phận tựa lưng

Phím	Mô tả
Back up	Phím lên của bộ phận tựa lưng: nhấn và giữ phím này để từ từ nâng bộ phận tựa lưng lên và thả ra để dừng nâng. Quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và sẽ nghe thấy tiếng "nhỏ giọt" khi quá trình điều chỉnh đạt đến vị trí giới hạn..
Back down	Phím Hạ bộ phận tựa lưng: Nhấn và giữ phím này để từ từ hạ bộ phận tựa lưng xuống và thả ra để dừng hạ. Việc điều chỉnh sẽ dừng lại và sẽ nghe thấy tiếng "nhỏ giọt" khi việc điều chỉnh đạt đến vị trí giới hạn..

5. Điều chỉnh góc nâng

Phím	Mô tả
Toàn bộ lên	Phím Nâng Liên Kết: Nhấn và giữ phím này để từ từ nâng phần tựa lưng lên trong khi từ từ hạ phần chân xuống, và thả ra để dừng nâng phần tựa lưng hoặc hạ phần chân xuống; sau khi hoàn tất hành động nâng liên kết, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và sẽ nghe thấy tiếng "tách" khi điều chỉnh đạt đến vị trí giới hạn. Khi hành động Nâng Liên Kết hoàn tất, phần chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân.
Toàn bộ xuống	Phím Giảm liên kết: Nhấn và giữ phím này để từ từ hạ thấp phần tựa lưng đồng thời từ từ nâng phần chân lên, và thả ra để dừng hạ thấp phần tựa lưng hoặc nâng phần chân; sau khi hoàn tất việc hạ liên kết, quá trình điều chỉnh sẽ dừng lại và sẽ nghe thấy tiếng "tách" khi quá trình điều chỉnh đạt đến vị trí giới hạn. Khi hoàn tất việc Giảm liên kết, phần chân sẽ tự động phát hiện chiều dài bắp chân

Hướng dẫn vận hành

XV. Cài đặt (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi bật thiết bị)

Nhấp vào nút "Cài đặt" trên thanh menu bên trái màn hình điều khiển từ xa (như hình dưới) và hệ thống sẽ vào giao diện cài đặt. Sau đó, bạn có thể chọn các chức năng cài đặt hệ thống theo nhu cầu massage của mình.

1. Chức năng cài đặt chủ yếu được chia thành hai loại

1.1. Thông tin sản phẩm: Model sản phẩm, Mã ID, Phiên bản phần mềm.

1.2. Cài đặt hệ thống: Điều khiển bằng giọng nói, Bluetooth, Nhạc, âm lượng, thiết lập lại ghế massage, Âm lượng, lựa chọn ngôn ngữ và các chức năng cài đặt hệ thống khác.



2. Thông tin thiết bị: Sau khi vào giao diện cài đặt, như trong hình, bạn có thể xem Model sản phẩm, Mã ID, Phiên bản phần mềm hiển thị thông tin của thiết bị hiện tại.



Hướng dẫn vận hành

3. Điều khiển bằng giọng nói: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút chuyển đổi "Điều khiển bằng giọng nói" để bật hoặc tắt chức năng Điều khiển bằng giọng nói. Sau khi bật chức năng điều khiển bằng giọng nói, bạn có thể điều khiển ghế massage bằng giọng nói theo nội dung nhập bằng giọng nói..



3.1. Trong trạng thái mở của ghế massage, cần xác nhận chức năng điều khiển bằng giọng nói có mở hay không (nếu chưa, vui lòng vào giao diện cài đặt để mở trước); Khi chức năng điều khiển bằng giọng nói được mở, bạn có thể nhấn phím "Điều khiển bằng giọng nói" trên bộ điều khiển từ xa hoặc bạn có thể đến gần vị trí loa để nói "Xin chào Alice" hoặc "Này Alice" để đánh thức trợ lý giọng nói, khi trợ lý giọng nói trả lời "Tôi ở đây", điều đó có nghĩa là nó đã được đánh thức và sau khi mở trợ lý điều khiển bằng giọng nói, bạn có thể sử dụng chức năng trợ lý điều khiển bằng giọng nói để điều khiển ghế massage.

3.2. Bạn cũng có thể nhấn nhanh nút "Giọng nói" trên phím tắt ở tay vịn để đánh thức trợ lý giọng nói và nhấn và giữ phím này trong 3 giây để bật hoặc tắt.

3.3. Sau khi trợ lý giọng nói được kích hoạt, vui lòng nói lệnh trong vòng 6 giây để kích hoạt chức năng điều khiển ghế massage. Sau khi trợ lý giọng nói phản hồi, bạn có thể tiếp tục nói lệnh. Khoảng thời gian giữa hai lệnh liên tiếp không được vượt quá 6 giây, nếu không, bạn cần phải kích hoạt lại trợ lý giọng nói. Bảng lệnh thoại chi tiết như sau:

Lưu ý: Khi kích hoạt chức năng điều khiển bằng giọng nói, tốc độ nói không nên quá nhanh và lệnh thoại nên được đưa ra theo Hướng dẫn nhập lệnh điều khiển bằng giọng nói

Lưu ý: Để biết các thuật ngữ điều khiển bằng giọng nói chi tiết, vui lòng tham khảo trang 61 của hướng dẫn này.

Hướng dẫn vận hành

4. Bluetooth: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, hãy nhấp vào nút chuyển đổi "Bluetooth" để bật hoặc tắt tính năng Bluetooth. Sau khi bật chức năng Bluetooth, bạn có thể kết nối thiết bị âm thanh có Bluetooth với ghế massage. (chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính bảng MID, v.v.) với module Bluetooth của ghế massage, nhạc phát ra từ thiết bị nguồn âm thanh có thể được truyền không dây đến hệ thống âm thanh của ghế massage thông qua Bluetooth để phát nhạc.



- 4.1. Vào menu chính của thiết bị thông minh. Mở "Cài đặt" và chọn tùy chọn "Bluetooth". Mở "Bluetooth", Bluetooth sẽ tự động "Tìm kiếm thiết bị Bluetooth mới".
- 4.2. Thiết bị thông minh sẽ tìm kiếm model Bluetooth tương ứng (ví dụ: MCB-909-XXXX). Nhấp vào nút "Kết hợp". Nếu được hỏi có muốn kết hợp với thiết bị hay không, bạn chỉ cần chọn "Kết hợp" để hoàn tất quá trình kết hợp.
- 4.3. TBật "Trình phát nhạc" trên thiết bị thông minh và chọn bài hát để phát.

Hướng dẫn vận hành

5. Nhạc nền: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, hãy nhấp vào nút chuyển đổi "Nhạc" để bật hoặc tắt chức năng nhạc nền; sau khi bật nhạc nền, khi người dùng chọn bất kỳ chức năng massage tự động là "Thư giãn hoàn toàn, Phục hồi mệt mỏi, Sóng nhẹ, Tận hưởng tuyệt vời, Nạp lại sức khỏe, Nghỉ trưa, Giấc mơ ngọt ngào", hệ thống sẽ tự động phát nhạc nền.



6. Đặt lại Ghế Massage: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút "Đặt lại" để bật hoặc tắt chức năng Đặt lại Ghế Massage. Sau khi bật chức năng đặt lại ghế massage, thời gian chạy của ghế massage kết thúc và góc ghế massage được đặt lại. Chức năng đặt lại của ghế massage bị tắt và góc ghế massage không được đặt lại sau khi thời gian chạy của ghế massage kết thúc.




Hướng dẫn vận hành

7. Điều chỉnh âm lượng: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình minh họa bên dưới, nhấp vào nút trượt "Âm lượng" theo hướng dẫn, giữ và trượt sang trái, phải để điều chỉnh âm lượng. Có tổng cộng 0-15 mức âm lượng có thể được thiết lập..



8. ựa chọn ngôn ngữ: Sau khi vào giao diện cài đặt, như hình dưới đây, hãy chọn ngôn ngữ khác nhau tùy theo nhu cầu của người dùng. Ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt, và có thể chọn tiếng Trung hoặc tiếng Anh..

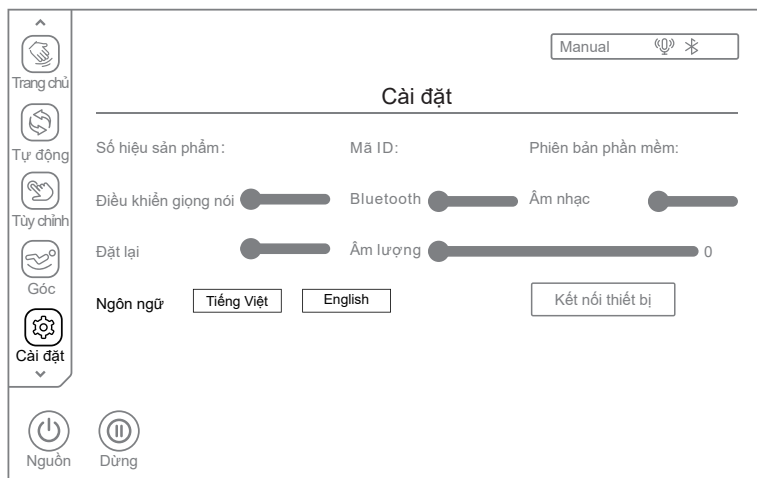


Hướng dẫn vận hành


XVI. Phát hiện sức khỏe (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi bật thiết bị)

Vuốt lên trên thanh menu bên trái của bộ điều khiển thủ công và chọn phím "Phát hiện Sức khỏe" (như hình minh họa bên dưới). Sau khi vào menu phát hiện sức khỏe, bạn có thể chọn thực hiện phát hiện sức khỏe dựa trên nhu cầu massage của mình. Nếu chức năng phát hiện sức khỏe được kích hoạt, tất cả các chức năng massage đang chạy sẽ bị dừng.

1. Bắt đầu phát hiện sức khỏe: Sau khi vào menu phát hiện sức khỏe, như minh họa trong hình bên dưới, hãy nhấp vào phím "Bắt đầu" để kích hoạt chức năng phát hiện sức khỏe. Khi trạng thái phát hiện sức khỏe được kích hoạt, hãy nhẹ nhàng đặt ngón trỏ hoặc ngón giữa lên cảm biến. Sau vài giây, dữ liệu thời gian thực về nhịp tim, oxy trong máu và vi tuần hoàn sẽ được hiển thị. Chờ quá trình phát hiện hoàn tất..

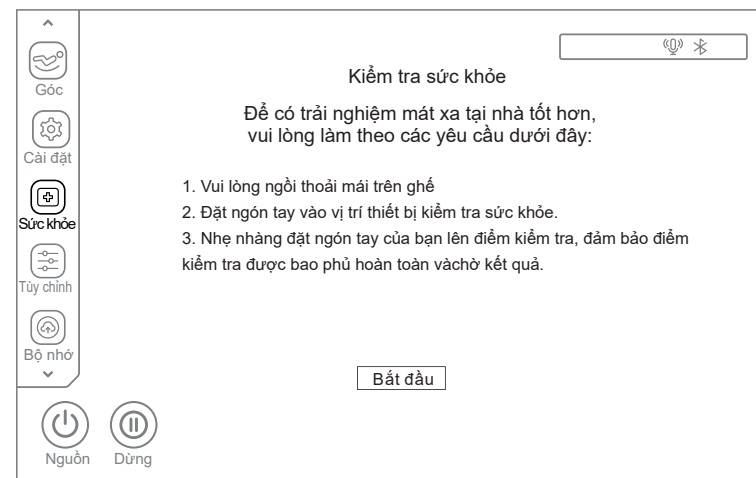


Chỉ báo tiến trình kiểm tra sức khỏe

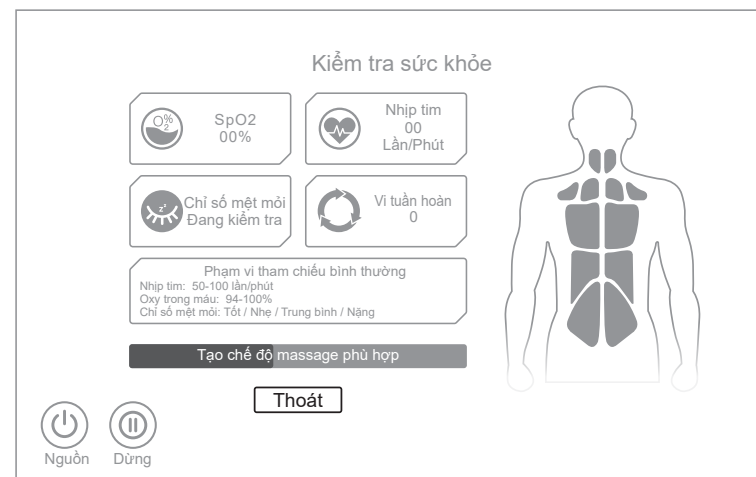


Hướng dẫn vận hành

2. Chương trình đề xuất: Khi hoàn tất quá trình phát hiện bình thường, máy sẽ hiển thị nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và mức độ mệt mỏi tương ứng. Nồng độ oxy trong máu bình thường dao động từ 95% đến 99%. Các mức độ mệt mỏi bao gồm Tốt, Nhẹ, Trung bình và Nặng. Dựa trên mức độ mệt mỏi của bạn, một chương trình tự động sẽ được đề xuất cho bạn. Chọn "Có" để bắt đầu sử dụng chương trình đề xuất và "Không" để trở về trạng thái massage trước khi phát hiện sức khỏe..

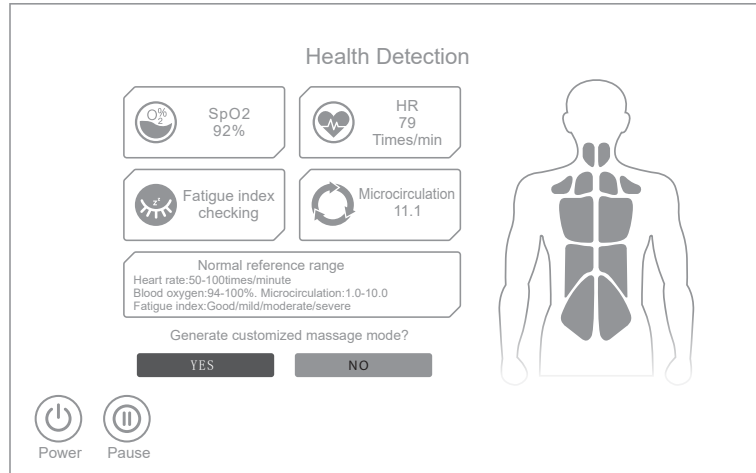


3. Không phát hiện dữ liệu hợp lệ: Nếu không phát hiện dữ liệu hợp lệ, người dùng sẽ được nhắc nhở có muốn phát hiện lại hay không. Chọn "Có" để khởi động lại chức năng phát hiện sức khỏe, và "Không" để thoát khỏi chức năng phát hiện và trở về trạng thái mát-xa trước khi phát hiện sức khỏe.

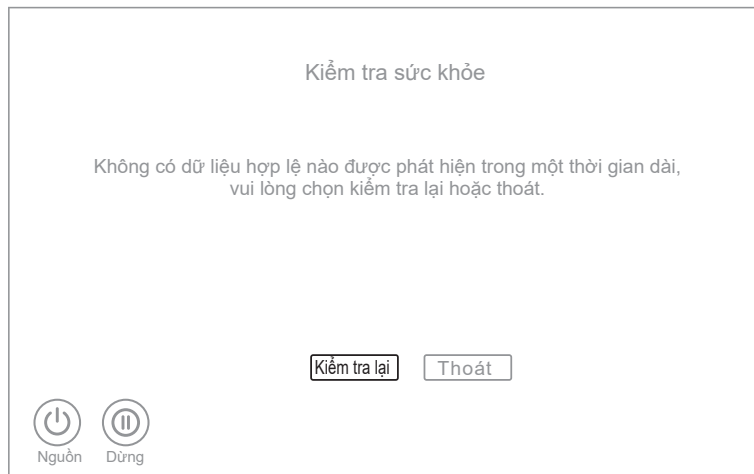

Hướng dẫn vận hành


4. Thoát khỏi chế độ phát hiện sức khỏe: Trong quá trình phát hiện sức khỏe, nhấn phím "Thoát" để thoát khỏi chế độ phát hiện và trở về trạng thái massage trước khi phát hiện sức khỏe.

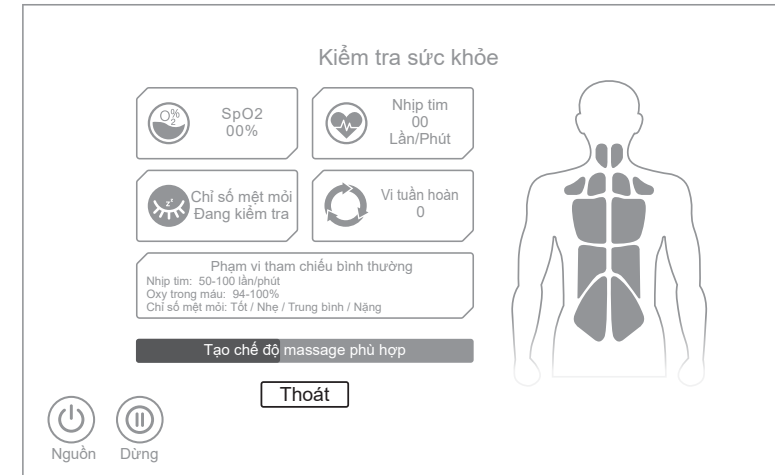

XVII. Tùy chỉnh (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi thiết bị được bật)


Vuốt thanh menu ở phía bên trái màn hình hiển thị, nhấn vào nút "Bộ nhớ" (như hình bên dưới) để vào giao diện lựa chọn bộ nhớ, tại đây bạn có thể lựa chọn chức năng bộ nhớ theo nhu cầu massage của mình.

3. Chức năng lưu trữ chủ yếu được chia thành hai loại: "Lưu trữ và Gọi lại". Mỗi loại có ba nhóm lựa chọn chế độ..

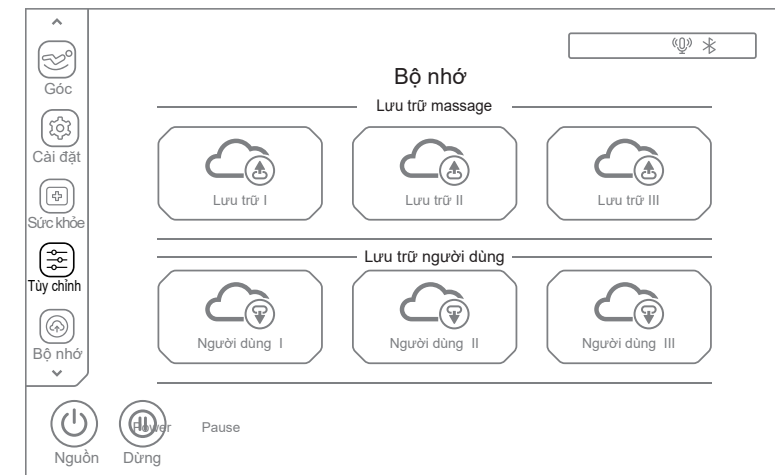


Hướng dẫn vận hành

2. Bộ nhớ: Sau khi vào giao diện bộ nhớ, hãy nhấp vào bất kỳ nút "bộ nhớ I, bộ nhớ II, bộ nhớ III" nào như trong hình bên dưới để lưu tất cả các chương trình massage đang hoạt động (có thể lưu tối đa ba bộ chương trình massage); bao gồm chức năng tự động, chức năng thủ công, chế độ áp suất không khí và chức năng massage cường độ, cũng như điều chỉnh góc ghế massage và các chức năng massage khác.

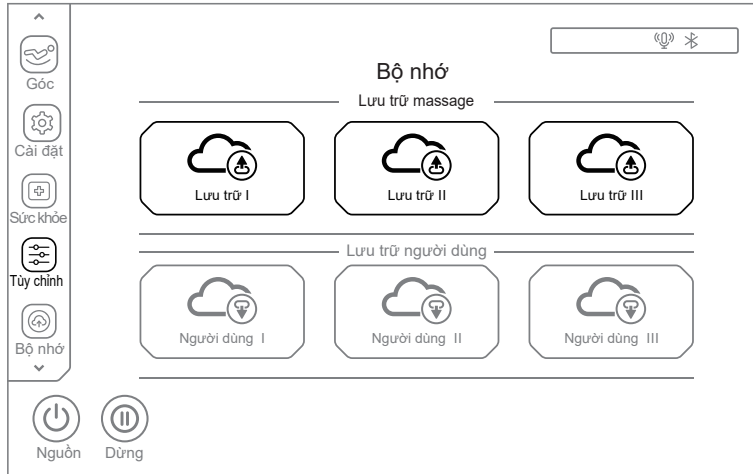


3. Gọi lại: Sau khi vào giao diện lưu trữ, hãy nhấp vào bất kỳ nút "Gọi lại I, Gọi lại II, Gọi lại III" nào như trong hình bên dưới để gọi chương trình massage đã lưu trữ; bao gồm chức năng tự động, chức năng thủ công, chế độ áp suất không khí và chức năng massage cường độ, cũng như điều chỉnh góc ghế massage và các chức năng massage khác.

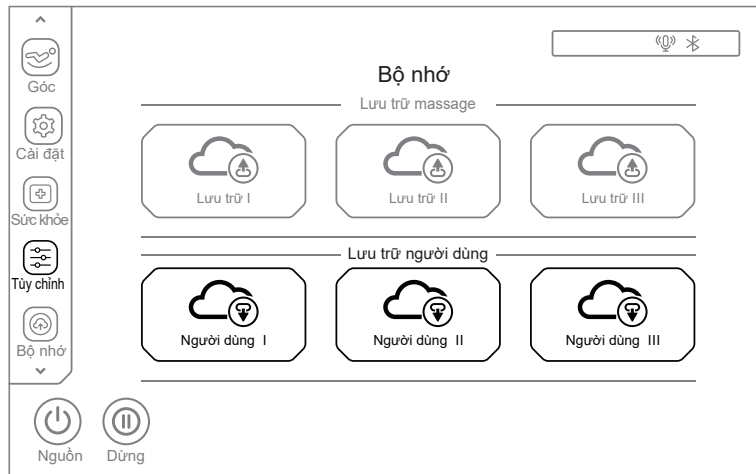


Hướng dẫn vận hành

XVIII. Các chức năng khác (vui lòng sử dụng chức năng này sau khi bật ghế)

Trên giao diện "Trang chủ" của màn hình hiển thị, như hình bên dưới, bạn có thể chọn các chức năng massage tương ứng theo nhu cầu. Các chức năng này bao gồm Tạm dừng, Sưởi ấm bằng đai, Sưởi ấm bằng ngón chân, Con lăn, Xoa bóp bắp chân, Điều khiển bằng giọng nói, Điều chỉnh thời gian, Điều chỉnh vị trí vai, Lựa chọn phạm vi massage, Lựa chọn cường độ massage và hiển thị trạng thái hoặc kỹ thuật massage..

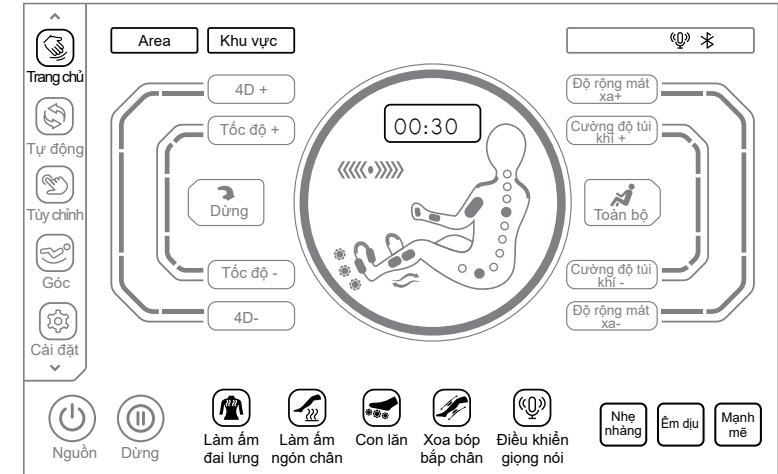


1. Nhấn: Sau khi ghế massage được bật và hoạt động, nhấn phím "pause" để vào trạng thái tạm dừng, sau đó tắt cả các chức năng massage sẽ tạm dừng, nhấn phím "pause" một lần nữa để tiếp tục trạng thái massage trước đó. Lưu ý: Trong trạng thái tạm dừng, tất cả các chức năng sẽ không hoạt động ngoại trừ tất máy

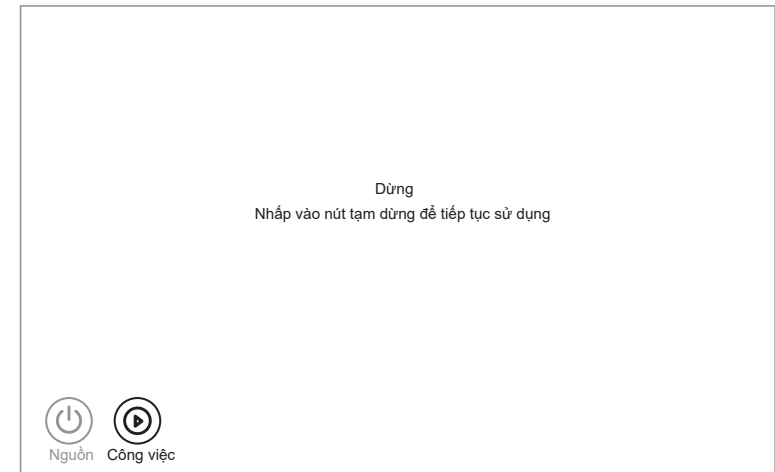


Hướng dẫn vận hành

2. Sưởi ấm bằng đai: Trên giao diện "Trang chủ", như hình minh họa bên dưới, chọn phím "Sưởi ấm bằng đai" để bật hoặc tắt chức năng sưởi ấm khăn choàng. Chức năng sưởi ấm sẽ tạo ra hơi ẩm sau 3 phút kể từ khi được kích hoạt.

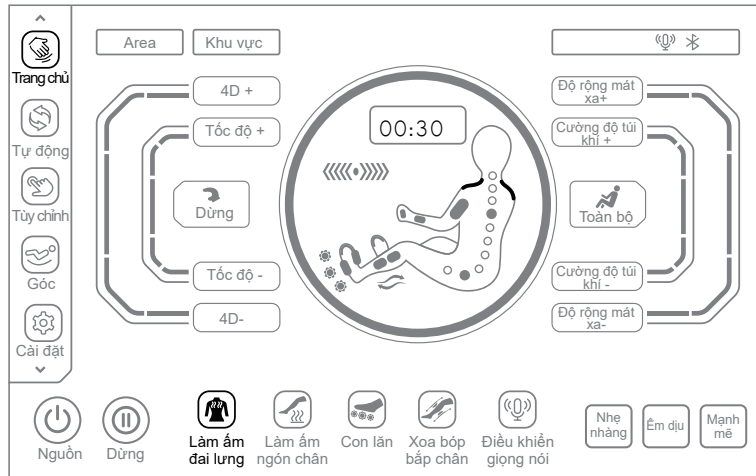


3. Sưởi ấm ngón chân: Trên giao diện "Trang chủ", như hình minh họa bên dưới, chọn phím "Sưởi ấm ngón chân" để bật hoặc tắt chức năng sưởi ấm ngón chân. Chức năng sưởi ấm sẽ tạo ra hơi ẩm sau 3 phút kể từ khi được kích hoạt.

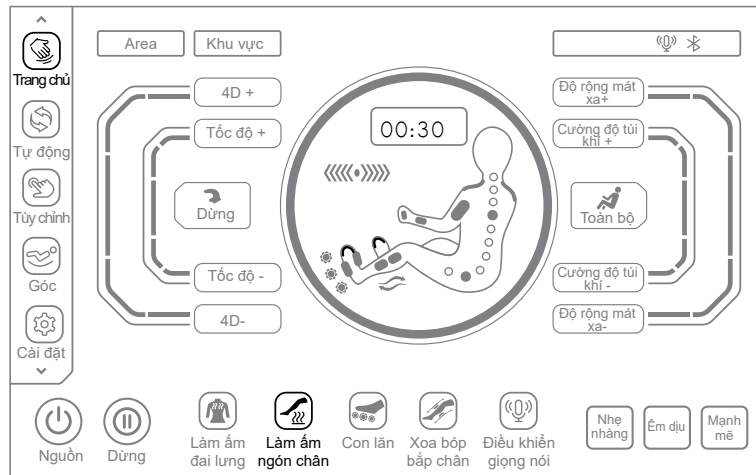


Hướng dẫn vận hành

4. Con lăn chân: Trên giao diện "Trang chủ", như minh họa trong hình bên dưới, hãy chọn phím "Con lăn chân" để bật hoặc tắt chức năng Con lăn chân. Với ba tốc độ có thể điều chỉnh, hãy nhấn phím này lần đầu để bắt đầu tốc độ Cấp độ 1; nhấn phím này lần thứ hai để bắt đầu tốc độ Cấp độ 2; nhấn phím này lần thứ ba để bắt đầu tốc độ Cấp độ 3; và nhấn phím này lần thứ tư để tắt chức năng Con lăn để giày, chức năng này sẽ được chuyển đổi theo chu kỳ.

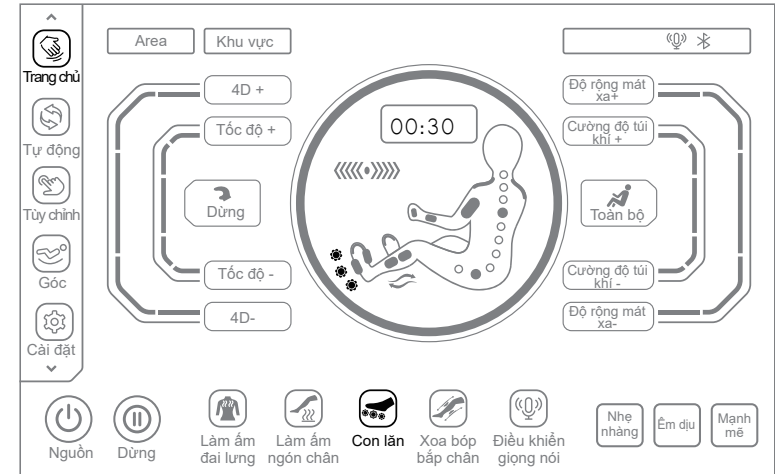


5. Con lăn chuyển động bắp chân: Trên giao diện "Trang chủ" như hình minh họa bên dưới, chọn phím "Bắp chân" để bật hoặc tắt chức năng massage xoa bóp bắp chân. Mặt trong của bắp chân được trang bị chức năng massage xoa bóp, mặt ngoài được trang bị chức năng massage bóp túi khí, có thể làm giảm tình trạng cứng hoặc căng cơ bắp chân do đứng lâu.

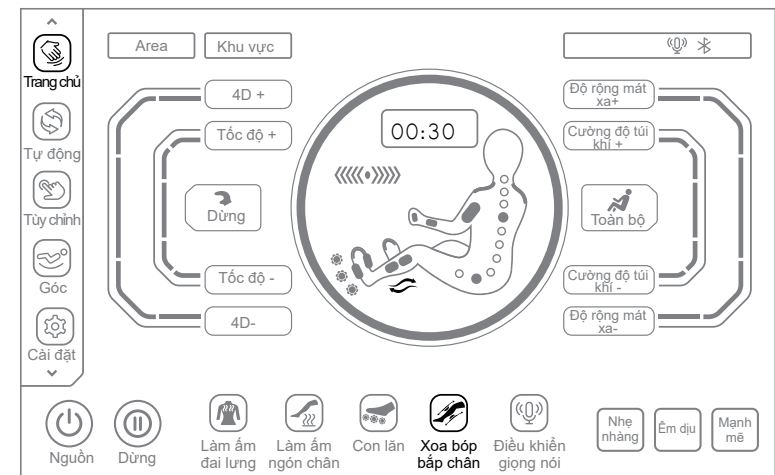


Hướng dẫn vận hành

6. Giọng nói: Trên giao diện "Trang chủ", như hình minh họa bên dưới, chọn phím "Giọng nói" để đánh thức trợ lý giọng nói. Nếu bạn nhấn nút này và nghe thấy tiếng "tách tách", trợ lý giọng nói không thể đánh thức bình thường, vui lòng quay lại màn hình cài đặt để xác nhận xem chức năng điều khiển bằng giọng nói đã được bật hay chưa. Nếu chức năng điều khiển bằng giọng nói chưa được bật, vui lòng bật chức năng này.

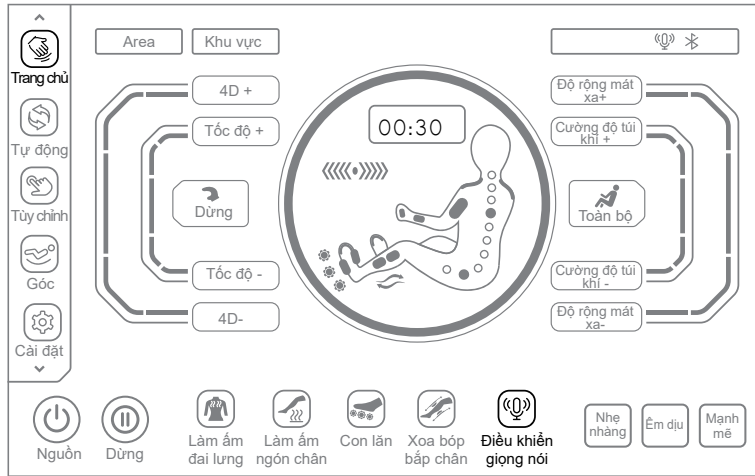


7. Điều chỉnh vị trí vai: Trên giao diện "Trang chủ" như minh họa trong hình bên dưới, chọn phím "Vai" và nhấn các nút mũi tên lên và xuống trong menu bật lên để điều chỉnh vị trí vai, với tổng cộng 11 mức có thể điều chỉnh.

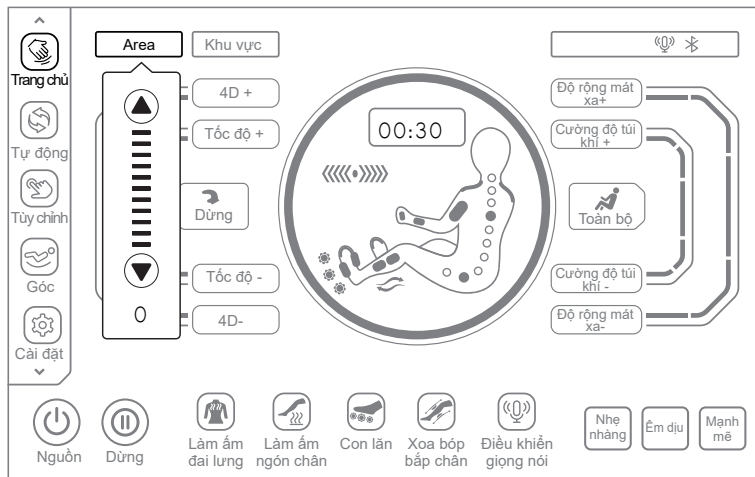


Hướng dẫn vận hành

8. Điều chỉnh thời gian massage: Trên giao diện "Trang chủ", như hình minh họa bên dưới, chọn phím điều chỉnh thời gian massage "00:30", nhấn nút mũi tên cộng và trừ trong menu bật lên, bạn có thể tăng hoặc giảm thời gian massage. Nhấn phím "+", thời gian tăng thêm 5 phút, tối đa 40 phút. Nhấn phím "-", thời gian giảm đi 5 phút..

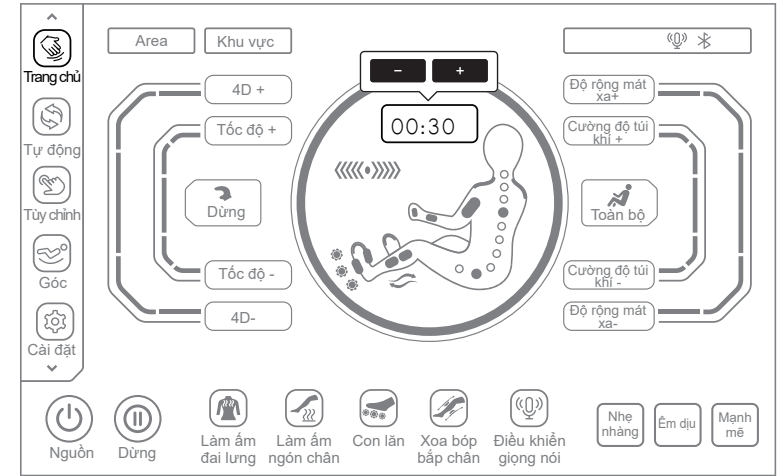

9. Chọn mức độ: Trên giao diện "Trang chủ" như hình minh họa bên dưới, chọn phím "Nhẹ nhàng", "Dịu nhẹ", "Mạnh mẽ" để chọn cường độ massage phù hợp.

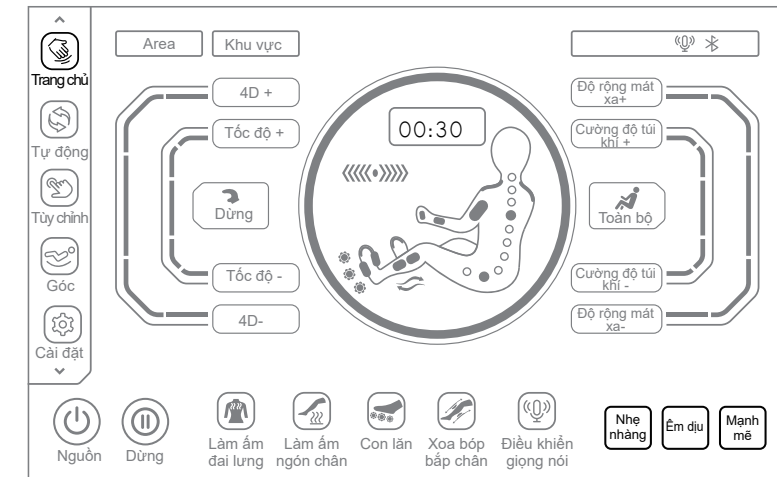

Hướng dẫn vận hành



Nhắc nhở

Hướng dẫn sử dụng giao diện APP Bluetooth của ghế massage, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển từ xa gồm 19-52 trang.


XIX. Kế thức massage

Quá trình massage:


1. Nhấn và giữ nút nguồn trên tay vịn để tắt tất cả các chức năng massage và đặt lại góc ghế massage.
2. Nhấn phím BẬT/TẮT trên giao diện ỨNG DỤNG Bluetooth, tất cả các chức năng massage sẽ dừng lại và góc của ghế massage sẽ trở về vị trí ban đầu.
3. Nhấn phím PAUSE trên giao diện ứng dụng Bluetooth rồi nhấn nút ON/OFF, tất cả các chức năng massage sẽ dừng lại và góc của ghế massage sẽ trở về vị trí ban đầu.
4. Sử dụng lệnh thoại để tắt, tất cả các chức năng massage đều bị tắt và góc ghế massage được đặt lại.
5. Khi hết thời gian quy định, tất cả các chức năng massage sẽ tắt. Nếu bật chức năng đặt lại ghế massage, góc của ghế massage sẽ được đặt lại. Nếu không, góc của ghế massage sẽ không thay đổi.




Ngắt toàn bộ nguồn điện của máy, như minh họa trong hình (Sơ đồ vị trí công tắc nguồn của toàn bộ máy).

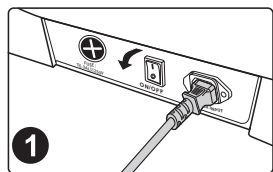

1 Tắt công tắc nguồn ("0" vị trí)

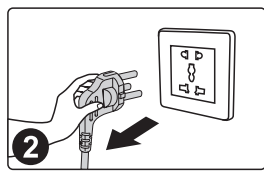

2 Sơ đồ rút phích cắm điện

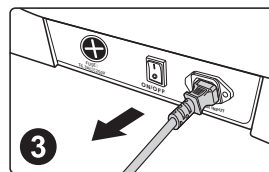

3 Rút dây nguồn kết nối sản phẩm

Vệ sinh và bảo trì

Làm sạch các bộ phận bằng da tổng hợp và nhựa

Lau da bằng vải mềm, khô.

■ Không sử dụng hóa chất như chất pha loãng, xăng, cồn, v.v. để vệ sinh thiết bị.

■ Khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có bán trên thị trường (giẻ lau), vui lòng làm theo hướng dẫn sử dụng.

■ Nếu da tổng hợp đặc biệt bền, hãy lau theo cách sau.

- ① Nhúng một miếng vải mềm vào nước hoặc nước nóng có chứa 3% đến 5% chất tẩy rửa trung tính, sau đó vắt kỹ.
- ② Sử dụng vải mềm ở trên để lau bề mặt da.
- ③ Lau sạch dung dịch tẩy rửa bằng vải thấm nước sạch và vắt kỹ.

④ Lau bằng vải mềm vắt khô.

⑤ Để khô tự nhiên.


■ Khi khó loại bỏ vết bẩn, vui lòng nhúng bột melamine có bán sẵn trong chất tẩy rửa trung tính, sau đó lau máy bằng bột này.

■ Không sử dụng máy sấy tóc để làm khô bề mặt.

■ Cần thận khi lau máy bằng vải denim và vải màu vì màu của vải sẽ làm ố bề mặt da tổng hợp.

■ Không để các bộ phận này tiếp xúc với nhựa trong thời gian dài vì sẽ làm đổi màu.

■ Da tổng hợp có thể bị đổi màu, vì vậy khi sử dụng thuốc nhuộm tóc, vui lòng che phần tiếp xúc bằng khăn.

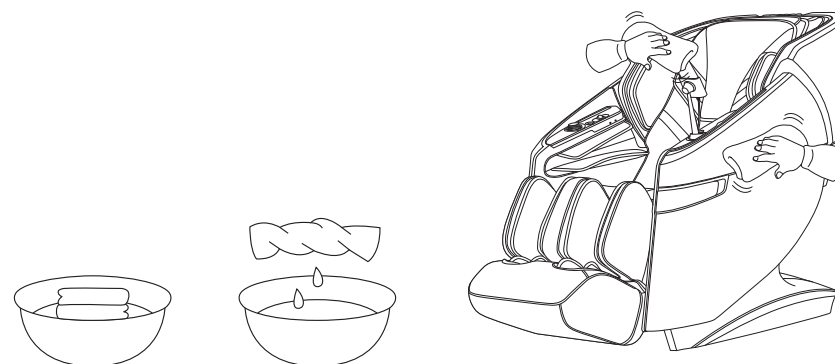

Xử lý sự cố

Lỗi	Khi cơ cấu bấp chân hoặc tựa lưng đạt đến vị trí nhất định, hãy nhấn nút điều chỉnh tương ứng, vị trí đó sẽ không thay đổi nữa và sẽ phát ra tiếng "bíp, bíp" liên tục
Giải pháp	Do thiết kế cấu trúc sản phẩm và yêu cầu công thái học, sản phẩm này có thiết kế bảo vệ hạn chế cho trạng thái giới hạn của việc điều chỉnh độ cao. Đồng thời, âm thanh nhắc nhở sẽ phát ra khi đạt đến giới hạn.

Lỗi	Chức năng không hoạt động hoặc một số chức năng không hoạt động sau khi bật máy.
Giải pháp	Sau khi bật máy bằng cách nhấn nút công tắc, cần phải chọn thủ công chương trình massage tự động hoặc chế độ làm việc khác. Nếu không sử dụng, máy sẽ tự động tắt sau 20 phút. Nếu chọn chế độ vận hành thủ công, các chức năng không được chọn có thể bị vô hiệu hóa và cần phải cài đặt thủ công chế độ làm việc ở chế độ thủ công..

Lỗi	Máy phát ra tiếng cọ xát da khi điều chỉnh tư thế.
Giải pháp	Sản phẩm này sử dụng da chống ăn mòn cao cấp, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường. Do đặc tính vốn có của vật liệu da, khi ma sát với chuyển động tương đối sẽ phát ra tiếng ồn nhỏ, đây là hiện tượng bình thường. Lưu ý: Nếu nghe thấy tiếng vải hoặc da bị rách khi máy đang chạy, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và tìm kiếm sự bảo trì chuyên nghiệp.

Lỗi	Bánh xe massage không chạm tới vai hoặc cổ
Giải pháp	Nếu đầu không chạm vào đệm đầu hoặc lưng không chạm vào tựa lưng, vị trí vai có thể thấp hơn vị trí thực tế trong quá trình nhận dạng hình dáng cơ thể. Ngồi ở vị trí sâu nhất của ghế, tựa đầu vào tựa đầu và bắt đầu lại từ đầu..

Lỗi	Thiết bị bị hỏng. Dây nguồn hoặc phích cắm nóng bất thường.
Giải pháp	Để tránh tai nạn, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ được chỉ định nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về sản phẩm này.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Model: MCB-909
Tên: Massage Chair
Điện nguồn: 220-240V~ 50Hz/60Hz
Công suất: 180W
Thời gian: 20min
Cấp độ an toàn: Class I